

# HipRest Compact plus™

hofftekompressionsbandage - MeropeStyle®



**HipRest Compact plus** kompressionsbandage er en kompakt hoftebandage som med burrelukning og strækindlæg er let og enkel at anlægge. HipRest er et kvalitetsprodukt hvad angår holdbarhed, hudvenlighed og komfort. HipRest er økocertificeret og velegnet til også at bæres i længere tid.

**HipRest Compact plus** stabiliserer hofteleddet efter operation, forebygger at hofteknæen går af led ved at indskrænke bevægeligheden og støtter patienten under genoptræningen. Bandagen giver endvidere mulighed for at indlægge koldt eller varmt kompres.

**HipRest Compact plus** kan vaskes i maskine med skånevask ved 30°C. Må ikke klorbleges, stryges, kemisk renses eller tørretumbles.

Enhedspris pr. januar 2018 kr. 620,- pr. stk. excl. moms.  
Ved min. 6 stk. kun kr. 570,- pr. stk. excl. moms



I. Smith-Ulnits • Hoptrup Vandkær 39 • 6100 Haderslev • Tlf 2242 5808 •  
www.i-bensmith.dk • iben@i-bensmith.dk • Kreditbanken konto nr. 7932 0001126249 •  
CVR 3956 6060


## Sådan tager man mål og anlægger HipRest Compact plus

HipRest Compact plus fås i to størrelser til højre og to størrelser til venstre ben. Find den mest velegnede størrelse ved at måle fra livet til ned midt på låret.

Størrelse	Vnr. højre	Vnr. venstre	Længde	Omfang
Str. 1	OH410-02	OH410-12	42 cm	81 cm
Str. 2	OH410-04	OH410-14	47 cm	101 cm

De indsatte stivere er med til at støtte hofteknæen og holde leddet på plads. De sidder i de fire burrelukkede lommer på bandagen, hvor de kan skydes lidt op og ned eller helt fjernes, så de ikke generer. Ønskes større fasthed kan ekstra stivere rekvireres.

1. Den brede del lægges øverst med de indlagte stivere på ydersiden af hofteknæen. Rul den lange klædedel fast bagom kroppen til den når over klædedelen på forsiden.
2. Den elastiske del modsat stiverne strammes og fæstes med burrelukningen i den ønskede stilling.
3. På samme måde lægges den nederste del af bandagen omkring låret.
4. Fæst tilsidst med burrelukningen for at opnå den optimale tilpasning.

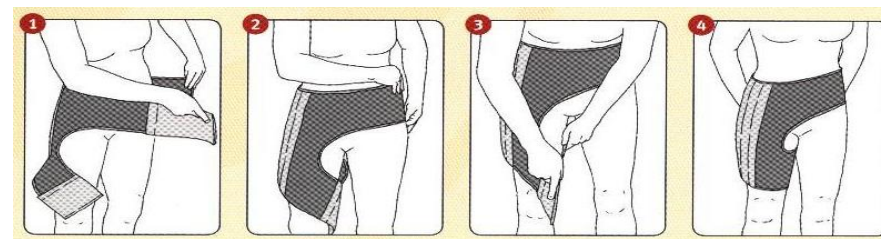

Første gang bandagen bruges bør den tilpasses af medicinsk fagpersonale  
Læg ikke bandagen på utildækkede sår  
Kan bortskaffes med husholdningsaffaldet

