

## Anne Bremsstol varenr. 500-301



Anne bremsstol brems automatisk. For at køre med stolen, holder du i håndtaget under sædet. Når håndtaget slippes, er stolen atter låst.

**Højdejustering:** Håndtag i venstre side. Hold håndtaget oppe, mens du enten letter dig eller lægger vægt i, for at ændre højden på stolen.

**Sædekip:** Forreste håndtag i højre side. Når håndtaget er oppe, er sædet låst op og kan tippe frem og tilbage. Skub håndtaget ned, for at låse den ønskede position. Kan du ikke få den til det, skyldes det at ryglænet er for langt fremme. Stå evt. af stolen, og tip det med hænderne, og lås så ved at tage håndtaget ned.

**Ryglæn:** Bagerste håndtag i højre side. Når håndtaget er oppe, følger ryglænet dig frem og tilbage. Skub håndtaget ned, for at låse i ønsket position. Bagpå stolen, sidder der en håndskrue, til højdejustering af ryglænet.

**Bremse:** Det er sort eller rødt. Ved bestilling vælges det om håndtaget skal placeres foran eller i højre eller venstre side. Hold håndtaget oppe, for at køre, samt dreje med stolen. Når du slipper håndtaget, er stolen låst. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager. Stolen er automatisk låst, når du ikke røre håndtaget.

Vi giver 5 års garanti på stolen, hvis noget skulle gå i stykker. Garantien gælder fra fakturadatoen.