

# SoftCloud™

Alternierende madrasser



Anerkendt teknologi til redistribuering af tryk

ALSIDIGHED | INTUITIVT DESIGN | KOMFORT



# Invacare

## SoftCloud sortiment

Trykterapi ved hjælp af alternerende madrasser, i samspil med individuel repositionering, anbefales til forebyggelse og behandling af tryksår døgnet rundt.

Som plejepersonale kommer man af og til ud for situationer, hvor borgeren har brug for at blive repositioneret hyppigere, end det er praktisk muligt at tilbyde. I de tilfælde anbefaler EPUAP, at borgeren tilbydes et aktivt madrassystem, som en del af det forebyggende tiltag.

Invacares **SoftCloud** sortiment består af aktive top- og helmadrasser af høj kvalitet, designet til anvendelse af borgere med høj risiko for at udvikle tryksår. Den alternerende trykterapi i **SoftCloud** madrasserne er designet med henblik på at skabe en repositioneringsrytme, der ligner det naturlige og spontane bevægemønster. Således redistribueres trykket flere gange hver time, selvom borgeren ikke bevæger sig.



“Anvend en aktiv madras (top eller helmadras) til borgere med **høj risiko for at udvikle tryksår**, når det ikke er muligt at tilbyde hyppig repositionering” (EPUAP, 2014)

**NYE**

**EGENSKABER**

**1**

### Intuitivt design

- ▶ Moderne og intuitiv pumpe



**2**

### Indentificerer og justerer automatisk

- ▶ Korrekt klinisk behandling med henblik på optimal komfort





3

### Digital pumpe med plejefunktion/max luftindtag

- ▶ Tilbyder en fast liggeflade, der tilsikrer optimale forhold under forflytninger og pleje, for både personale og borger

#### ▶ Håndtag

Enkel håndtering og transport af madras

#### ▶ Hjørneringe til lagen

Løs fastgørelse af lagen med adgang til CPR ventil

#### ▶ Betræk med lynlås på 4 sider

360 graders lynlås med quick release funktion, der gør afmontering hygiejnisk og enkel

#### ▶ "Hængselsled" ved rygdæl

Tilbyder øget og optimal tilpasning i forbindelse med indstilling af ryg i siddeposition (Pro) og forebygger shear

#### ▶ Fjernelse af tryk under hælzone

Tilbyder 5 hælceller (Ace/Pro) og individuel og permanent fjernelse af tryk under hæle (Pro) til udsatte borgere evt. med eksisterende hælsår

#### ▶ Kabelhåndtering

Ingen løse kabler på gulve

#### ▶ CPR ventil

Forstærket og bekvemt placeret CPR ventil til anvendelse i forbindelse med hjerte-lunge-redning

#### ▶ Transportbeslag

I pumpen kan indsættes et beslag, der sikrer, at madrassen holder luft i op til 72 timer uden strøm



# SoftCloud alternerende madrassortiment

## Sortimentet tilbyder 4 enkle løsninger:



### SoftCloud Top

- ▶ Topmadras
- ▶ Opbygget af luftceller, der blidt alternerer uønsket tryk
- ▶ 12 minutters cyklus
- ▶ 1 op/1 ned
- ▶ 3 statiske hovedceller

### SoftCloud Air

- ▶ Helmadras
- ▶ Opbygget af luftceller, der blidt alternerer uønsket tryk
- ▶ 12 minutters cyklus
- ▶ 1 op/1 ned
- ▶ 3 statiske hovedceller

### SoftCloud Ace

- ▶ Helmadras
- ▶ Opbygget af luftceller, der blidt alternerer uønsket tryk
- ▶ 10 minutters cyklus
- ▶ 2 op/1 ned
- ▶ Betræk permeabelt i forhold til fugt og med højfrekvent svejste sømme
- ▶ Speciel hælzone for særligt følsomme hæle
- ▶ 3 statiske hovedceller

### SoftCloud Pro

- ▶ Helmadras
- ▶ Opbygget af luftceller, der blidt alternerer uønsket tryk
- ▶ 10 minutters cyklus
- ▶ 2 op/1 ned
- ▶ Permanent oppustede celler langs madrassen for stabil og komfortabel liggeflade
- ▶ Speciel hælzone for særligt følsomme hæle og hæle med sår
- ▶ 3 statiske hovedceller

## Intuitiv pumpe

Komfortniveauet indstilles ved hjælp af **SoftCloud** pumpens intuitive display.

**SoftCloud** madrassernes pumpe tilbyder tillige CLP indstilling (kontinuerligt lavt statisk tryk) til gavn for fx borgere i terminalstadiet eller med stærke smerter. Trykket i madrassen indstilles ved hjælp af selvidentificering og automatisk justering. Audiovisuelle alarmer adviserer om eventuelle fejl i form af fx lavt tryk eller strømsvigt, og displayets indstillinger kan låses for øget sikkerhed.



## Tekniske data ▼


Yderligere information om SoftCloud sortimentet kan indhentes ved kontakt til Invacare eller fra Invacares hjemmeside [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)



Bredde ▼



Længde ▼

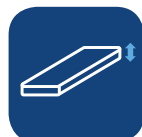

Højde ▼



Max brugervægt ▼

<b>SoftCloud Top</b>	83/85/88 cm	200 cm	13 cm	200 kg
<b>SoftCloud Air</b>	83/85/88 cm	200 cm	18 cm	200 kg
<b>SoftCloud Ace</b>	83/85/88/103/116 cm	200 cm	20 cm	220 kg/ 350 kg
<b>SoftCloud Pro</b>	83/85/88 cm	200 cm	20 cm	220 kg



Dybde ▼



Bredde ▼



Højde ▼

<b>Top/Air</b>	12 cm	25 cm	24 cm
<b>Ace/Pro</b>	12 cm	29 cm	25 cm

## Farve ▼



Mørk blå

### Produceret i overensstemmelse med:

European Standard: BS EN 597-1 Cig  
European Standard: BS EN 597-2 Match  
BS7177:1996 Crib 5.

### Pumpe:

Støjniveau: ≤ 30 dB

## Anden information ▼

Essentiel sygepleje er overordentlig vigtig for forebyggelse af tryksår. Sortimentet af madrasser vil med sikkerhed bidrage positivt til resultatet af den forebyggende pleje og behandling. Uddannelse, klinisk evaluering og handlingsbaseret planlægning, med fokus på den enkelte borgers skrøbelighed og de fundamentale faktorer, er afgørende. Adskillige risikoscoringsmodeller er tilgængelige og bør anvendes i samspil med en løbende klinisk vurdering.

OBS: farver kan variere en anelse fra ovenstående

Tel: +45 3690 0000  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37  
2605 Brøndby  
Danmark



Yes, you can.®