

Power

- elkørestol med muligheder



Alum Bergen™

- **Kørestolen har sæde/ryg/benstøttefunktion**
Ryg og benstøtter justeres mod vandret. Der opnås en hvilefunktion i kørestolen som trinløst kan reguleres via joysticket. Derved kan brugeren ændre siddestilling efter behov
- **Total længdekompensering**
Sikrer brugeren optimal sidestilling, ligesom cher undgås
- **Power kan udbygges i takt med brugerens behov**
Sikrer optimal tilpasning til brugeren
- **Mulighed for ekstra moduler og tilbehør**

Power

- elkørestol med muligheder




1 Denne kørestol er monteret med højdeløft (tilbehør).

Power er en kombineret inde/ude elkørestol.

Elstolen er udstyret med en elektrisk reguleret sæde/ryg/benstøttefunktion, hvor brugeren ved tryk på en knap kan køre ryggen ned i hvilestilling, samtidig med at benstøtterne går op mod vandret. Det giver brugeren mulighed for at regulere sin egen siddestilling fra aktiv til hvilestilling. Power kan udbygges i takt med at brugerens behov for siddekomfort og elektriske løsninger stiger. Stolen kan udstyres med mange forskellige servofunktioner samt omverdenskontrol/scannersystem. Elstolen er udført i stålør/ plader med 2-lags pulverlakering, der sikrer lang levetid. Elektronik og motorer er af højeste kvalitet, idet vore leverandører af gearmotorer og elektronik er firmaer med stor kompetence gennem årelang erfaring og viden, som leverandører til denne branche. Power programmet er udviklet i samarbejde med brugere og fagfolk på området og er under konstant udvikling.

1

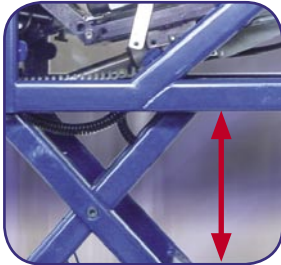

Power er modulopbygget således, at man kan tage dele af/bygge på, afhængigt af behovet.

Højdeløft kan bringe brugeren op i samme højde som en seng. Det er en lettelse i en forflytningsituation.

2



Rygvulster

kan leveres i forskellige størrelser og udformninger.

Dermed kan kørestolen tilpasses brugerens behov for støtte.

3



Joystick

Brugerbetjent.

Kan via ekstra joystick placeret bag på kørestolen betjenes af hjælper.

Der er mulighed for andre styremoduler.

4



2 delte lægstøtter

Er til stor fordel for personalet.

Brugerens ben skal ikke løftes over lægstøtten når benstøtten skal tages af/svinges ud til siden. Ved at trække i udløserhåndtaget (pil1) vipper lægstøtten tilbage (pil2) og man kan nu løfte foden fri fra fodpladen. Herefter kan **benstøtterne** ved at trække i udløserhåndtaget (pil3) tages af/svinges ud til siden.

5



Hjul

Afhængig af hvilket terræn som kørestolen skal kunne køre i, kan der vælges mellem forskellige hjulbredder og størrelser.

Power

- elkørestol med muligheder



Underdel:

Stel: Stålrør/ plader, 2- lags pulverlakering.
 Motorbremse : Elektrisk til- og frakobling.
 Batterier: 2 x40 amp/24V/ 2x60 amp.
 Svinghjul: 210x65 punkterfrie.
 Drivhjul: 350x70 punkterfrie.
 Skuffe med udtræk til batterier, motorer og styring.
 Bevægelig forbro.

Overdel:

Sædeenhed: Justerbar i dybde og grundvinkel.
 Plansæde: Træ med gummigjorder. Betræk i skai.
 Sædepude: Koldskum, brandhæmmende, 7 cm høj.
 Ryg: Elektrisk reguleret, justerbar i grundvinkel og nedfældelig for transport.
 Rygpolstring: Koldskum i forskellige kvaliteter, brandhæmmende.
 Rygvulster: Granulat og koldskum, brandhæmmende.
 Armlæn: Polstrede, højde/vinkeljustering og opklappelige.
 Benstøtter: Følger sædets/ryggens vinkel, svingbare, aftagelige og højdejusterbare.
 Lægstøtter: Polstrede, justerbare i vinkel, dybde bredde og højde.
 Fodplader: Slagfast plast, justerbare i vinkel og højde.
 Bremses: Elektrisk ind- og udkobling.
 Joystick: Model Dolphin, monteret på saksearm.

Stof: Microfiber, flammehæmmende.
 Kørehastighed: 6,8 km/time
 Kørestrækning: 20 km/afhængig af terræn
 Max. højde forhindring: 6 cm
 Max. stigningsgrad: 20 grader
 Opladningstid: 8 til 12 timer
 Elektrisk regulering af sæde/ryg og benstøtte via joystick .
 Værktøjspose.
 Brugsvejledning.


Målskema

·Målt i mm hvis ikke andet er angivet
 ·Tolerance på ±10 mm og ±1°

		Small/ Small	Medium/ Small	Medium/ Medium	Large/ Medium	X-large/ Medium
A	Sædebredde	400	450		500	550*
B	Sædehøjde excl. pude	Smalle hjul ~ 440		Brede hjul ~450		
C	Sædedybde	3 indst. på hhv. 450, 475 og 500 m.værktøj				
D	Ryghøjde ekskl. pude	640				
E	Armlænshøjde fra plansæde	210 ▶ 345 /indst. med 7,5 mm interval				
F	Bredde mellem armlæn	400	450		500	550
G	Benstøttelængde fra plansæde	360 ▶ 495/indst. m. 7.5 mm interval				
I	Total højde /klar til brug	Smalle hjul ~ 980		Brede hjul ~990		
J	Total bredde /klar til brug	Smalle hjul: 590		Brede hjul: 640		690
K	Total længde ekskl./inkl. benstøtter	800/1000				
L	Ryg vinkel	Målt ved standardindstilling for sæde-/ryg-funktion. Tilt er neutral. Se iøvrigt særskilt oversigtsskema.				
M	Sædevinkel	Min. i aktiv: +3° Max. i hvile: +45°				
N	Benstøttevinkel	Min. i aktiv: +4° Max. i hvile: +13°				
P	Fodpladevinkel	115° ▶ 180° /trinløs				
		+90° ▶ +120° / m. værktøj				
	Transportvægt/uden løsdele	Ca. 125kg		Ca. 140kg		Ca. 150kg

* kan leveres med en sædebredde fra 510 til 700mm

Højdemål B og I er opgivet for ens størrelser af overdel og underdel. Ved uens størrelser, skal målene forhøjes med 40 mm.
 Ved montering af tiltmodul skal højdemålene I og B forhøjes med 20 mm.
 Ved montering af sædehejsmodul bliver højdemålene I og B forhøjet med 60 mm.

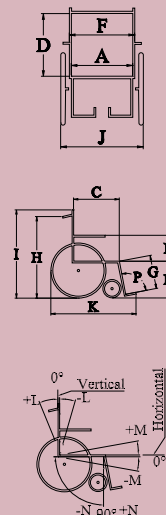

Producent & forhandler:

Comfort-Gruppen A/S
 Broholmvej 9
 DK-5463 Harndrup
 Tlf. +45 70 23 50 10
 Fax +45 70 23 50 12
 E-mail: info@comfort-gruppen.dk
 www.comfort-gruppen.dk

HMI NUMRE

Small/small 40cm	28785
Medium/small 40cm	15104
Medium/medium45cm	15105
Medium/large 50cm	15106
Medium/X-Large 55cm	41202
Underdel/overdel	



Ilum Bergen™

We are not a wheelchair company - we are a mobility provider