

SMOOV

fra Alber



SMOOV

Diskret og praktisk hjælpemotor til sjove oplevelser





SMOOV er en nytænkende, diskret samt praktisk hjælpemotor. **SMOOV** har en lav egenvægt og er enkel at håndtere. **SMOOV** monteres hurtigt og let på din kørestol, når du ønsker det. **SMOOV** kan anvendes til både manuelle fastramme og foldbare kørestole.

En sjovere hverdag

SMOOV er for dig, som er aktiv og har en travl hverdag - til dig, som ser mulighederne og ikke forhindringerne. **SMOOV** forebygger og reducerer belastning af arme og skuldre, samtidig med den giver fart, spænding og mulighed for sjove oplevelser.

Valget er dit

SMOOV er kraftfuld, kan køre med en hastighed på op til 10 km/t og ca. 20 km på en opladning. **SMOOV** giver dig fleksibilitet, gør din hverdag sjovere og mindre udfordrende. Når du ikke ønsker hjælp, kan **SMOOV** stå til ladning eller ligge klar i bilen til næste tur. Når du ønsker hjælp, monteres **SMOOV** på få sekunder uden brug af værktøj.

Når design og vægt er vigtigt

SMOOV er diskret og let, men samtidig stærk og funktionel. **SMOOV** kræver kun minimal tilpasning af din manuelle kørestol. **SMOOV** kan blive din nye følgesvend, der følger dig på rejser, på de "dårlige dage" eller bare når du ønsker det. **SMOOV** opfylder flyselskabernes krav til litiumbatterier. Det betyder, at du kan tage **SMOOV** med ud og opleve verden uanset, om det er forretning eller fornøjelse.



Smoov og smartphones - en smart kombination

Smartphones er blevet en fast del af vores hverdag og **Alber** har udviklet en app kompatibel med **SMOOV**, kaldet "**SMOOV® O10**". App'en er kompatibel med både Apple og Android smartphones. Det er hurtigt og let at forbinde din telefon med **SMOOV** via Bluetooth. Anvendelse af app'en giver dig en masse ekstra muligheder og funktioner, men **SMOOV** kan også sagtens anvendes uden at være tilsluttet til din smartphone.



Med din smartphone forbundet til Smoov kan du se:

- ▶ Batterikapacitet
- ▶ Hastighed
- ▶ Tilbagelagt distance

Du får mulighed for:

- ▶ At vælge mellem forskellige køreprofiler
- ▶ Gemme informationer fra dine køreture
- ▶ Se statusmeddelelser og diagnosticer
- ▶ Finde detaljer om din **Smoov**

Unikke egenskaber



◀ Drivenhed

SMOOV drivenheden er udført i aluminium, indeholder et kraftigt Li-Ion batteri og en stærk motor med et 360° roterbart drivhjul. Håndtaget øverst på **SMOOV** fungerer både som bærehåndtag og som sikkerlås, når drivenheden er monteret. **SMOOV** anvender magnetisk ladestik, der er let at anvende selv med begrænset håndfunktion. **SMOOV** er forsynet med lys, batteriindikator og et USB-C stik, der kan anvendes til opladning af kontrolenheden eller din smartphone.



◀ Kontrolenhed

SMOOV er enkel at anvende og let at kontrollere ved hjælp af den separate kontrolenhed. Kontrolenheden monteres i en holder, der kan placeres, hvor du synes, at den er let at betjene. Kontrolenheden anvendes til tænd/sluk, start/stop, regulering af hastighed og til at vise batterikapacitet.



◀ Lader og ladekabel

Til at oplade **SMOOV** medfølger der en praktisk oplader. Opladeren er lille og let, så den nemt kan tages med på ture eller ferie. Laderen afbryder automatisk når batteriet er fuldt opladet.

Sammen med laderen følger et USB-C kabel, der er beregnet til at oplade kontrolenheden med.











Monteringsbeslag

SMOOV kan monteres på både fastramme og foldbare kørestole med max. 2° cambring. For at kunne anvende **SMOOV** skal man have et lille diskret beslag monteret på sin kørestol. Er det en fastrammekørestol monteres det på hjulakslen og det en foldbar kørestol, monteres det på en aftagelig hjulakseladapter.

Tekniske data ▼

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

			
Max. brugervægt ▼	Max. totalvægt ▼	Max. hældning ▼	Motor ▼
Alber SMOOV	140 kg	170 kg	16 %
			250 W / max. 450 W

			
Hastighed ▼	Batterikapacitet ▼	Batterikapacitet ▼	Rækkevidde ▼
Alber SMOOV	10 km/t	36 V, 6.2 Ah	224 Wh
			20 km



SMOOV overholder:
Det Medicinske Direktiv 2017/745/EU

■ ■ ■ MADE IN GERMANY

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®

© 2019 Invacare International Sàrl. All rights reserved. All information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. e-motion - DK - 06/2019

