

**Netti**<sup>®</sup>  
BY ALU REHAB

 **Netti**<sup>®</sup> CUSHIONS

## UNIKKE EGENSKABER

- ✓ Altid klar til brug
- ✓ Meget god trykfordeling
- ✓ Ventilerende
- ✓ Temperaturstabil
- ✓ Stabiliserende egenskaber
- ✓ Rygpuder med enkel og stabil montering med velcro
- ✓ Højderegulerbarer rygpuder
- ✓ Stort udvalg af størrelser
- ✓ Lav vægt
- ✓ Designet til enkel forflytning
- ✓ Vaskbar og genbrugsvenlig



BREDT SORTIMENT SIKRER DEN RIGTIGE LØSNING TIL DIG

# NETTI SEATING SOLUTION GANSKE ENKELT MERE KOMFORT

Brugerkomfort skabes ud fra et omhyggeligt udtænkt design og sikres af et optimalt samspil mellem kørestol, puder og tilbehøret. Det gennemtænkte design skaber synergi i de enkelte løsninger, der understøtter hinanden og sikrer en komfortabel siddestilling i henhold til de 7 siddeprincipper.

Det er det, der gør Netti kørestolen til noget særligt.




## NORSK DESIGN GIVER ULTIMATIV KOMFORT

Vores udvalg af ergonomiske kørestole er det mest omfattende på markedet. En Netti kørestol er indbegrebet af avanceret norsk teknologi med en solid ramme, kvalitetspuder og avancerede tekstiler, hvilket giver dem deres fremragende brugervenlighed for både bruger og hjælper.

Naturligvis er alle vore produkter produceret i henhold til norske kvalitetsstandarder og vi arbejder efter ISO 9001 og ISO 13485. Vores produkter er CE mærkede og opfylder alle gældende europæiske normer.



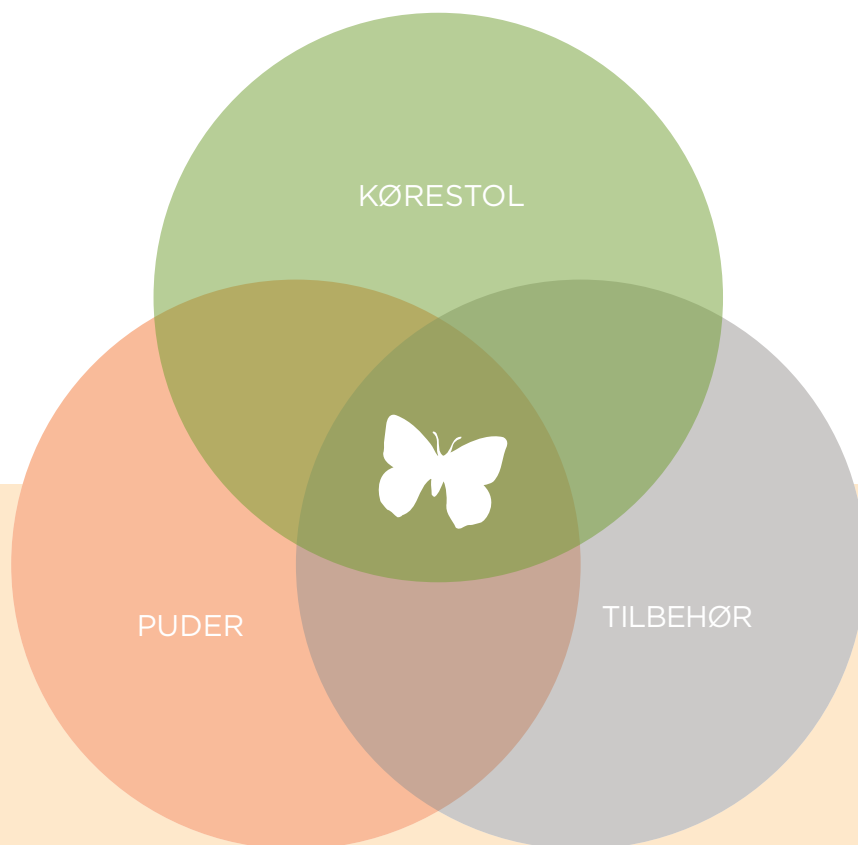

## TUSINDVIS AF KOMBINATIONS- MULIGHEDER - DESIGNET TIL DIG

EKSEMPELVIS STABILISERES  
BÆKKENET VED EN RÆKKE AF  
VANCEREDE DESIGNMULIGHEDER:


- Siddepudens design
- Udformning af sædepladen sammenholdt med puden
- Omdrejningspunktet for benstøtter og ryglæn
- Rygpudens udformning
- Det individuelt udvalgte tilbehør, såsom sidepolster, abduktionsklods eller lårstøtter

Det er opmærksomheden på detaljerne, som giver en helt unik siddeoplevelse og gør Netti kørestolen til noget særligt.



# MERE TID TIL GODE OPLEVELSER MED VENNER

Netti kørestolen byder på mange muligheder og har et stort udvalg af tilbehør, så brugeren sikres optimal komfort samt en god kropsholdning og trykfordeling. Det giver f.eks. en bedre spisesituation og gør at brugeren kan sidde i stolen i længere tid ad gangen, hvilket giver øget livskvalitet for brugeren, som får mere tid at tilbringe blandt venner og familie.

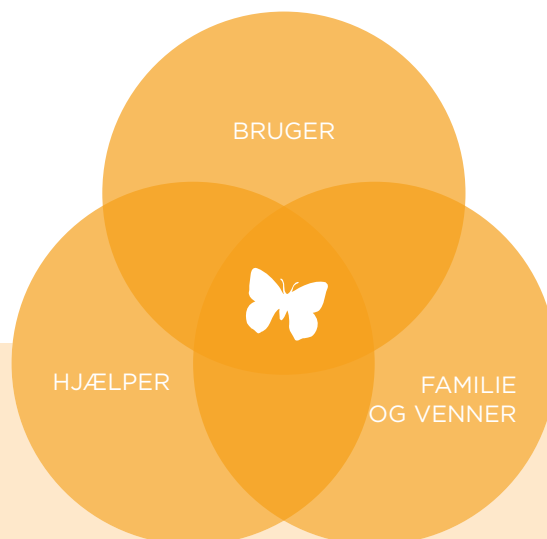

De mange kombinationsmuligheder sikrer, at Netti kørestolen kan tilpasses brugerens behov og tilbyder optimal siddekomfort. Hemmeligheden ligger i de mange kombinationsmuligheder og interaktionen mellem rammens ergonomiske design, tilbehøret og de unikke Netti puder.

Disse elementer garanterer:

- Komfortabel og understøttende siddestilling over en længere periode.
- Forebyggelse af fremskridning i stolen og utilsigtet siddestilling.
- Øget aktivitet og interaktion samt lettere åndedræt, spising og forflytning ud af stolen.

## + VARIATION AF SIDDESTILLING

Ryg, sæde og benstøtter er lette at justere, så brugeren ofte kan skifte stilling. Resultatet er optimal trykfordeling og forebyggelse af tryksår, med mulighed for at sidde i stolen over en længere periode uden problemer.

## + ERGONOMISK DESIGN DER PASSER TIL KROPPEN

Hængslingspunkter ved ryg og knæ er tilpasset kroppen og tillader brugeren at bevæge sig så naturligt som muligt. Forhindrer smerte og skade over tid.

## + NETTI SEATING SOLUTION GIVER STABILITET OG KOMFORT

Nettis unikke puder har alle en fremragende trykfordeling med mulighed for ekstra fokus på mikroklima med temperaturstabiliserende egenskaber, som sikrer en tør og sund hud. Sammen med den robuste ramme tillader dette brugeren at sidde i stolen over en længere periode.

## + TRYKFORDELING GIVER LINDRING

Puder af høj kvalitet med omfattende trykfordeling. Understøttet af rammens design.

## + BRUGERVENLIG

Gælder for justeringer af alle stolens egenskaber: Puder, benstøtter o.s.v. Visuelt og funktionelt norsk design som er let tilgængelig for hjælper og bruger. Brugeren har bedre mulighed for variation. Let forflytning.

## + ANDRE FORDELE

- 5 års garanti på ramme
- Let at transportere
- Egen produktion sikrer høj kvalitet i alle detaljer
- Tilpassede individuelle løsninger



## OPTIMAL SIDDEKOMFORT

Optimal siddekomfort opnås ved at anvende de 7 Netti principper for god siddekomfort. Disse 7 principper er væsentlige elementer for en god siddestilling. Hvis blot ét af disse principper ignoreres, kan der opstå potentielle problemer for brugeren.

### DE 7 NETTI PRINCIPPER FOR GOD SIDDEKOMFORT



1) STABILITET FOR BÆKKENET



5) STØTTE FOR FØDDERNE



2) TRYKFORDELING OG MIKROKLIMA




6) STØTTE FOR ARMENE



3) LÆNDESTØTTE



7) VARIATION

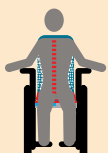

4) SIDESTØTTE

> Læs mere på [My-Netti.dk](https://my-netti.dk)

# STABILISERENDE OG TRYKFORDELENDE



## **Netti** Uno Back

Enkeltlags skumpude med integreret sidestøtte. Nem tilpasning i højden.



## **Netti** Smart

Rigtig god trykfordeling og sideføring. Optiske Designelementer der forenkler positionering.



## **Netti** Stabil

En rygpude som ligner Netti Smart men med længere sideføring. Til brugere med ustabil holdning.



## **Netti** Super Stabil

Til brugere med særligt behov for sidestøtte. Som Stabil-puden men med stærkere sidestøtte.



## **Netti** Kyphotic

Specialudviklet flerlags-rygpude til brugere med kyfrose.



## **Netti** Uno Seat

Flerlags sædepude med god trykfordeling.



## **Netti** Sit

Flerlags sædepude med integreret sidestøtte, vandtæt mellemlag og god trykfordeling.



## **Netti** Contour

Pudens anatomiske udformning giver øget støtte og stabiliserer brugeren.



## **VITAL BASE** Bondi Coxit

Ideel til at gå stolen frem.



## **Netti** Dry

Hygienisk Easy Care betræk som passer til alle puder.



## **VITAL BASE** Royal

Temperaturstabil anti-dekubitus pude til store brugere (65 - 70 cm).



## **VITAL BASE** Venti


Åndbar Anti-dekubitus pude som sikrer et godt mikroklima.

# OPTIMAL SIDDEKOMFORT

## DE 7 NETTI PRINCIPPER

Her får du en oversigt over, hvilke ting der er vigtige og et indblik i, hvordan du løser eventuelle udfordringer indenfor det enkelte punkt. Der er ingen siddestilling, som i længden er god. Vi har behov for at være i bevægelse, også når vi sidder. En god siddestilling giver den bedste forudsætning for aktivitet. Det er vigtigt, at man tilpasser rullestolen ud fra brugerens behov for at være i aktivitet samtidig med at den giver mulighed for hvile/afslapning.

### 1) STABILITET FOR BÆKKENET

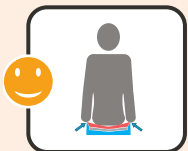

- Siddeenhedens base bør sammen med puden sikre stabilitet for bækkenet.
- Stabilisering i siderne og foran ischii tuberositas (siddeknuderne) ved hjælp af stabiliserende siddepude.
- Tilbehør i form af komfortpads, abduktionsbælte og abduktionsklods kan være med til at sikre stabiliteten.

### 2) TRYKFORDELING OG MIKROKLIMA




- Trykfordeling opnås ved at fordele vægten over så stor en flade som muligt uden at gå på kompromis med stabiliteten.
- Ventilerende betræk og temperaturregulende stof sikrer et godt mikroklima, som er med til at styrke huden og det underliggende vævs modstanddygtighed mod ydre påvirkninger, og derved forebygge tryksår.

### 3) LÆNDESTØTTE



- Det er vigtigt at kørestolens ryggenhed giver plads til bagen for at give korrekt lændestøtte.
- Flexibilitet i højde og dybde er vigtig, da lumbalens form varierer fra person til person.
- Der skal gives støtte til toppen af sacrum. Dette sikres igennem ryggradens udformning i kombination med stropsystemet i ryggen.

### 4) SIDESTØTTE

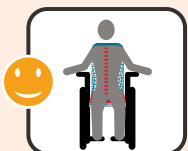

- Nedsat kropsstabilitet kræver større og mere stabile siddestøtter.
- For meget støtte virker til gengæld hæmmende for brugeren.
- For at fungere optimalt kræver det at bækkenet er stabilt.

### 5) STØTTE FOR FØDDERNE



- Højden og positioneringen for fodstøtten påvirker direkte siddestillingen og trykfordelingen.
- Vigtigt med benstøtter der kan justeres så der sikres stabilitet af overkroppen.

### 6) STØTTE FOR ARMENE



- Over tid bliver ryggradens muskler slidte. Korrekt tilpassede armlæn vil hjælpe brugeren til at rette sig op, bevare stilling og balance.

### 7) VARIATION




- At sidde i samme stilling er meget belastende for kroppen og man risikerer at brugeren falder sammen i en uhensigtsmæssig stilling.
- Kørestolen bør give brugeren mulighed for at ændre stilling og derved gennem aflaste muskelgrupperne og fordele trykket.
- Når man bruger tiltfunktionen, er det vigtigt at have en funktionel hovedstøtte, som er indstillet i korrekt højde, vinkel og dybde. Dette forebygger uhensigtsmæssige siddestillinger.
- Rette valg af siddesystem og tilbehør sikrer desuden at brugeren ikke over tid f.eks. skrider frem i sædet eller falder forover.

# ÆGTE STABILITET FOR ØGET AKTIVITET

Netti tilbyder et forbedret siddesystem, som understøtter de 7 Netti principper for god siddekomfort. Netti puderne komplimenterer mange af de funktioner, som er i Netti kørestolene. Tilsammen udgør de en optimal løsning med flerpunktsstabilisering af bækkenet, giver mulighed for optimal bevægelighed af overkroppen og en rigtig god trykfordelende løsning. Alle vores siddepuder er designet til brugere, som sidder i stolen i mange timer pr. dag og har en konstruktion, som sikrer, at man ikke "sidder igennem" puden.

Den ergonomisk udformede rygpude kan indstilles trinløst i højden. Det giver optimal stabilitet og hovedkontrol, som er særlig vigtigt, når man sidder i lang tid. Netti rygpuden giver god bevægelsesfrihed ved aktivitet.

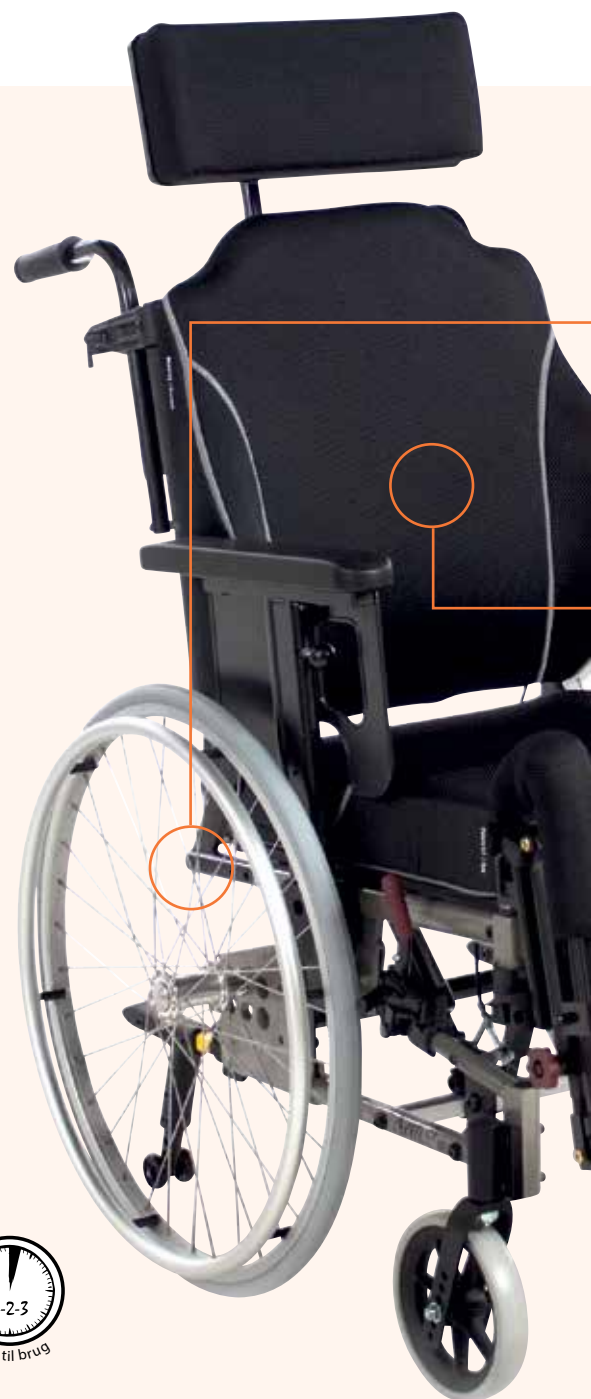

## FÆLLESNÆVNERE FOR NETTI PUDER:

### + DOKUMENTATION

Alle vore sidde- og rygpuder er testet og godkendt i henhold til EN 1021-2:2014.

### + MATERIALET I PUDERNE/OPBYGNING

I sidde- og rygpuderne har vi benyttet forskellige typer af polyuretan skum - PU. På grund af sin tredimensionelle struktur, er PU elastisk og vil altid genvinde sin oprindelige facon. I tillæg har PU gode ventilerende egenskaber og denne kombination af egenskaber er ideel for at opnå god siddekomfort.

### + VEDLIGEHOLD AF TEKSTILER

Yderbetrækkene er aftagelige og kan maskinvaskes ved 60° C. De tåler centrifugering og kan tørretromles ved maks. 85° C.



Maskinvask

### + KLAR TIL BRUG

Der er ikke behov for tilpasning, justering eller pumpning. Vi har allerede gjort arbejdet og tilpasset pudens egenskaber for at opnå bedst mulig trykfordeling. Siddepudernes tykkelse er på 8 cm og gør det komfortabelt at sidde - selv efter flere timer.



Klar til brug



## TEKSTILER

### 3D

Ventilerende, elastisk og slidstærkt 3D struktur. Giver god mikroklima med øget ventilation og reduktion af varmeopbygningen, hvilket styrker huden og det underliggende vævs modstandsdygtighed mod ydre og indre påvirkninger som tryk og støtte. 100 % Polyester.




### °C

Temperaturstabil, ventilerende, elastisk og slidstærkt. Temperaturstabiliserende tekstil monteret under 3D betrækket. Dette er et tekstil som stabiliseres ved 32 °C, hvilket vil sige at det afgiver og isolerer varme, når temperaturen kommer over/under denne grænse. Hensigten med °C-betrækket er at udsætte og reducere hudens og vævets ophedningsproces.

### PRO TEX

Elastisk semipermeabelt beskyttende stof mellem skum og 3D yderbetræk. Betrækket er åndbart samtidig med at det er vandtæt. Slidstærkt og enkelt at rengøre. Polyester og PU.

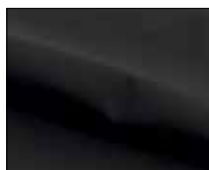

### EASY CARE

Slidstærkt, åndbart, elastisk, nemt at rengøre og hygiejnisk. Polyester og PU.

### CLIMATHERM™

Temperaturstabil, elastisk og slidstærkt betræk med ventilerende egenskaber for bedre mikroklima. Fugtigheden transporteres bort fra brugeren.



### 3D COLOUR

Rygpuderne til Netti Mini tilbydes i en flot sort-røde farvekombination.

## STOLENS KONSTRUKTION UNDERSTØTTER PUDERNE

### DEN OPTIMALE SIDDESTILLING LIGGER I DETALJEN

Hos vores designere går ergonomi og tekniske løsninger hånd i hånd. Ryghænslet og dets placering er en af hemmelighederne bag komforten. Udformningen og placeringen er helt unik for Netti kørestolen. Løsningen sikrer at brugeren ikke glider fremad, når ryggen lægges bagover. Sammen med benstøtterne forebygger det, at brugeren udsættes for dårlig siddestilling, shearing og tryksår.

### GOD STØTTE TIL OVERKROPPE


Kørestolens velcroyg forstærker rygpudens understøttelse af overkroppen. Når stolen tilpasses brugeren, justeres stropryggen med 6 lukninger, så den får den facon, som understøtter brugerens lændesvaj og rygkrumning bedst muligt. Den trinløse justering af rygpudens højde gør tilpasningen let og giver mulighed for optimal, individuel tilpasning.

### INTELLIGENTE BENSTØTTER

Automatisk benlængdejustering sikrer optimal trykfordeling – også når siddestillingen varieres.

### STABIL SIDDESTILLING



Netti III kan leveres med en Comfort sædeplade, som understøtter siddepudens trykafastende effekt og giver øget indsynkning og stabilisering af bækkenet. Det ovale hul i sædepladen tillader, sammen med puden, siddekuderne at synke ned i puden. Herved stabiliseres siddestillingen og tendensen til at glide frem i sædet forebygges.

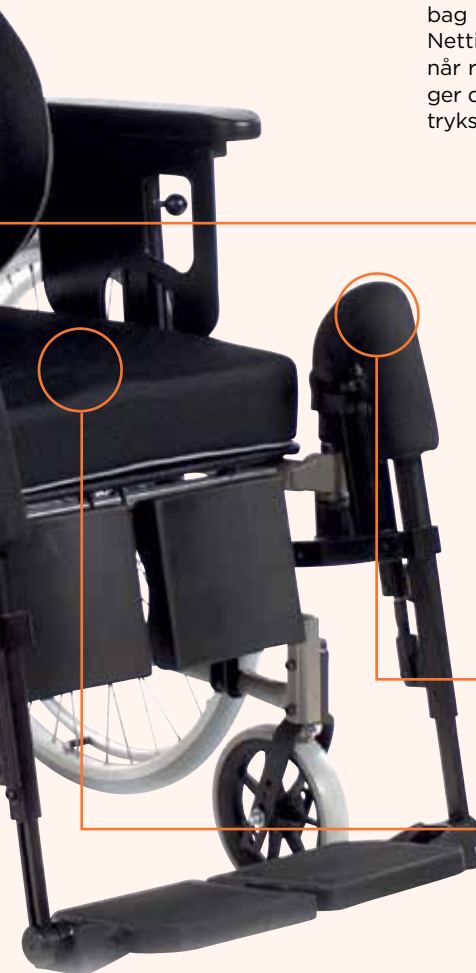

# Netti<sup>®</sup> Sit




- Altid klar til brug!
- Gode trykfordelende og stabiliserende egenskaber
- Tilpasset den enkelte bruger allerede ved levering  
- ingen nødvendig tilpasning og justering
- Leveres med vandtæt men åndbart mellembeleg, som beskytter skumpuden
- Skummets egenskaber er tilpasset pudens størrelse  
- og dermed brugerens vægt
- Ventilerende 3D, rengøringsvenligt Easy Care eller temperaturstabiliserende °C beleg

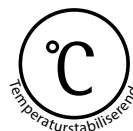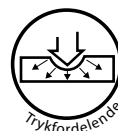

Toplaget er skåret i tern for at reducere overfladespænding og sikre at brugeren synker hurtigt ned i puden, så tryk hurtigt fordeles.

Fremglidning i sædet modvirkes, ved at bruge blødere skum i bagenden af mellemlaget.

Indbygget abduktion forbedrer siddestillingen.

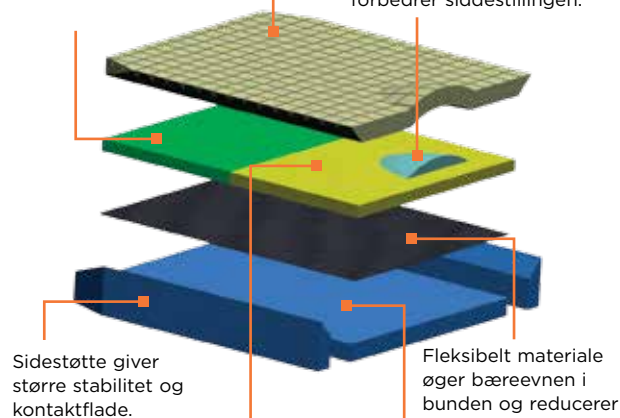

Fastere skum i front- og midterlag, stabiliserer i forkant af siddekuderne og lårene.

Høj bæreevne i bunden forhindrer gennemsidning og øger stabiliteten.

Størrelse (BxD)	3D		EASYCARE		°C	
	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.
25x30	187301	187201	188301	188201	189301	189201
30x35	187302	187202	188302	188202	189302	189202
35x40	187303	187203	188303	188203	189303	189203
35x45	187304	187204	188304	188204	189304	189204
35x50	187305	187205	188305	188205	189305	189205
38x40	187306	187206	188306	188206	189306	189206
38x45	187307	187207	188307	188207	189307	189207
38x50	187308	187208	188308	188208	189308	189208
40x40	187309	187209	188309	188209	189309	189209
40x45	187310	187210	188310	188210	189310	189210
40x50	187311	187211	188311	188211	189311	189211
40x55	187333	187233	188333	188233	189333	189233
43x40	187312	187212	188312	188212	189312	189212
43x45	187313	187213	188313	188213	189313	189213
43x50	187314	187214	188314	188214	189314	189214
45x40	187315	187215	188315	188215	189315	189215
45x45	187316	187216	188316	188216	189316	189216
45x50	187317	187217	188317	188217	189317	189217
45x55	187318	187218	188318	188218	189318	189218
50x45	187319	187219	188319	188219	189319	189219
50x50	187320	187220	188320	188220	189320	189220
50x55	187321	187221	188321	188221	189321	189221
55x50	187322	187222	188322	188222	189322	189222
55x55	187323	187223	188323	188223	189323	189223
60x50	187324	187224	188324	188224	189324	189224
60x55	187325	187225	188325	188225	189325	189225
65x50	187326	187226	188326	188226	189326	189226
70x50	187328	187228	188328	188228	189328	189228
75x50	187330	187230	188330	188230	189330	189230

# Netti® Uno Seat



- Altid klar til brug!
- Tilpasset den enkelte bruger allerede ved levering - ingen nødvendig tilpasning og justering
- Skummets hårdhed er tilpasset pudens størrelse - og dermed brugerens vægt
- Ventilerende 3D eller rengøringsvenligt Easy Care betræk




Sædebredde  
35-60 cm



Sædedybde  
40-50 cm




Højde  
8 cm

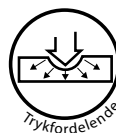

Blødt skum i toplaget sikrer hurtig nedsenkning i puden og at trykket hurtigt fordeles.

Fastere skum i front- og midterlag stabiliserer i forkant af siddeknuderne.

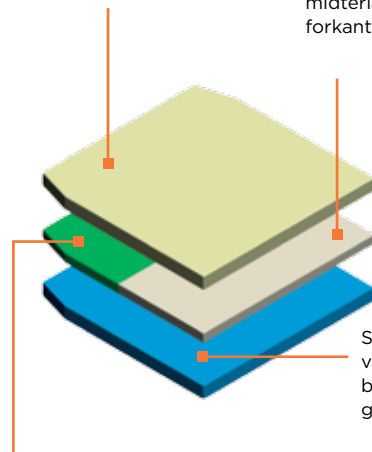

Skum med højere vægtfylde i bunden forhindrer gennemsidning.

Fremglidning i sædet modvirkes ved at bruge blødere skum i bagenden af mellemlaget

Størrelse (BxD)	3D		EASYCARE	
	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.
35x40	171805	172205	172005	172105
35x45	171806	172206	172006	172106
35x50	171807	172207	172007	172107
38x40	171808			
38x45	171809	172209	172009	172109
38x50	171810	172210	172010	172110
40x40	171812	172212	172012	172112
40x45	171813	172213	172013	172113
40x50	171814	172214	172014	172114
43x45	171817	172217	172017	172117
43x50	171818	172218	172018	172118
45x45	171821	172221	172021	172121
45x50	171822	172222	172022	172122
45x55	171823	172223	172023	172123
50x40	171824			
50x45	171825	172225	172025	172125
50x50	171826	172226	172026	172126
55x50	171829	172229	172029	172129
60x50	171833	172233	172033	172133

VITAL BASE

# VENTI



- Maksimal ventilation
- Dokumenterede trykfordelende egenskaber
- Lav vægt
- Altid klar til brug



Størrelse (BxD)	3D	
	Pude komplet	Ekstra Betræk
35x40	Nr. 141305	*
35x45	Nr. 141306	*
40x40	Nr. 141312	*
40x45	Nr. 141313	*
40x50	Nr. 141314	*
45x45	Nr. 141321	*
45x50	Nr. 141322	*
50x50	Nr. 141326	*


\* Leveringstid ca. 2-4 uger.

VITAL BASE

# ROYAL



- Temperaturstabil yderbetræk
- Dokumenterede trykfordelende og stabiliserende egenskaber
- Leveres med vandtæt men åndbart mellembetræk, som beskytter skumpuden
- Altid klar til brug

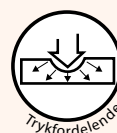


Størrelse (BxD)	CLIMATERM	
	Pude komplet	Ekstra Betræk
65x55	Nr. 100236*	*
70x55	Nr. 100237*	*

\* Leveringstid ca. 2-4 uger.

# Netti<sup>®</sup> Contour



- Altid klar til brug!
- Gode tryksårsforebyggende egenskaber som tager højde for både trykfordeling og mikroklima.
- Puden er designet, så den følger kroppen og dermed giver ekstra god stabilitet og støtte for brugere, som sidder i stolen i lang tid ad gangen.
- Tilpasset den enkelte bruger allerede ved levering  
- ingen nødvendig tilpasning og justering
- Skummets hårdhed er tilpasset pudens størrelse  
- og dermed brugerens vægt
- 3D ventilerende betræk
- Puderne har en friktionsdug kombineret med velcro på undersiden, som gør den kompatibel med alle eksisterende kørestolsmodeller på markedet.

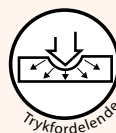


3D Pude komplet	
Størrelse (BxD)	Nr.
35x35	197301
40x40	197302
40x45	197303
43x40	197304
43x45	197305
45x40	197306
45x45	197307
45x50	197308
50x45	197309
50x50	197310
55x45	197311
55x50	197312

VITAL BASE<sup>®</sup>

# BONDI COXIT



- Til brugere med stiv hofte
- Til brugere, som ønsker at gå stolen frem med det ene ben
- Dokumenterede trykfordelende og stabiliserende egenskaber

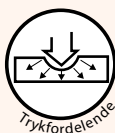

Størrelse (BxD)	Nr.	Størrelse (BxD)	Nr.
35x40 R	151627	43x45 R	151611
35x40 L	151628	43x45 L	151612
35x45 R	151629	43x50 R	151613
35x45 L	151630	43x50 L	151614
35x50 R	151631	45x45 R	151615
35x50 L	151632	45x45 L	151616
38x45 R	151601	45x50 R	151617
38x45 L	151602	45x50 L	151618
38x50 R	151603	50x45 R	151619
38x50 L	151604	50x45 L	151620
40x40 R	151605	50x50 R	151621
40x40 L	151606	50x50 L	151622
40x45 R	151607	55x55 R	151623
40x45 L	151608	55x55 L	151624
40x50 R	151609	60x55 R	151625
40x50 L	151610	60x55 L	151626



- Inkontinensbetræk
- Hygiejnisk Easy Care stof
- Passer til alle typer siddepuder
- Bevarer pudens trykfordelende og ventilerende egenskaber
- Altid klar til brug!



Størrelse (BxD)	Nr.	Størrelse (BxD)	Nr.
25x30	3463	43x45	3470
30x35	3462	43x50	3471
35x40	3479	45x45	3481
35x45	3484	45x50	3485
35x50	3473	45x55	3491
38x40	3465	50x45	3482
38x45	3466	50x50	3486
38x50	3467	50x55	3492
40x40	3477	55x50	3496
40x45	3480	55x55	3487
40x50	3483	60x50	3498
		60x55	3488



## EGENSKABER FOR NETTI RYGPUDERNE

- (+) Blødt skum sikrer god indsynkning og trykfordeling
- (+) Unikt design sikrer bevægelsesfrihed for skuldrene
- (+) Lave sidestøtter sikrer bevægelsesfrihed for arme
- (+) 3D ventilerende betræk eller rengøringsvenligt Easy Care
- (+) God plads til hofterne giver stabil siddestilling
- (+) 10, 12, 17 cm sidestøtte afhængig af pude
- (+) Ergonomisk udformet og korrekt placeret lændestøtte for øget stabilitet i overkroppen



Bagpå er der to flip-over tekstiler med velcro, som fastholder puden, så den ikke ændrer position. Den giver stolen et flot lukket udseende bagtil med indbygget lomme for opbevaring. Den nederste flip kan desuden foldes ned, så man undgår luft mellem ryg- og siddepude.



På bagsiden af ryggen er der et målesystem med 6 halvmåner, som er med til at sikre at puden placeres lige og er let at placere korrekt for hjælper, når puden har været ude af stolen f.eks. til vask.





Har du allerede en 50 cm Netti pude, kan du nøjes med at købe et 60 cm betræk og rygforlængere. Det gør overdragelse til nye brugere let og økonomisk. Netti Smart, NettiStabil og NettiSuper Stabil tilbydes med 60 cm rygghøjde.


# Netti<sup>®</sup> Kyphotic



- Klar til brug
- Til brugere med krum rygsøjle
- Giver støtte langs rygsøjlen
- Brugen af flere forskellige lag skum gør at brugeren lettere synker ind i puden
- Lav lændestøtte
- Højdejusterbar
- Pudens giver sammen med stolens velcro-ryg brugeren mulighed for at sidde mere ret op. Det gør det lettere at spise, giver bedre respiration og generelt bedre mulighed for at være aktiv og deltage i sociale aktiviteter.
- Ryghøjde 50 cm (kan laves i andre højder efter ønske)

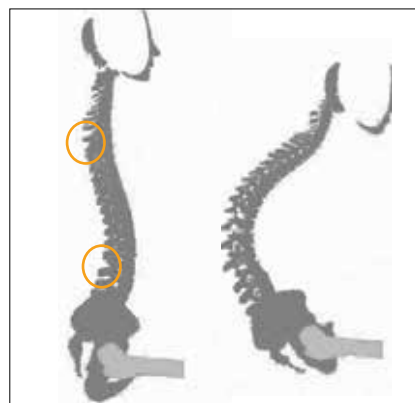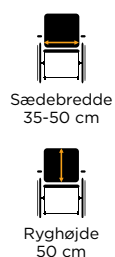


- + Ergonomisk design som følger kyfosens krumning. Pudens har en centerudskæring som yder maximal trykafledning for spinal krumning.
- + Lav lateral støtte med ventilerende 3D betræk, som sikrer komfort og god bevægelsesfrihed for skuldre og arme.
- + Højdejusterbar
- + Unikt design som sikrer bevægelsesfrihed for skuldre.
- + Flerlags-kerne af skum (PU) med tryk-lindrende egenskaber.
- + MARS-betræk med enestående ventilering og elastiske egenskaber. Betrækkets elasticitet sikrer at brugeren kan synke ind i pudens og nyde fordel af de gode trykfordelende egenskaber.
- + Designet til at yde støtte til den nederste del af rygsøjlen og dens krumning


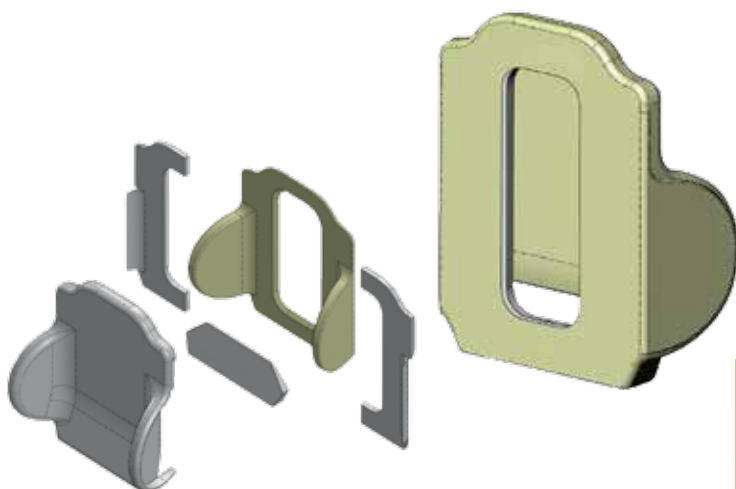


Størrelse (BxD)	Pude komplet		Ekstra Betræk	
	Nr.	Størrelse (BxD)	Nr.	
35 cm	206301	35 cm	206201	
40 cm	206302	40 cm	206202	
45 cm	206303	45 cm	206203	
50 cm	206304	50 cm	206204	

# Netti® Uno Back

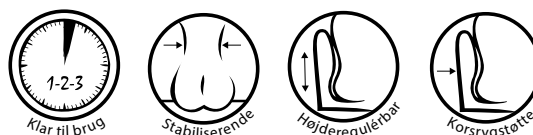


- Altid klar til brug!
- God og fast rygpude med lændestøtte
- 10 cm sidestøtte
- Kan tilpasses individuelt, fæstnes med velcrobånd og tilpasses trinløst i højden
- Ryghøjde 50 cm
- Ventilerende 3D eller rengøringsvenligt Easy Care betræk

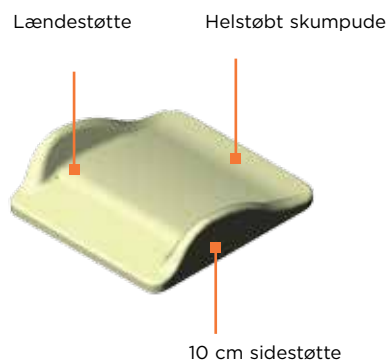
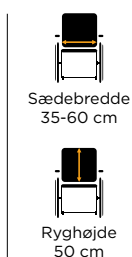


Størrelse (BxD)	3D		EASYCARE	
	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.
35x50	344701	344801	344901	345001
40x50	344702	344802	344902	345002
45x50	344703	344803	344903	345003
50x50	344704	344804	344904	345004
55x50	344705	344805	344905	345005
60x50	344706	344806	344906	345005



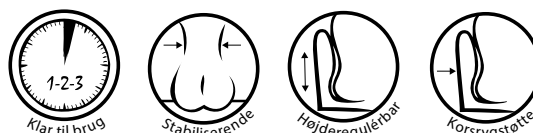



- Altid klar til brug!
- For brugere med behov for god komfort
- Flere skumlag for bedre komfort
- Ergonomisk lændestøtte
- 12 cm sidestøtte
- Kan tilpasses individuelt trinløst i højde
- Ryghøjde 50 eller 60 cm
- Ryghøjde 40 cm til Netti Mini (fås både i sort og sort/rød)
- God plads til bagen
- Ventilering 3D eller rengøringsvenligt Easy Care betræk

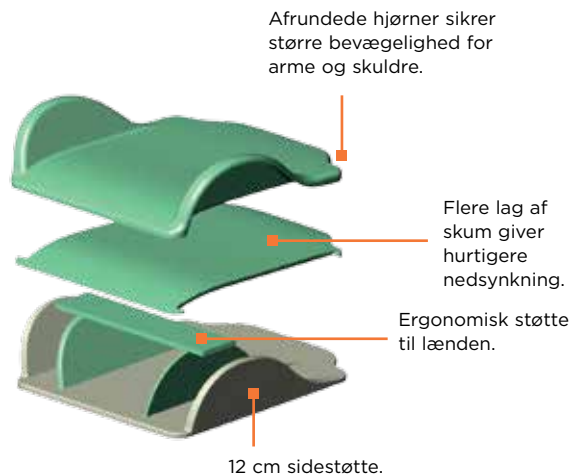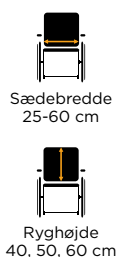


Størrelse (BxD)	3D		EASYCARE	
	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.
25x40 colour	355301	355201	-	-
30x40 colour	355302	355202	-	-
35x40 colour	355303	355203	-	-
25x40	357301	357201	-	-
30x40	357302	357202	-	-
35x40	357303	357203	-	-
35x50	357304	357204	358304	358204
38x50	357305	357205	358305	358205
40x50	357306	357206	358306	358206
43x50	357307	357207	358307	358207
45x50	357308	357208	358308	358208
50x50	357309	357209	358309	358209
55x50	357310	357210	358310	358210
60x50	357311	357211	358311	358211
35x60	357320	357220	358320	358220
38x60	357321	357221	358321	358221
40x60	357322	357222	358322	358222
43x60	357323	357223	358323	358223
45x60	357324	357224	358324	358224
50x60	357325	357225	358325	358225
55x60	357326	357226	358326	358226
60x60	357327	357227	358327	358227



# Netti® Stabil

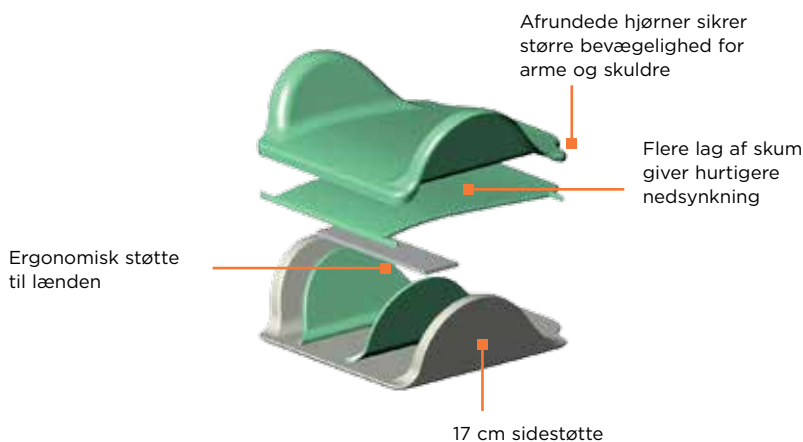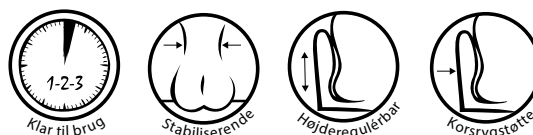

- Gode muligheder for individuel tilpasning
- Giver øget komfort og velvære
- Flere lag skum giver øget indsynkning
- God lændestøtte
- 17 cm forstærket sidestøtte som giver øget stabilitet
- God i kombination med sidestøtte
- Tilpasses individuelt trinløst i højden
- Ryghøjde 50 cm eller 60 cm
- Ryghøjde 40 cm til Netti Mini (fås både i sort og sort/rød)
- Ventilerende 3D eller rengøringsvenligt Easy Care betræk

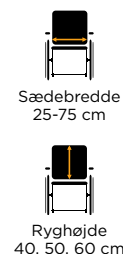



Størrelse (BxD)	3D		EASYCARE	
	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.
25x40 colour	365301	365201	-	-
30x40 colour	365302	365202	-	-
35x40 colour	365303	365203	-	-
25x40	367301	367201	-	-
30x40	367302	367202	-	-
35x40	367303	367203	-	-
35x50	367304	367204	368304	368204
38x50	367305	367205	368305	368205
40x50	367306	367206	368306	368206
43x50	367307	367207	368307	368207
45x50	367308	367208	368308	368208
50x50	367309	367209	368309	368209
55x50	367310	367210	368310	368210
60x50	367311	367211	368311	368211
65x50	367312	367212	-	-
70x50	367313	367213	-	-
75x50	367314	367214	-	-
35x60	367320	367220	368320	368220
38x60	367321	367221	368321	368221
40x60	367322	367222	368322	368222
43x60	367323	367223	368323	368223
45x60	367324	367224	368324	368224
50x60	367325	367225	368325	368225
55x60	367326	367226	368326	368226
60x60	367327	367227	368327	368227
65x60	367328	367228	-	-
70x60	367329	367229	-	-
75x60	367330	367230	-	-



# Netti® Super Stabil



- Altid klar til brug!
- Giver øget komfort og stabilitet
- Flere skumlag - øget indsykning
- 17 cm sidestøtte for øget stabilitet
- God i kombination med sidestøtte
- Tilpasses individuelt trinløst i højde
- Ryghøjde 50 eller 60 cm
- Leveres med to pads som giver mulighed for justering af lændestøtte, sidestøtte og tilpasning til lettere skoliose
- Ventilerende 3D eller rengøringsvenligt Easy Care betræk

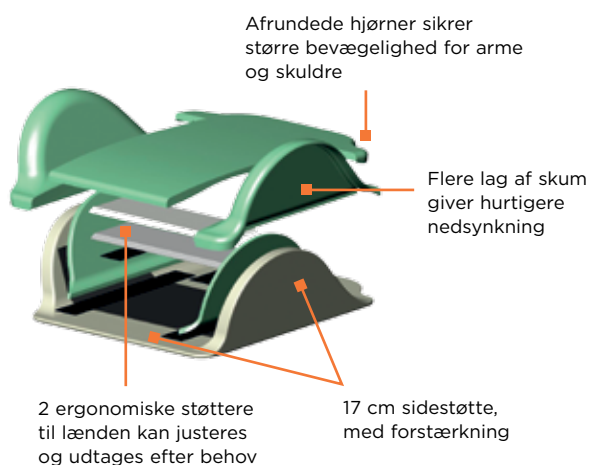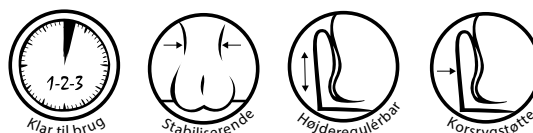

Størrelse (BxD)	3D		EASYCARE	
	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.	Pude komplet Nr.	Ekstra Betræk Nr.
35x50 cm	377301	377201	378301	378201
38x50 cm	377302	377202	378302	378202
40x50 cm	377303	377203	378303	378203
43x50 cm	377304	377204	378304	378204
45x50 cm	377305	377205	378305	378205
50x50 cm	377306	377206	378306	378206
55x50 cm	377307	377207	378307	378207
60x50 cm	377308	377208	378308	378208
65x50 cm	377309	377209	378309	378209
70x50 cm	377310	377210	378310	378210
75x50 cm	377311	377211	378311	378211
35x60 cm	377320	377220	378320	378220
38x60 cm	377321	377221	378321	378221
40x60 cm	377322	377222	378322	378222
43x60 cm	377323	377223	378323	378223
45x60 cm	377324	377224	378324	378224
50x60 cm	377325	377225	378325	378225
55x60 cm	377326	377226	378326	378226
60x60 cm	377327	377227	378327	378227
65x60 cm	377328	377228	378328	378228
70x60 cm	377329	377229	378329	378229
75x60 cm	377330	377230	378330	378230





Netti Seating System  
video

# NORSK DESIGN FOR OPTIMAL KOMFORT

Netti kørestole er fleksible - opbygget efter det modulære princip og med så mange indstillingsmuligheder, at der findes en god løsning for alle. Det kræver både et godt design samt stor viden om sygdomme og fysiske udfordringer at designe komfortkørestole. Af samme grund udvikler vi alle kørestole og tilbehør i tæt samarbejde med eksperter og brugere. Altid med fokus på at forbedre livet for den enkelte bruger. Det er vores bidrag til øget livsglæde!

2018-02

**Netti**<sup>®</sup>  
BY ALU REHAB

Alu Rehab ApS  
Kløftehøj 8  
8680 Ry  
info@My-Netti.com

T: 87 88 73 00  
F: 87 88 73 19

My-Netti.dk