

Invacare Optislings



Optimal komfort til enhver løftesituation



Invacare Sejl

Optimal tilpasning

Invacare Optislings sejlprogrammet er designet til at give trygge, sikre og komfortable forflytninger for brugeren. Vores sejlprogram rummer et bredt udvalg af sejlmodeller. Det brede sortiment giver mulighed for en god tilpasning til præcis den løftesituation du står i - hvad enten det er til brugere med behov for lidt eller meget støtte i forflytningen.


I forbindelse med udviklingen af sejlprogrammet, har vores team af eksperter og terapeuter haft fokus på at sikre, at sejlene er intuitive at håndtere. Det intuitive design gør sejlene enkle at lægge på for personalet. Det betyder, at personalet kan føle sig trygge og samtidig spare tid i deres daglige arbejde med forflytningerne.

Sejlene findes i 15 forskellige modeller, i op til 6 størrelser og i 3 forskellige materialevarianter. Det brede sortiment sikrer, at du altid kan finde det sejl, der passer til forflytningssituationen.



4

FORDELE

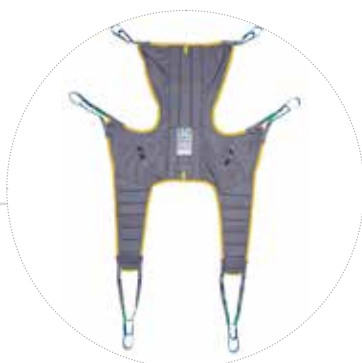

◀ Optimal tilpasning

- ▶ Det rette løftesejl til både bruger og forflytningssituation.
- ▶ Et bredt sortiment: 15 sejlmodeller, 6 størrelser og 3 forskellige materialer.
- ▶ Gennemtænkt design sikrer optimal pasform.
- ▶ Alle sejl har tydeligt markerede sejlstropper for enkel anvendelse og tilpasning til den enkelte borger.

Brugervenligt og sikkert ▶

- ▶ Tydelig label bag på sejlet, der angiver hvordan det lægges på.
- ▶ Sejlene er mærket med QR kode, der giver hurtig adgang til videoinstruktioner.
- ▶ Certificeret og miljøgodkendt Comfort In Situ siddesejl (sit-on sejl) i brandsikkert materiale.



◀ Optimeret komfort

- ▶ Soft-touch materiale.
- ▶ Polstret ryg og benstropper for optimal vægtdistribution.
- ▶ Polstring ved det sensitive område omkring armhuler.

Enkel sejlpålægning ▶


- ▶ Lomme på sejlts bagside giver styr på sejlet og sikrer, at det sidder rigtigt.
- ▶ Tydelige midtermarkeringer sikrer, at sejlet sidder helt lige.
- ▶ Farvede løftestropper giver let kommunikation og gør sejlpålægningen enklere og minimerer risikoen for fejl.



Vælg det rigtige sejl

Et vigtigt formål med sejlet er, at det skal give den nødvendige støtte under forflytningen. Invacare Optislings er designet til at understøtte de områder med reduceret kropskontrol og muskeltonus. De vigtigste områder er ben, bækken, overkrop og hoved. Nedenfor kan du se hvilket sejl, der passer til hvilket funktionsniveau.

Vurdering af kropskontrol ▼

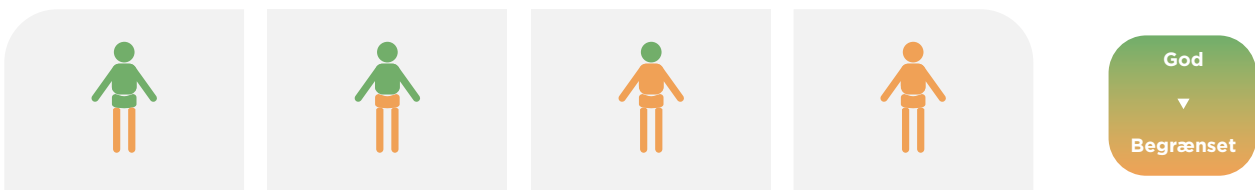

Invacare sejl med optimal kropsstøtte ▼

God ▼	Medium ▼	Dårlig med hovedkontrol ▼	Dårlig uden hovedkontrol ▼	Skala
	Universal Low	Universal Standard	Universal High	Universal Standard
		Amputee	Universal High Plus	Kan bruges*
		Easy-Fit		Bedste match
		Comfort Standard		
		Comfort In Situ		
			Comfort High	
Dress Toileting Low				
Dress Toileting High				
Light Transfer Support				
Gangvest				
	Gangvest med benstroppe			
Stand Assist				
	Transfer Stand Assist			


*Kan bruges
Det er vigtigt at tage hensyn til brugerens funktionsniveau og tage hensyn til, at de fleste bliver mere immobile over tid.

Vælg den rigtige størrelse

Hoftebredde og ryghøjde måles i den siddende stilling og er de to vigtigste mål i forhold til at finde den rigtige størrelse på sejl. For sejl med bæltter er livvidden ligeledes vigtig.

Brugerens vægt anvendes til angivelse af, om sejlets SWL (Safe Working Load) er korrekt.

Du kan finde mere information om sejl, størrelser og mål i vores målguide.

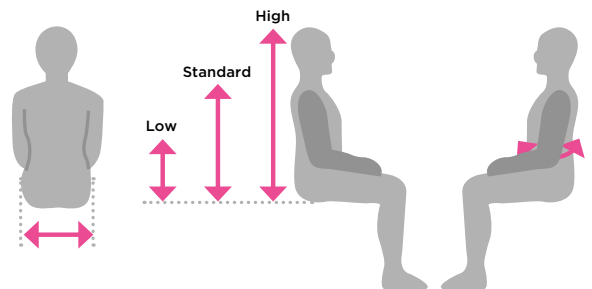

► Størrelse	XS	S	M	L	XL	XXL
► SWL (tilladt vægtbelastning)	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg

Invacare sejl til de fleste forflytninger

Universal sejl

All-round sejl, der kan anvendes til de fleste forflytninger



◀ Universal Low

- Understøtter nedre del af ryggen.
- Sejlet kræver, at brugeren har nogen funktion i kroppen og fuld hovedkontrol.
- Bruges til forflytning fra siddende til siddende.



◀ Universal Standard

- Støtter hele kroppen til og med skuldrene.
- Anvendes til brugere med god hovedkontrol.
- Kan anvendes til forflytninger fra siddende til siddende.



◀ Universal High

- Understøtter hele kroppen inkl. hovedet.
- Bruger sidder i en let tilbagelænet stilling.
- Understøtter hele kroppen og anvendes ved manglende hovedkontrol.
- Anvendes ved liggende forflytninger og ved forflytninger fra gulv.



◀ Universal High Plus

- Samme egenskaber som Universal High, men tillader at bruger kan have armene udenfor sejlet, hvilket giver mere bevægelighed.

Sejl med mindre åbninger

Til amputerede og andre brugere, som har behov for en mindre åbning, for ikke at falde igennem sejlet.



◀ Amputee

- Understøtter lår og torso.
- Anvendes til brugere med enkelt eller dobbeltsidet amputation og hovedkontrol.
- Bruger sidder let tilbagelænet.
- Bruges til forflytninger fra siddende til siddende eller siddende til liggende.



◀ Easy-Fit

- Understøtter hele kroppen og hovedet.
- Anvendes til brugere med manglende hoved- og kropskontrol.
- Easy-Fit er med sine delte benstøtter lettere at lægge på.
- Giver et komfortabelt løft, hvor bruger sidder oprejst i sejlet.

Sejl med større åbninger

Relativ stor åbning med henblik på anvendelse ved toilette, samt for enklere sejl pålægning.



◀ Dress Toileting Low

- Toiletsejl, der anvendes til brugere med god hoved- og kropskontrol.
- Med bælte, der støtter rundt om livet og giver forbedret sikkerhed.
- Bruges til siddende forflytninger.



◀ Dress Toileting High

- Samme egenskaber som Dress Toileting Low, men er udstyret med nakkestøtte og anvendes til brugere uden hovedkontrol.

Comfort sejl

Sejl med udelte benstøtter til brugere med smerter eller tynd hud. Kan også anvendes, hvor brugeren er amputeret over knæet.



◀ Comfort Standard

- Comfortsejl uden hovedstøtte.
- Anvendes til brugere med god hovedkontrol.




◀ Comfort High

- Comfortsejl med hovedstøtte.
- Anvendes til brugere uden hovedkontrol.



◀ Comfort In Situ (Sit-on sejl)

- Samme egenskaber som Comfort Standard.
- Anvendes til brugere, hvor sejlet ikke kan fjernes i kørestolen.
- Fremstillet af miljøvenlige materialer.
- Fremstillet af godkendt brandsikkert materiale i alle 3 materialetyper - Net, Spacer og Solid.

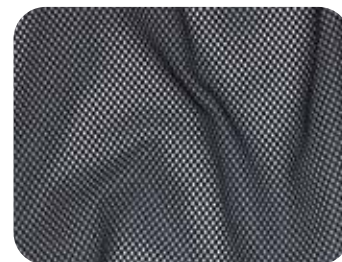

Løftebånd

Anvendes til supporterende løft, hvor der for eksempel er behov for at løfte en arm eller et ben.



◀ Løftebånd

- Universale løftebånd, der kan anvendes til forflytninger af for eksempel ben eller bruges til at holde en arm ved udskiftning af forbindelse og lignende.

Gangvest

Anvendes til gangtræning. Let at tage af og på med klikspænde.



◀ Gangvest

- Anvendes til gangtræning, hvor brugeren har ståfunktion med reduceret balanceevne.
- Solidt klikspænde og mulighed for at montere benstropper, der fås som tilbehør.

Sejl til stålift



◀ Stand Assist

- Kan anvendes til de fleste stålift på markedet med mulighed for montering af sejlet med løkker.
- Solidt polstret for god støtte og komfort.
- Non-slip på ryggen, der modvirker, at sejlet glider op ad ryggen.



◀ Transfer Stand Assist

- Sædesejl med samme egenskaber som Stand Assist. Sejl med polstret ryg og benstropper, der anvendes til stålift, hvor bruger ikke har ståfunktion.

Tilbehør ▼



Forlængerstrop

- ▲ Kan anvendes til alle sejl og forlænger. Kan anvendes til alle sejl som forlængelse af standardløftestropper. Fås i længder på 20 eller 30 cm.




Markeringsmærker

- ▲ Monteres på løftestroppen og markerer, hvilke stropper, der normalt anvendes til den pågældende bruger. Leveres i sæt af 4 stk.



Målskema

Sejl med delte benstøtter

Universal sejl		XS	S	M	L	XL	XXL
Universal Low	A	820	850	920	950	970	
	B	700	800	935	1075	1140	
	C	280	350	375	405	405	
	D	365	410	480	575	730	
Universal Standard	A	965	1000	1085	1180	1240	
	B	800	915	1050	1095	1240	
	C	405	510	560	585	590	
	D	365	410	480	555	720	
Universal High	A	1040	1080	1425	1555	1600	1650
	B	740	845	1000	1120	1190	1285
	C	615	770	900	1000	1000	1000
	D	310	350	375	450	570	600
Universal High Plus	A	1335	1385	1510	1580	1590	
	B	500	570	660	740	850	
	C	705	880	935	970	970	
	D	305	345	455	565	630	


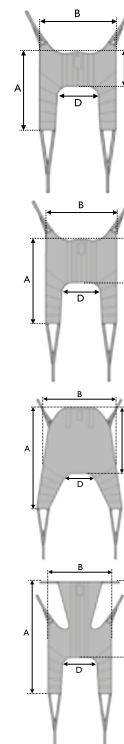


Sejl med lille åbning		XS	S	M	L	XL
Amputee	A	1060	1100	1160	1360	1510
	B	815	930	970	1230	1360
	C	390	490	520	570	600
	D	285	320	355	410	500
Easy-Fit	A	1105	1130	1200	1270	1360
	B	710	760	800	860	950
	C	590	630	675	720	760
	D	150	185	235	245	255
	E	170	180	190	210	210
	F	120	150	195	215	225

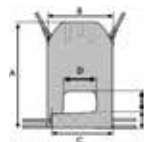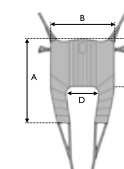


Sejl med stor åbning		XS	S	M	L	XL
Dress Toileting Low	A	840	870	950	1020	1100
	B	620	710	800	900	1080
	C	160	200	230	230	270
	D	380	430	495	600	760
Dress Toileting High	E	400	400	465	465	465

Samme mål som Dress Toileting Low og "E"

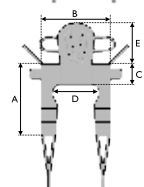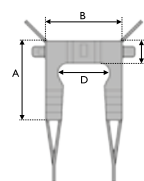


Sejl med udelte benstøtter

Comfort		XS	S	M	L	XL	XXL
Comfort Standard & Comfort in Situ	A	870	960	1020	1160	1170	1200
	B	970	1050	1170	1290	1330	1395
	C	505	550	610	675	745	820
	D	940	1000	1050	1110	1275	1340
Comfort High	A	1040	1150	1395	1445	1460	
	B	970	1050	1170	1290	1330	
	C	510	550	610	675	745	
	D	960	1020	1160	1280	1470	

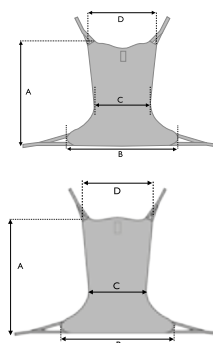


Gangvest

		XS	S	M	L	XL
Gangvest	A	150	150	180	180	180
	B	750	850	950	1050	1200
Benstropper	C	-	850	-	950	-
	D	-	850	-	350	-

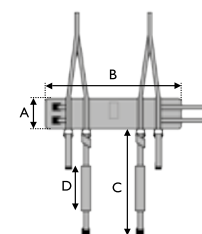

Løftebånd


		S	L
Løftebånd	A	930	1120
	B	120	120

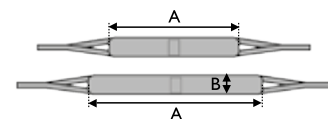

Sejl til stålift

		XS	S	M	L	XL
Stand Assist	A	260	260	330	360	360
	B	840	840	895	950	1020
	C	900	950	1170	1270	1810
Transfer Stand Assist	D	-	965	1060	1160	1260

Samme mål som Stand Assist + mål D

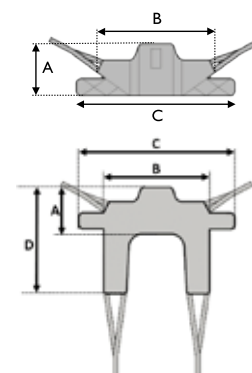

► Størrelse	XS	S	M	L	XL	XXL
► Max. brugervægt	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	250 kg	300 kg

Størrelser og materialer ▼


▼ Sejltype	▼ Model	▼ Størrelse						▼ Materiale		
		XS	S	M	L	XL	XXL	Solid	Net	Spacer
Universal	Universal Low	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Universal Standard	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Universal High	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●	●	●
	Universal High Plus	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
Amputation	Amputee	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Easy Fit	◆	◆	◆	◆	◆		●		●
Toiletsejl	Dress Toileting Low	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Dress Toileting High	◆	◆	◆	◆	◆		●		
Uden delte benstøtter	Comfort Standard	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Comfort High	◆	◆	◆	◆	◆		●	●	●
	Comfort In Situ	◆	◆	◆	◆	◆	◆	●🔥	●🔥	●🔥
Løftebånd	Light Transfer Support		◆		◆			●		
Gangvest	Gangvest	◆	◆	◆	◆	◆		●		
Sejl til stålift	Stand Assist	◆	◆	◆	◆	◆		●		
	Transfer Stand Assist		◆	◆	◆	◆		●		

Materialer ▼



Polyester - Solid

▲ Et let glidende materiale, der gør sejlet let at lægge på og samtidig er stærkt og holdbart. Er standard på alle modeller af sejl.

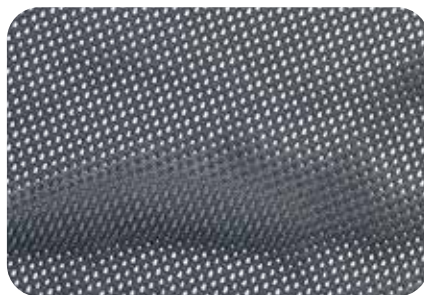

Polyester - Net

▲ Netmateriale, der særligt egner sig til badning, da det leder vandet væk fra brugeren og tørrer hurtigt efter brug.



Spacer

▲ Åndbart og strækbart materiale, der egner sig til brugere, der bliver siddende på løftesejlet. Tillader at brugeren synker ned i siddepuden.

Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.



Max brugervægt ▼

Invacare Sling

XS, S, M, L = 200 kg
XL = 250 kg
XXL = 300 kg



Max. vasketemperatur ▼

90° C



Blegning ▼

Tåler ikke blegning



Tørretumbling ▼

Lav temperatur

Løftesejl skal passe til den enkelte brugers behov og underkastes en kontrol af komfort og sikkerhed før ibrugtagning.

Løftesejlene skal ligeledes risikovurderes sammen med den personlifter de anvendes med, hvis denne er af andet fabrikat.

Tlf.: +45 36 90 00 00
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Søndre Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark



Yes, you can.®