



## PRODUKTARK

# Cobi Sky positioneringsmadras

## - til de svære positioneringer

**Cobi Sky positioneringsmadras er udviklet til at sikre stor trykfordeling, stabilitet, komfort og fuld understøttelse.**

Cobi Sky positioneringsmadras bruges på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen til svækkede brugere med neurologiske symptomer, stærke smerter eller ustabile frakturer med brug for dyb og trykaflastende lejring.

Brugervægt fra 30-110 kg.



- Modellerbar madras til mikropositionering.
- Let at installere, ingen pumpe.
- Tryksårsforebyggende og -aflastende.
- Skumramme, der sikrer stabilitet.
- Strækbart og åndbart inkontinensbetræk.
- Perforeret midterlag, der sikrer optimal ventilation.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



## Cobi Sky positioneringsmadras

### Konstruktion - madras

Cobi Sky er en helmadras med flere lag. Det øverste lag (under de to betræk) består af et betræk bestående af små Krøyer-kugler. Betrækket er syet i kanaler, hvilket gør, at indholdet i hver enkel kanal kan skubbes rundt. Det betyder, at madrassen kan formes præcist til den lejring som bruger har behov for.

Bruger synker med andre ord ned i madrassen, hvilket sikrer optimal støtte og trykafledning, samtidig med at det mindsker risikoen for tryksår.


Under laget med kanaler og Krøyer-kugler er der et fjedrende midterlag med perforeringer, der sørger for optimal ventilation af madrassen.

### Anvendelse

#### Skub fyldet rundt

Cobi Sky imødekommer tryksårsudfordringer uden at gå på kompromis med stabiliteten.


Det skyldes blandt andet madrassens opbygning med kanaler, der kan skubbes rundt. På den måde kan madrassen formes præcist til de behov som bruger har.

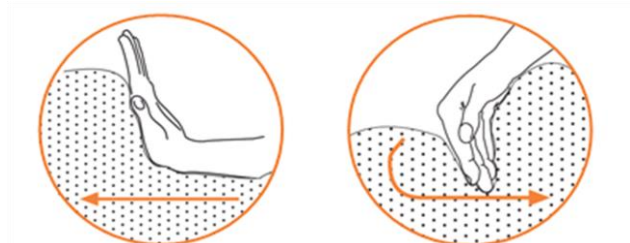

#### Positionering med fordybning

I tilfælde af allerede eksisterende liggesår kan der etableres en fordybning ved at skubbe rundt på kuglefyldningen. Lav en hul med hånden under det punkt, hvor trykket skal aflastes.

Hullet kan efterfølgende glattes ud igen, når der ikke længere er behov for aflastning af fx hæl.

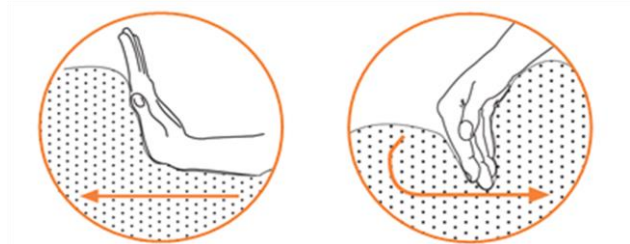

En skumramme rundt om og under de to lag sikrer stabilitet, når brugeren sidder på kanten af sengen.

### Betræk

Det grå yderbetræk til skummadrassen er et inkontinensbetræk, som er strækbart, åndbart og vaskbart. Det grå betræk dækker hele madrassen og lynes med lynlås.

Yderbetrækket sidder løst, hvilket tillader plejepersonale at skubbe og forme fyldet i madrassen uden at betrækkets stramhed ophæver fyldets placering og funktion.

Det hvide inderbetræk er et ultratyndt, fleksibelt og strækbart lycrabetræk.

### Rengøring og vedligeholdelse

Daglig rengøring af den heldækkende yderbetræk kan ske med vand, rengøringsmiddel og en tør, ren klud til aftørring. Yderbetrækket kan også desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt 1000-1200ppm.

Det grå yderbetræk kan vaskes med i vaskemaskine ved 60° og tørres i tørretumbler ved lav varme eller hænges til tørre, hvis muligt. Betrækket må ikke stryges.

Det hvide inderbetræk har en levetid på 8 vaske. Inderbetrækket vaskes i en vaskepose i vaskemaskine på 60° C. Inderbetrækket må ikke tørres i tørretumbler, men skal hænges op.

### Transport

Cobi Sky er udstyret med fire bærehåndtag. To på hver side. Hold i bærehåndtagene ved flytning eller transport. Cobi Sky må ligge rullet sammen i kortere perioder. Sammenrulningsrem medfølger.

Kontakt Cobi Rehab på [cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk) eller 7025 2522, hvis du ønsker mere information, undervisning, produktfremvisning eller gratis afprøvning af ét eller flere hjælpemidler.

| Specifikationer  |   |
|--|---|
| Brugervægt   | 30-110 kg   |
| Længde   | 2000 mm   |
| Bredde   | 850 mm  |
| Højde  | 150 mm  |
| Madrassens vægt  | 13 kg   |
| Anvendelig direkte på (indstillelig) sengebund   | Ja  |
| Brandhæmmende madras   | Ja  |
| Inkontinensbetræk  | Ja  |
| Allervernligt vask- og desinficerbart betræk   | Ja  |
| Brandhæmmende yderbetræk   | Ja  |
| Beregnet til sårkategori   | 1-4   |
| Yderbetræk gråt  | 44% polyamid, 56% polyuretan                                    |
| Madras   | Polyamid stof, ekspanderet polystyren kugler og polyester fibre |
| Skummadras ramme   | Polyuretanskum, polyesterfibre                                  |
| ISO-klassifikation   | 04 33 06-05   |
| Forventet levetid  | 5 år  |
| Produktark findes på website, hvor det kan skaleres op til stor størrelse ved synshandicap |   |
| Generelle krav og prøvningsmetoder i henhold til   | DS/EN12182:2012   |
| Grundlæggende UDI -DI  | 5740000108669   |
| Risikoklasse   | I   |

| Model                                  | Længde  | Bredde | Højde  | Varenummer   | HMI-nummer |
|--|---------|--------|--------|--------------|------------|
| Cobi Sky madras inkl. gråt yderbetræk  | 2000 mm | 850 mm | 150 mm | 2100-085-200 | 125288     |
| <b>Reservedele</b>                     |         |        |        |              |            |
| Gråt top- og bundbetræk (lynet sammen) |         |        |        | 2100-999-010 |            |
| Skummadras med fiberlag                |         |        |        | Kontakt      |            |
| Krøyer-kugler madrasdel                |         |        |        | Cobi Rehab   |            |
| Hvidt inderbetræk                      |         |        |        | på telefon   |            |
| Aftageligt han-del spænde              |         |        |        | 7025 2522    |            |



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

---



**FABRIKANT OG FORHANDLER**

**Cobi Rehab**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522  
[cobirehab.com](http://cobirehab.com)