



Molift Raiser Pro

Den ergonomiske forflytningsplatform til aktiv forflytning

 **etac**[®]



Molift Raiser Pro

Forflytningsplatformen Molift Raiser Pro er udformet til at give brugeren en aktiv og sikker forflytning samt de bedst mulige forudsætninger for et ergonomisk arbejdsmiljø for hjælperen.

Det naturlige bevægelsesmønster

Molift Raiser Pro giver brugeren mulighed for at udnytte egen muskel-funktion og evne under oprejsning og ved bevægelse. Det naturlige bevægelsesmønster er stimuleret og giver brugeren sikkerhed i hele bevægelsen. Molift Raiser Pro er enkel at forstå og bruge.

Forflytning i små rum

Molift Raiser Pro er meget stabil og kan dreje om sin egen akse, hvilket gør den meget nem at manøvrere. Den er ideel i små rum, f.eks. til toilet. Molift Raiser Pro sikrer en sikker, aktiv og stående støtte under korte forflytninger mellem seng og kørestol, samt bade- og toiletstol.

Fungerer i alle sundhedsmiljøer

Molift Raiser Pro hjælper brugere med at træne og rehabilitere i alle sundhedsmiljøer. Mobilisering kan begynde tidligt - også i intensivafdelingen. Brugeren kan i første omgang forbedre balancen, når han/hun sidder og står op. Molift Raiser Pro giver altid sikker støtte.



Scan koden for at se præsentationsvideo



Fordele




Ergonomisk håndtag

Håndtaget i formstøbt plast føles blødt og varmt, og er udformet så både bruger og hjælper kan holde der hvor det passer bedst.




Centralbremse

Fodbremsen låser begge hjul samtidig. Det lukkede bremsesystem sikrer bedre bremsefunktion og udelukker snavs. Når bremsen aktiveres, kan man høre en tydelig klik-lyd.

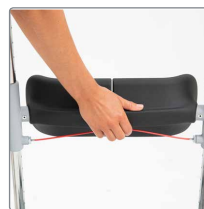

Underbenstøtten højdereguleres med kun én hånd

Den polstrede benstøtte er en to-delt pude med en blød og hygiejnisk polstring, der giver god og behagelig støtte for brugeren. Den er nem at justere i højden med én hånd.

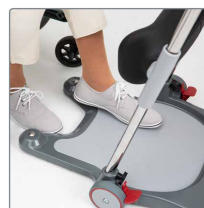

Lav indstigningshøjde

Den vinklede kant og indstigningshøjde på kun 35 mm gør det nemt at få fødderne op på fodpladen. Fodpladen er udført i formstøbt aluminium og har en skridsikker overflade.



Tilbehør



Molift Soft Handles Bløde oprejsningshåndtag

Anvendes som forlængerstrope hvis brugeren har svært ved at nå håndtaget på Molift Raiser.



Molift Raiser Strap+ Oprejsningsstøtte (tryghedsbånd) med glidemuffe

Oprejsningsstøtte med glidemuffe giver støtte omkring lænd eller hofter og skaber tryghed for brugeren ved både én eller to hjælpere.



Molift Raiser Strap Oprejsningsstøtte (tryghedsbånd)

Giver støtte omkring lænd eller hofter og skaber tryghed for brugeren. Glidemuffe kan tilkøbes. Denne anbefales hvis der er usikkerhed om hvorvidt brugeren har brug for ekstra hjælp og støtte under forflytningen.



Molift Raiser Belt Oprejsningsstøtte (tryghedsbånd)

Molift Raiser Belt er en videreudvikling af Raiser Strap+ og består af tryghedsbånd og et bælte med spænde. Bæltet hjælper den som assisterer en bruger ved oprejsning til stående stilling. Raiser Belt er stabilt og sidder sikkert på plads, når det fastspændes.

Bestilling

| Beskrivelse | HMI-nr. | Varenr. |
|---|---------|-----------------------|
| Molift Raiser Pro | 115155 | 16090204 |
| Oprejsningshåndtag Molift Soft Handles, 2 stk | - | 82511 |
| Tryghedsbånd Molift Raiser Strap S/M | 71253 | 82508 |
| Tryghedsbånd Molift Raiser Strap L/XL | 71254 | 82509 |
| Glidemuffe | - | 82537 |
| Tryghedsbånd Molift Raiser Strap+ S/M | 71255 | 82528 (82508 + 82537) |
| Tryghedsbånd Molift Raiser Strap+ L/XL | 71256 | 82529 (82509 + 82537) |
| Tryghedsbånd Molift Raiser Belt S/M | 105001 | 82964 (82508 + 82963) |
| Tryghedsbånd Molift Raiser Belt L/XL | 105002 | 82965 (82509 + 82963) |

Mål og vægt Molift Raiser Pro

| | |
|-----------------------|---------|
| Højde | 1200 mm |
| Dybde | 630 mm |
| Bredde | 540 mm |
| Vægt total | 10,7 kg |
| Vægt fodplade | 5,4 kg |
| Vægt håndtag | 5,3 kg |
| Max. brugervægt (SWL) | 170 kg |

Materiale Molift Raiser Pro

Pulverlakeret aluminium, plastik og stål.

Vaskeinstruktioner Molift Raiser Pro



Rengør /desinficer produktet ved brug af PH neutralt rengøringsmiddel PH 5-9, eller med et 70% desinficeringsmiddel. Kan også vaskes/desinficeres i en maskine ved 70° i 10 minutter.



Vaskeinstruktioner Tilbehør

Vask i maskine 80 °C. Lav temperatur i tørretumbler max. 50 °C





Version 1 - 2019 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

“Alle mennesker bør have muligheden for at leve et frit og uafhængigt liv,
at kunne forfølge deres drømme, uanset fysiske forudsætninger.”

For seneste nyheder og løbende produktopdateringer - besøg www.etac.dk

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

etac[®]
Skaber muligheder