

# Foldbar badestol

## Montage- og brugervejledning for 302010



Fabrikant:

**MOBILEX A/S**  
Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark

www.mobilex.dk

## 1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

### Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for støtte og siddemulighed i forbindelse med bad. .

Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

### Mobilex A/S

Grønlandsvej 5  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex.dk

## 2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag
- Produktet må ikke anvendes til at stå på.

## 3. Beskrivelse


### Produktbeskrivelse

Den foldbare toiletstol har alle de normale funktioner som en standard badestol, og er specielt udviklet til enkel og pladsbesparende transport og opmagasinering. Den er designet til brugere der har brug for siddestøtte under bad. Produktet er fremstillet af aluminium og er derfor korrosionsbestandig. Der skal ikke anvendes værktøj til samling.

### Montagebeskrivelse

#### a) Opstilling af stolen

1. Drej siderne (A) og (B) fremad, således at der er 90 graders vinkel mellem dem og bagsiden.
2. Placer røret fra siddeenheden (C) ind i beslagene (D), således at samlingen er stabil og låst.

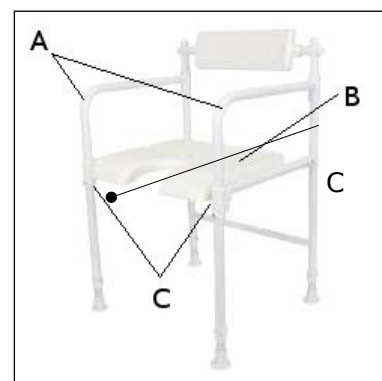

## b) Justering af siddehøjden (benenes længde)

Siddehøjden skal justeres til brugeren. Siddehøjden er korrekt, når brugeren sidder på stolen og begge fødder rører gulvet samtidig med at lårene er vandrette.

1. Træk låseclip'en (A) ud af stolens ben..
2. Juster den teleskopiske del af benet til den ønskede længde..
3. Skub clip'en (A) ind i hullet (B).
4. Gentag proceduren for de andre ben.



VIGTIGT! Juster ikke stolens højde, medens der sidder nogen på den.

## Transportbeskrivelse

Stolen kan let foldes for transport.

## Tilbehør


Den foldbare toiletstol har ikke noget tilbehør

## 4. Tekniske Data:

Foldbar badestol	Varenr 302010
Total højde	83 - 95 cm
Siddehøjde (justerbar i trin af 2,5 cm)	48 - 61 cm
Total bredde	53 cm
Total længde	50 cm
Vægt	6,4 kg
Max belastning	100 kg
Pakke dimensioner	60 x 16 x 82 cm (L x B x H)

## Produkt label

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af produktet

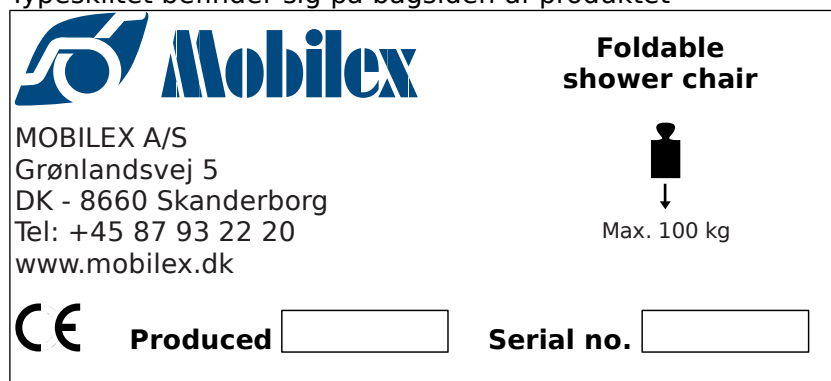

Billede af typeskiltet

## 5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

## 6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Badestolen er ikke stabil	Benene er justerede til forskellige længder	Juster alle benene til samme længde
Sædet er ikke vandret	Sædet er ikke låst korrekt i beslagene	Kontroller at sædet er placeret korrekt og låst til beslagene i siderammerne.

## 7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

## 8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktive ændringer på produktet uden vores skriftlige accept bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte.

Garantien omfatter ikke erstatning for manglende benyttelse under reparation, og der ydes ikke erstatning for skader der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

## 9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

### **Foldbar badestol 302010**

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinsk udstyr, Del I fra 14 Juni 1993**

Lars Nygaard  
Adm. Direktør  
Mobilex A/S

Skanderborg, den 12.02.2010



.....  
Underskrift