

Introducerer... vores nye tvillinger



275 kg

Simpel ændring

Fra 1 til 2 Luna
Fra 275 til 400 kg
på 5 minutter - uden
brug af værktøj.



Luna Twin
Bariatrisk løsning

400 kg

Luna Twin Simpel og innovativ

- **400 kg bariatrisk løsning:** Den samme Luna-model bruges både til standardløft og bariatrisk løft: 1 eller 2 enheder.
- **Fleksibelt design:** Hurtigt skift fra standard 275 kg til bariatrisk 400 kg løft på få minutter - uden brug af værktøj.
- **Udbudsvinder:** Valgt af Region Midtjylland til det største hospitalsbyggeri i Nordeuropa.
- **Omkostningsbesparelse for hospitaler:** En loftlift til alle løftebehov. Luna Twin giver stor fleksibilitet i dagligdagen.



(by) WinnCare Nordic

Ny Luna Twin

5 minutters installation - uden værktøj.




- ①
- Sæt den anden Luna Twin i skinnen.
 - Sænk en af stropperne ved hjælp af håndbetjeningen, så begge stropper er lige lange.
 - Isæt afstandsstykket mellem de to Luna-enheder.
 - Forbind de 2 Luna-enheder med dobbeltkablet.
 - Nulstil systemet ved at trykke "STOP" og derefter tryk og hold "R" i 5 sekunder.

- ②
- Sæt afstandspinden på stropperne. Juster strophøjden, hvis det er nødvendigt, med håndbetjeningen ved at trykke højre eller venstre

- ③
- Sæt løfteåget på med snaplås-systemet.

- &
- Vægtskala og ekstra løfteåg i siderne for store brugere, kan fås som tilbehør.

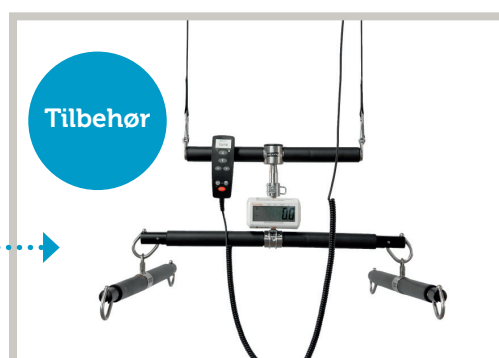



Rum til rum løsning er også mulig med Luna Twin løsningen. Bare kør Luna Twin gennem den unikke dørgennemføring fra Ergolet.



Luna Twin

Bariatrisk løsning

Tekniske specifikationer

Maks. vægt med 2 enheder	400 kg	Aluminiumchassis
Maks. vægt med 1 enhed	275 kg	Elektrisk og manuel nødnedfir
Længde på løftestrop	2200 mm	Elektrisk nødstop
Vægt på 1 enhed	6,7 kg uden løfteåg	Lav batteriindikator (vist i LED)
Støj uden og med maks. vægt	48dB (A) / 52dB (A)	Ladeindikator
Højde på vægtskala	117 mm	Strømindikator
Fuld opladningstid	5 timer	Overbelastningsbeskyttet
Tæthedsklasse	IPx4	Nødstopssystem



MDD93/42/EEC, Class I

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan variere i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne. Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



Bestil Luna Twin allerede i dag på
salg@ergolet.dk eller ring på +45 70 27 37 20



Ergolet er en global virksomhed, som er dedikeret til at levere en tryk og behagelig flytning af mennesker, som har brug for hjælp til at blive flyttet. Ergolet blev grundlagt i 1973 som en mekanisk designvirksomhed, men ændrede strategi i 1988 til kun at beskæftige sig med fremstilling af mobile hjælpemidler.