

Pro-care Auto Plus

Trykaflastende madras – med selvindstillende pumpe

Pro-care Auto Plus er en dynamisk trykaflastende helmadras med en lydsvag pumpe, som automatisk tilpaser sig patientens vægt og lejring. Madrassen består af støjsvage luftceller, som giver patienten ekstra støtte og komfort.



Udfordring: Tryksår er smertefulde - men de kan forebygges. Det kræver dog hyppige vendinger og forflytninger, som påvirker patientens velvære. Det er både tidskrævende og hårdt fysisk arbejde for plejepersonalet.

Opbygning

Madrassen består af 20 luftceller, der hver er 10 cm bredde. Alle celler kan udskiftes enkeltvis.

Brugertilpasset tryk

Madrassen indstiller automatisk trykket efter patientens vægt og lejring. Pumpen kører i en cyklus, som skiftevis øger og letter trykket. Pumpen kan også indstille trykket til statisk.

Hælfunktion

De nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der dannes O-tryk under hælene.

Flere cyklustider og terapiformer

Madrassen har variable cyklustider: 10, 15, 20 og 25 min, så patienten kan få ro om natten. Med de tre terapiformer: vekseltryk, lavt vekseltryk og konstant lavt tryk er madrassen ideel til alle brugere.

Autofirm-funktion

Funktionen Autofirm gør madrassen helt fast ved fx pleje og forflytninger. Autofirm slår automatisk fra efter 20 min.

Betræk til optimal hygiejne

Betrækket er vandtæt, strækbart og åndbart, og fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen.

Kontakt vores specialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om mulighederne, brugen og effekten af Pro-care Auto Plus.

Pro-care Auto Plus

Trykaflastende madras – med selvindstillende pumpe

Pro-care Auto Plus er en dynamisk trykaflastende madras, som automatisk tilpasser sig patientens vægt og lejring. Madrassen har en lydsvag pumpe som giver mere ro på stuen.



Bløde og støjsvage celler
De bløde TPU-luftceller giver øget komfort. De er tilmed meget støjsvage, så madrassen ikke støjer, når man bevæger sig i sengen.

Nem vedligeholdelse og reparation
Luftcellerne kan udskiftes individuelt, hvilket gør det lettere at vedligeholde og reparere madrassen.

Hælaflastning
Madrassens nederste 5 celler kan nemt kobles fra slangesystemet, så der laves O-tryk under hælene.

Automatisk tilpasning
Den automatiske pumpe indstiller selv trykket efter patientens vægt og lejring. Pumpen har flere cyklustider og forskellige terapiformer.

Lydsvag pumpe med nem betjening
Pumpen har et lavt støjniveau, som giver mere ro på stuen. Det intuitive betjeningspanel gør pumpen nem at bruge. Pumpen har desuden topbetjening, så det er let tilgængeligt for personalet.

Dynamisk luftmadras

Kliniske egenskaber

Optimal trykfordeling og trykaflastning med flere behandlingsvalg: vekseltryk, lavt vekseltryk og konstant lavt tryk. Reducerer varme og fugt. Indbygget hælfunktion. Tværgående luftceller yder maksimal stabilitet og komfort.

Pro-care Auto er ideel til bl.a.

Behandling af grad 1-4 trykskader, forebyggelse til højrisikobrugere, borgere og patienter der ikke kan/vil repositionere sig selv, smerteplagede, sensitive.

Pro-care Auto Plus fås i flere udgaver:

80x200 cm
Varenr.: MDYFN1000
HMI nr.: 128369

85x200 cm
Varenr.: MDYFN1001
HMI nr.: 128372

90x200 cm
Varenr.: MDYFN1002
HMI nr.: 128375

Brugervægt: 30-250 kg

Madrasvægt: 10 kg

Sammensætning: 20 støjsvage TPU-cellér

Betræk: PU inkontinensbetræk

Pumpevægt: 3,8 kg

Pumpemål: 20,5x34x13,5 cm

Indstillinger: 1:2 cyklus m. intervaller på 10, 15, 20 og 25 min

Rengøring: Madrassen tørres af i sæbevand og desinfektionsmidler. Pumpen desinficeres med gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en klud. Betrækket kan vaskes ved max 95 grader.