


## Pro-care Auto Plus Bariatric

# Selvindstillelig dynamisk tryk-aflastende bariatrisk helmadras

Trykaflastende helmadras Pro-care Auto Plus Bariatric består af 20 enkelte luftceller, der hver er 20 cm høje. Madrassen har en brugervægt op til 450 kg og kan anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2, 3 og 4.

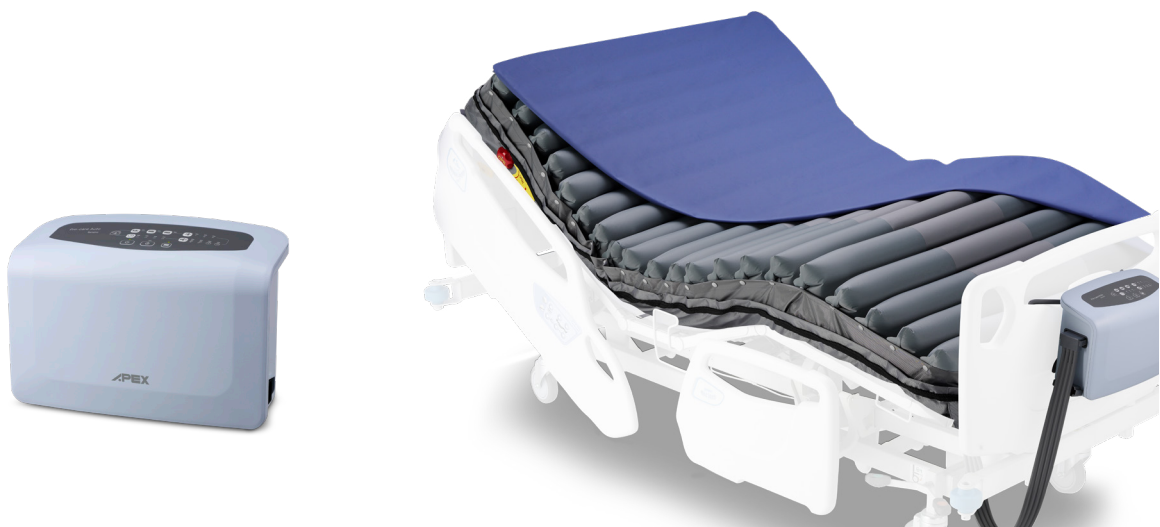

### **Automatisk brugertilpasset tryk**

Trykket i madrassen indstiller sig selv efter borgerens vægt og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne.

Trykket kan manuelt finjusteres. Pumpen er dynamisk/statisk, og der er mulighed for at indstille siddefunktion. Maxfirm-funktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. Maxfirm slår automatisk fra efter 20 minutter. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for service, går en alarm i gang.

### **Glat eller strækbart betræk**

Det åndbare og strækbare inkontinensbetræk leveres i to udgaver:

- Glat – forebygger shear og friktion.
- Strækbart – så det giver sig i forhold til bruger, og hjælper bruger til at ligge mere "fast" i sengen.

Betrækket fastgøres med lynlås på alle fire sider af madrassen og er semipermeabelt, så huden kan ånde.

### **Hælfunktion**

Madrassens nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der laves O-tryk under hælene. Der er kontraventiler i slangesystemet, så der skal ikke bruges propper, snore eller andet, for at frakoble cellerne. Madrassen har CPR-funktion.

### **Rengøring**

Madrassen rengøres med sæbevand. Både madras og pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

Kontakt vores specialister for at høre nærmere om vores produkter.

## Pro-care Auto Plus Bariatric

# Selvindstillelig dynamisk trykaflastende helmadras

Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved sårkategori 1, 2, 3 og 4.



### Fleksibel brug

Trykket i madrassen indstiller sig selv efter borgerens vægt og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidsinterval på 10 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne.

### Hælaflastning

Madrassens nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet, så der laves O-tryk under hælene.

### Betræk efter behov og anvendelse

Det åndbare og strækbare inkontinensbetræk leveres i to udgaver:

- Glat – forebygger shear og friktion.
- Strækbart – så det giver sig i forhold til bruger, og hjælper bruger til at ligge mere "fast" i sengen.

### Rengøring

Madrassen rengøres med sæbevand. Både madras og pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.

## Tekniske data

### Pumpe (inkl.)

3,8 kg | 34x13,5x20,5 cm

Cyklus tid: 10, 15, 20, 25 min.

Elektricitet AC230V

50/60 Hz, 0, 07A

### Egenskaber

- Serviceindikator
- Panellås
- Sensortechnologi
- Alarm til/fra

**107x200x20 cm**

HMI nr.: 134719

Varenr.: 70756

**122x200x20 cm**

HMI nr.: 134720

Varenr.: 70755

**Brugervægt:** 30-450 kg

**Sammensætning:** 20 cell-on-cell luftcelle

**Materiale:** Betræk: Nylon/PU, mørkeblåt/lyseblåt

Celler: Nylon/PU, gråt

Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt

**Funktion:** Integreret ledningsholder.

5 celler i hældelen kan afkobles med quickconnection

**Vedligeholdelse:** Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.