



Arion Easy-Off

Hjælp til aftagning af kompressionsstrømper

Vigtig information inden du begynder at bruge produktet:

- Hvis du har svært ved at nå dine tæer, kan du sætte din fod på en lav stol for at undgå at bøje dig for meget.
- Brug specielle skridsikre handsker, når du bruger produktet. Det giver dig maksimalt greb om strømpen, og reducerer den nødvendige fysiske styrke.



Instruktioner til aftagning:

- Skub Easy-Off over strømpen
- Fastgør velcrobåndet godt lige over anklen
- Fold reservematerialet så langt som muligt ned over velcrobåndet
- Fold strømpen så langt som muligt over Easy-Off
- Skub strømpen og Easy-Off over foden med små bevægelser, startende ved hælen



Fra

Se vores videoinstruktioner på uqr.to/OffDA

STØRRELSER

REF	Størrelse	Skostørrelse EU	Skostørrelse UK kvinder	Skostørrelse UK mænd	Skostørrelse US kvinder	Skostørrelse US mænd
E01510	Small	34 - 37	1 ¹ / ₂ - 4 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂ - 4	4 - 6 ¹ / ₂	3 - 5
E01511	Medium	38 - 41	5 - 7	4 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂	7 - 9	5 ¹ / ₂ - 7 ¹ / ₂
E01512	Large	42 - 45	7 ¹ / ₂ - 10	8 - 11	9 ¹ / ₂ - 11 ¹ / ₂	8 - 10

Se vores instruktionsvideo her: uqr.to/OffDA eller scan denne QR-kode:

Få mere information på www.slide-solutions.com



Easy-Off fra Arion Slide Solutions minimerer friktionsmodstanden mellem kompressionstøj og hud takket være produktets unikke glideegenskaber, der skyldes det specielle materiale, det er lavet af, og dets belægning. Den nedsatte friktion er især nyttig, når tøjet skubbes ned over hælområdet, som er dens bredeste del af foden.

EN NEM, SIKKER OG SIMPEL LØSNING

- Reducerer fysisk belastning for både kompressionsbærere og plejepersonale
- Kan bidrage til en længere levetid for tøjet, og til at opretholde den oprindelige kompression i længere tid ved at forhindre skader på fingre eller negle, og undgå overstrækning og forvrængning
- Fremmer uafhængighed hos kompressionsbærere og støtter behandlingen

SAMMENSÆTNING

- Produkt: Polyamid 92 %, polyurethan 3 %, silikone 2 %, polyester 3 %
- Emballage: Polyethylen med lav densitet (LDPE)



KONTRAINDIKATIONER

- Brug ikke produktet, hvis du er allergisk over for en af dets bestanddele (se sammensætningen).
- Åbne sår skal dækkes med en passende forbindelse, inden produktet bruges.

ADVARSLER

- **Kvælningsfare:** Hold produktet væk fra babyer, børn og kæledyr.
- **Snublefare:** Tråd ikke på produktet. Materialet er meget glat.
- **Kun til udvortes brug/beregnet til hudkontakt.** Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation.

VIGTIGT

- Læs brugsanvisningen nøje.
- Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din forhandler.
- Gem emballagen og brugsanvisningen, så længe du bruger produktet.
- Alle alvorlige hændelser, der opstår ved brug af produktet, skal rapporteres til producenten og den kompetente tilsynsmyndighed.
- Når du bruger produktet, er det vigtigt at finde den rigtige produktstørrelse. Brug af en forkert størrelse forhindrer produktet i at fungere korrekt, og det kan blive beskadiget eller blive slidt for hurtigt. Den korrekte størrelse bestemmes af brugerens skostørrelse.
- Brug kun produktet til en enkelt person. Hvis produktet skal bruges til mere end én person, skal produktet først desinficeres med en 70 % ethanolopløsning.

OPBEVARING

Opbevares væk fra direkte sollys eller andre varmekilder.

PLEJEANVISNINGER

- Vaskes i hånden ved maks. 30 °C/86°F.
- Må ikke bleges.
- Må ikke tørretumbles. Tør kun produktet med et håndklæde.
- Må ikke stryges.
- Må ikke renses.
- Kan desinficeres med en 70 % ethanolopløsning.

GARANTI

Dette produkt er garanteret i en periode på seks måneder fra købsdatoen mod mangler som følge af defekt materiale eller konstruktion. Inden for garantiperioden byttes produktet gratis i tilfælde af produktions- og/eller materialefejl. Enhver ombytning under garantien gennemføres kun, hvis det ved en købskvittering kan påvises, at datoen for indgivelsen af klagen falder inden for garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis manglen skyldes forkert brug af produktet eller anvendelse til flere patienter. For at udnytte denne service skal du kontakte din leverandør. Du bliver bedt om at returnere produktet vasket, og at følge plejeinstruktionerne.

ANBEFALINGER TIL BRUG

Producenten anbefaler, at produktet udskiftes seks måneder efter første brug, hvis det bruges regelmæssigt. Du kan skrive datoen for første brug på bagsiden af dette dokument.