

CAREPUR Lejringspuder – HALVCIRKELPUDE



CAREPUR Halvcirkelpude er et positioneringshjælpemiddel til krop, torso og ekstremiteter til både decubitusprofylakse og støtte til decubitusbehandling.

Halvcirkelpuden har mange anvendelsesmuligheder, og den primære er med patienten i liggende stilling, hvor puden placeres direkte under hoved, nakke, skuldre og arme, hvilket sikkert understøtter, positionerer og aflaster trykket i disse områder. Samtidig kan puden mærkes på begge sider af overkroppen, og det fremme selvbevidstheden.

Drejes puden 180° i rygliggende stilling fra den ovenfor beskrevne position og placeres midt under lårene, bliver balder og korsben aflastet, og knæregionen blødt lejret for at aflaste sener og ledbånd i underekstremiteterne. Denne placering gør det også muligt at få en let hævet armposition.

Puden kan også bruges med patienten liggende på siden. Den placeres direkte ved skulder-, ryg- og bækkenregionen, som skal støttes, samt mellem benene for at sikre abduktion i dette område.

Halvcirkelpuden kan også bruges ved en 135° sidestilling.


Når puden anvendes, flytter polystyrenkuglerne inden i puden sig pga. trykbelastningen og tilpasser sig derved patientens kropskontur.

Produktspecifikation:

- Pudefyldet består af 100% polystyrenkugler (EPS) med små granulater
- Puden skal desinficeres ved aftørring
- Betræk af bi-elastisk polyamidstof (45%) med en antibakteriel polyurethanbelægning (55%)
- Brandhæmmende – DIN EN ISO 12952 del 1+2
- Betrækket er uigennemtrængeligt for væsker, og er modstandsdygtig overfor blod og urin



CAREPUR Lejringspuder – HALVCIRKELPUDE

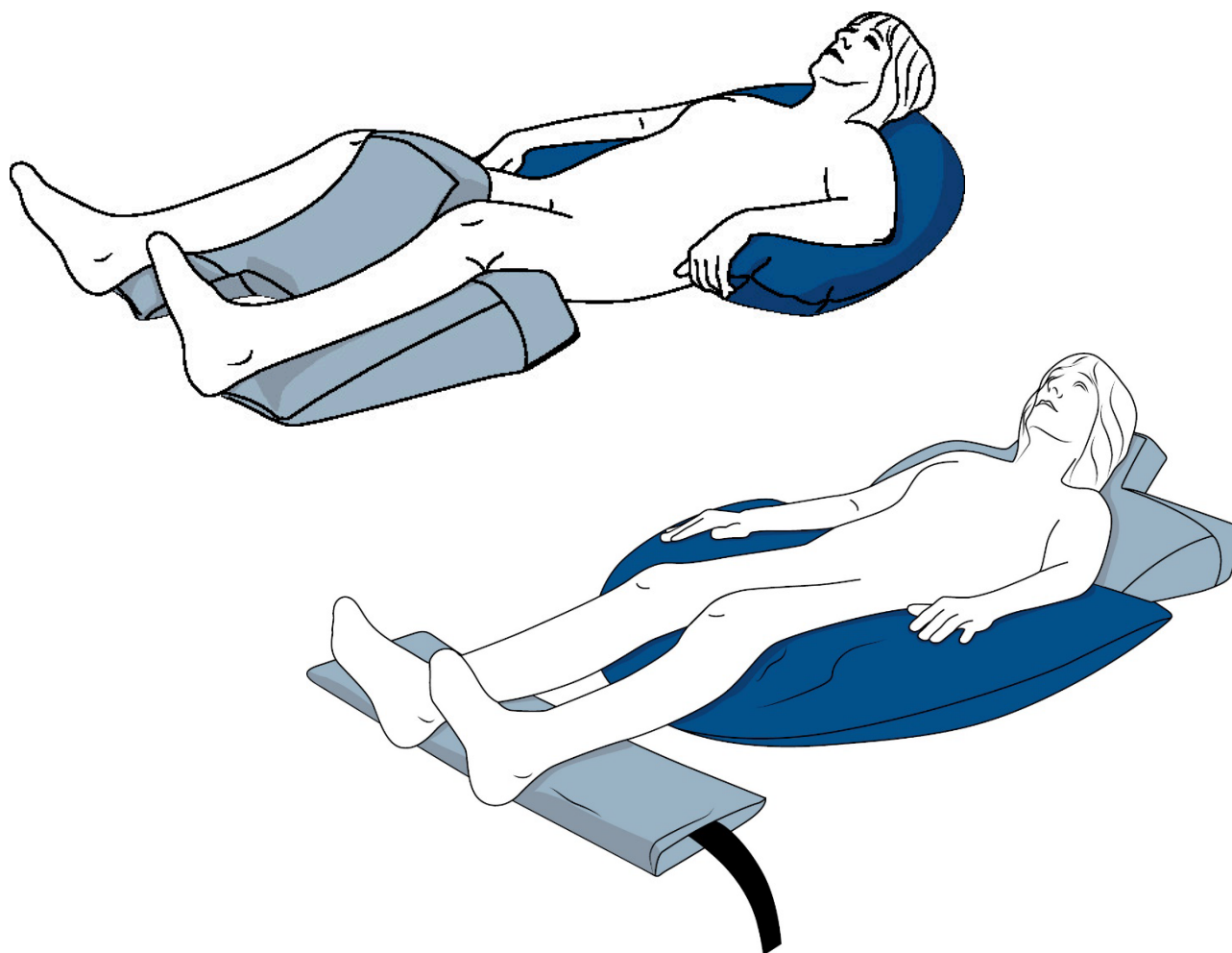

Varenavn	Varenr.	Str.	Mål (LxBxH)	Vægt	HMI-nr.
CAREPUR Halvcirkelpude, ORANGE	P43795	S	142 x 25 x 15 cm	0,71 kg	136294
CAREPUR Halvcirkelpude, BLÅ	P43796	M	180 x 31 x 17 cm	1,21 kg	136297



[CarePartner WebShop](#)

[Brugervejledning](#)