

## Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz Koko-Nora® produktet indendørs.

Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.

Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.

Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz Koko-Nora® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet kan være farligt for børn under 3 år samt mennesker med demens.

Må ikke komme i mikroovn eller anden varmekilde.

Vær opmærksom på at ligger produktet på gulvet kan det give faldskader, så fjern altid produktet efter brug.

## Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast og stof efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsssystemer.

## Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz Koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz Koko-Nora® produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup. Vægt tæppet foldes fremad og kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder i + 2år.

Ordre:    År:    2024            Produkt: Store Sally



Testet efter standarden EN71-3, Samt EN21856:2022



Oliz Koko-Nora® vægt tæppet Sally er specielt udviklet til personer, der ofte lider af alvorlig fysisk stress eller rastløshed. Brugen af Sally bringe afslapning og lindring i hverdagen. Sally skaber en ro i kroppen ved brug, da kroppen udskiller Oxytozin når den udsættes for dyb tryk.

**Læs altid og gem denne originale brugsanvisning til senere brug.**

## Store Sally

Dansk Design - produceret i EU - [www.oliz.dk](http://www.oliz.dk)  
Oliz Koko-Nora Aps- Orionvej 2A- 7430 Ikast -DK -tlf +45 20 78 79 54

## Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet:



Oliz Koko-Nora® Sally vægt tæppet er et tæppe mod uro, der hjælper personer med, at mærke sig selv og slappe bedre af i stressede situationer. Trykket af tæppet påvirker muskel led sansen så personen finder mere ro. Ryst vægt tæppet jævnlgt for at fordele vægten i tæppet.

Oliz Koko-Nora® vægt tæppet er designet til personer i alderen fra + 12 år.  
Størrelse: Længde 940 mm - Bredde 680 mm - Højde 60 mm - Vægt 6,5 kg

<b>Materiale stof:</b>	100%	Imiteret læder/PU
<b>Materiale indvendig:</b>	80%	Polyethylene
	20%	Polyester

## Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes.
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Denne metervare er egnet til sygehus brug og Økotex certificeret og kan tørres over med desinficerende midler, brug dog aldrig plet fjerner og opløsningsmidler på produkter. Tør over med en blød klud.

## Opbevaring:

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz Koko-Nora® produktet opbevares utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn i en taske eller lign. Hold Oliz Koko-Nora® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Tænder iberegnes som skarpe genstande så brug ikke tæppet til personer der bidder.

## Vigtige anvisninger:

Oliz Koko-Nora® vægt tæppet Flora kan bruges ovenpå et tæppe eller en dyne og hjælper personer med, at føle tryghed og mærker sig selv bedre. Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke dem fysisk. Et Oliz Koko-Nora® produkt bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet, skal det fjernes fra dem. Start evt. med at bruge produktet i korte tidsintervaller, som 1-5 min.. Bliver der fortsat udvist modstand, så vil vi anbefale, at produktet ikke bliver brugt til denne person.

Vær opmærksom på, at personen ikke bliver for vant til produktet, så virkningen fortager sig. Produktet skal ses, som et hjælpemiddel mod uro. Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, eller trækkes i ørerne, da tyngden i den kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

## Advarsler:

Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed. Personen skal kunne fjerne tæppet selv ved ubehag.

Må ikke bruges til at sove med, da det ikke er et åndbart produkt. Kun til hvile uden søvn.

Har personen overfladisk vejtrækning vil Oliz Koko-Nora® ikke anbefale at bruge dette produkt. Pga tyngden kan påvirke vejtrækningen negativt. Hold luftvejene frie når produktet anvendes, da det ikke er et åndbart produkt.

Oliz Koko-Nora® anbefaler stærkt, at tæppet **kun** bliver brugt i liggende tilstand, da tyngden vil blive meget markant på benene, hvis det ligger der. Alle produkter med vægt bør bruges med forsigtighed, da vægt bl.a. kan forårsage blokering af blodcirkulationen. Vælger man, at bruge tæppet i sidende stilling, vil der være stor risiko for, at personen vil tabe tæppet og falde i det. Det kan give faldskader, som Oliz Koko-Nora® ikke vil stå inde for. Et Oliz Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.