

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz Koko-Nora® produktet indendørs.

Det anbefales, at folde vingerne ind over lommen og løfte produktet med begge hænder.

MÅ ALDRIG LØFTES I LOMMEN! DETTE KAN GIVE SKADER, SOM IKKE DÆKKES AF GARANTIE!

Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.

Vægttæppet kan transporteres i en taske.

Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz Koko-Nora® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn under 3 år, og mennesker med demens.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, stof og metal efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz Koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz Koko-Nora® produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe.

Ordre: År: Produkt: Trygge Max



5 740017 900751 >

EN12182, og testet efter standarden EN71-3.



Tæppet trygge Max hjælper med, at bringe afslapning og lindring i hverdagen. Tyngden i tæppet giver ro, når den ligger på mave/bryst, da kroppen udskiller Oxytozin, der er et beroligende hormon der hjælper i stressede situationer. Hænderne kan gemmes i lommen, som er på produktet.

Sørg for at gemme denne originale brugsanvisning til senere brug.

Trygge Max

Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz Koko-Nora Aps - Orionvej 2A- 7430 Ikast -DK -tlf +45 20 78 79 54

Vigtige instruktioner før brugen af produktet:

vægttæppet Trygge Max er et tæppe, der hjælper personer med, at mærke sig selv og slappe bedre af i stressede situationer. Det er muligt at dimse med noget i lommen på maven af Trygge Max.

Oliz Koko-Nora® vægttæppet Trygge Max er designet til personer i alderen fra + 5 år.


Størrelse: Længde 770 mm - Bredde 550 mm - Højde 30 mm - Vægt: 4 kg

Materiale stof:	100%	Imiteret læder/PU
Materiale indvendig:	90%	Polyethylene
	10%	metal kugler

Oliz Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.

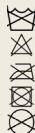

Denne metervare er egnet til sygehus brug og Økotex certificeret og kan tørres over med desinficerende midler, brug dog aldrig plet fjerner og opløsningsmidler på produkter. Tør over med en blød klud.

Opbevaring:

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz Koko-Nora® produktet opbevares utilgængeligt for mennesker, der kræver tilsyn.

Hold Oliz Koko-Nora® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Tænder iberegnes som skarpe genstande så bider personen i ting, så brug ikke dette produkt til denne person.

Vigtige anvisninger:

Oliz Koko-Nora® vægt tæppet Trygge Max kan bruges ovenpå et tæppe eller en dyne. Placér den på mave/bryst og fold vingerne ud over brystet.

Trygge Max hjælper med, at føle tryghed og personen mærker sig selv bedre og så kan man dimse med noget i lommen.

Det er vigtigt, at overvåge personen under brug af tæppet, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke dem fysisk.

Et Oliz Koko-Nora® produkt bør kun bruges med personens eget samtykke. Hvis personen føler ubehag og udviser modstand ved brug af produktet, skal det fjernes derfra. Start evt. med at bruge produktet i korte tidsintervaller. Bliver der fortsat udvist modstand, så vil vi anbefale, at produktet ikke bliver brugt til denne person.

Vær opmærksom på, at personen ikke bliver for vant til produktet, så virkningen fortales sig. Produktet skal ses som et hjælpemiddel mod uro og bruges i begrænsede tidsintervaller, start ud med 2 min og forøg intervallerne efter behov.

Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes fra personen med forsigtighed-**LØFT IKKE I LOMMEN!** Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

Advarsler:

Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed.

Vi anbefaler generelt, at personer der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug. Vi anbefaler kun, at bruge Tom til afslapning ikke til indsovnning. Hold luftvejene frie når produktet anvendes, da det ikke er et åndbart produkt. Trækker personen vejret overfladisk skal man være ekstra opmærksom, da tyngden kan påvirke vejtrækningen.

Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.

Hvis personen har en pacemaker, skal dette produkt have særlig opmærksomhed. Ved hjerte og lunge problemer, skal man kontakte sin egen læge ved ønske om brugen af dette produkt. Hvis produktet placeres på brystet og personen føler sig utilpas, kan dette være en indikation af virkningen af vores produkt. I dette tilfælde skal du straks fjerne produktet.

