

Elektrisk fremdrift-kit til VELA-stole

Elektrisk fremdrift er udviklet for at børn og voksne som hurtigt udtrættes, f.eks. pga. balanceudfordringer eller funktionsnedsættelser, kan have en så selvstændig hverdag som muligt. Vi ved, at uafhængighed og mere selvbestemmelse øger følelsen af livskvalitet og med elektrisk fremdrift kan mange opnå mere selvstændig med mindre hjælp fra andre i hverdagen.

Hvad består kittet af?

Elektrisk fremdrift-kittet består af hjul med hjælpemotorer, en styreboks, et ophæng, et joystick samt et joystickbeslag. Kittet kan monteres på alle VELA Tango 700E og 600ES-stole. Med kittet monteret på stolen, er det muligt at til- og fravælge elektrisk assistance når man bevæger sig rundt, alt efter energiniveau og behov. Skolebørn kan f.eks. selvstændigt flytte stolen mellem lokaler.

Hvordan virker det?

En VELA Tango-stol med elektrisk fremdrift fungerer præcis som en almindelig VELA Tango-stol. Den elektriske fremdrift assisterer, så brugeren kan bibeholde sin mobilitet, når kræfterne slipper op.

Fremdriftskittet påvirker ikke stolens størrelse, hverken i bredde eller dybde. Når fremdriftshjulene er klappet ned, kan stolen ikke køre sidelæns. Dette giver god retningsstabilitet, så der ikke bruges energi på at korrigere stolens retning, hvis man "går stolen rundt". – hvis sidelæns bevægelse er nødvendig, skal fremdriftshjulene manuelt vippes op og ned ved brug.

Bedst egnet underlag?

Stole med elektrisk fremdrift er velegnet til hårde gulve og til brug på lavluvede væg-til-væg-tæpper. Den er ikke egnet til brug på højluvede gulvtæpper, da modstanden fra tæppet hindrer brugeren af stolen i at komme rundt.

Af sikkerhedsmæssige årsager bør man undgå at bruge stolen på løse tæpper, da løse tæpper kan folde sig eller glide, hvilket øger risikoen for uheld og fald.

Se manualen her:

v1935.dk/fremdrift



Tekniske specifikationer for elektrisk fremdrift-kit

Hastighed	0-4 km/t. Kan indstilles så fremdriften passer til brugeren
Effekt	200 W
Batteri-levetid	1 dags brug (afhængig af brugsmønster)
Opladning	Oplades gennem stolens normale opladning
Stolens bredde	Stolens bredde forbliver uændret (som på VELA Tango 700E)
Sikkerhed ift. lift og fremdrift	Fremdrift afbrydes, hvis liften hæves mere end 10 cm
Kan ikke kombineres med	Tilbehør: dobbelte letløbende hjul
Tilbehørets vægt	6 kg
Fremdriftshjul, funktion	Hjulene skal være klappet ned og i berøring med gulvet for at give fremdrift.
Varenr.	929339 (VELA Tango 700E) / 929449 (VELA Tango 600ES)



www.vela.dk

Elektrisk fremdrift



Elektrisk fremdrift til VELA-stole

Elektrisk fremdrift gør det muligt for børn og voksne at opnå selvstændighed med en VELA-stol, selv hvis man ikke har styrke i benene til at "gå stolen rundt" gennem en hel dag.

Elektrisk fremdrift kan hjælpe til

- ✓ selvstændighed hjemme, i skole eller på job
- ✓ at styrke evnen til at opretholde uafhængighed
- ✓ at være aktiv i en længere periode

Forlænger dit aktive liv

Elektrisk fremdrift kan aktiveres og sikre muligheden for mobilitet og aktivitet gennem hele dagen på trods af f.eks. funktionsnedsættelse, udtrætning eller nedsat funktionsevne i benene.

Skaber selvstændig mobilitet

Hvis der ikke er kræfter til både at gå stolen rundt og udføre aktiviteter, kan man spare på kræfterne ved hjælp af den elektriske fremdrift - og bruge energien på aktiviteten.

Forbedrer livskvaliteten

Øget mobilitet i hjemmet giver mulighed for at klare mere på egen hånd - og selvstændighed og selvbestemmelse forbedrer livskvalitet.

Se videoen her:
v1935.dk/el2024



Se børnevideo her:
vela.my/barn



701.959-3 © Verrmund Larsen A/S

Kompatibel med
VELA Tango 700E & 600ES