



Empulse®



E|m90

SLANK, STILFULD POWER TIL DIN
MANUELLE KØRESTOL

DIN KØRESTOL + POWER. INGEN KOMPROMISER

Empulse M90 hjælpemotor reducerer belastningen af manuel fremdrift, og hjælper dig med at spare din energi til det, der betyder mest for dig.

M90 har en innovativ Dual Controller, der tilbyder to intuitive drive modes i én enhed. Skift til joystick-betjeningen for at køre din kørestol.

Let og alsidig, og den **integreres problemfrit** på din kørestol - ingen ledninger eller ekstra komponenter, der fylder. Behold dine foretrukne dæk og drivringe, og du kan samtidig vælge at køre med eller uden strøm ved hjælp af et aftageligt joystick eller styre med drivringene.

Som **den letteste i sin klasse** tilføjer M90 slank, stilfuld power til dit liv.



Skan QR koden med din telefons kamera for at se video.



LET I VÆGT

Den letteste af sin slags

Både kompakt og let i vægt - den komplette M90 enhed **vejer kun 12 kg alt inklusiv** - hvert hjul vejer kun 5,9 kg inklusiv batteri, hvilket gør transport **nemt og effektivt**. M90 tilføjer minimal vægt til kørestolen og bevarer dens manøvredegtighed og brugervenlighed under de daglige aktiviteter.



DUAL CONTROLLER

Skift mellem drive modes øjeblikkeligt

Med den smarte Dual Controller kan du ubesværet skifte mellem de to køretilstande (drive modes); **Joystick og Speed Controller med drivingsstyring**, ved hjælp af Mode/Profil-knappen, så M90 matcher din energi, dit miljø og dine præferencer - det er ikke nødvendigt at ændre på hardwaren.

Det er nemt at fjerne og placere den **trådløse controller**, hvor det er mest praktisk.



DRIVE MODE (Input Method)	JOYSTICK 	SPEED CONTROLLER MED DRIVINGSSTYRING 
Start/Stop	Skub joysticket fremad for at starte. Slip joysticket for at stoppe. Drivringene påvirker ikke hastigheden.	Tryk på speed controlleren for at starte. Skub speed controlleren ned eller brug drivringene til at stoppe gradvist.
SPEED CONTROLLER	Skub joysticket fremad/tilbage for at accelerere proportionalt eller sænke farten.	Tryk på speed controlleren for at øge eller sænke hastigheden trin for trin, op til niveau 5 i begge profiler .
STYRING	Bevæg joysticket i hvilken som helst retning for at styre.	Styr manuelt med drivringene.
Cruise Control	Tryk joysticket ned ved den ønskede hastighed for at aktivere. Styr med joysticket. Stop ved at bevæge joysticket eller trykke ned.	Tryk på speed controlleren for at øge eller mindske hastigheden. Styr manuelt med drivringene. Stop ved at trykke speed controlleren ned , ved at trykke baglæns, indtil hastigheden er nul, eller ved at gribe fat om drivringene og holde dem fast.
Manual Assist	-	Et blidt boost, som sætter ind efter et stop via drivringene og tillader repositionering.
Drive Profil	Vælg via App eller Dual Controller (Indendørs/Udendørs)	Vælg via App eller Dual Controller (Indendørs/Udendørs)
Drive Indstilling	Vælg hastighedsinterval (Base / Standard / Max) via Appen	Vælg hastighedsinterval (Base / Standard / Max) via Appen

Nogle funktioner kan fungere anderledes, afhængigt af om Joystick eller Speed Controller med drivingsstyring er valgt. Vi anbefaler, at brugere benytter et øjeblik på at blive fortrolige med, hvordan funktionerne fungerer i deres valgte køretilstand for en jævn og sikker tur.



Med **Mode/Profil-knappen** styrer du både **Drive Mode** og **Drive Profilerne** for at optimere M90's ydeevne efter dine præferencer. **Mode/Profil-indikatoren** viser den valgte mode eller profil.

Tryk og hold for at skifte den måde, du styrer din kørestol på (Drive Mode):

- **Joystick Mode** (Hvid LED)
- **Speed Controller med drivingsstyring mode** (Blå LED)

Tryk for at skifte mellem indendørs og udendørs Drive Profiler:

- **Indendørs (solid LED)** – til snævrere vendinger og smidig manøvrering indenfor
- **Udendørs (blinkende LED)** – til responsiv ydeevne på varieret terræn

Diskret integration på din stol

og i dit liv

Fuldt integreret navdesign giver diskret power og holder din stol smal og kompakt uden ekstra komponenter eller ledninger, der fylder.

Oplad væk fra stolen,

behold M90 på stolen

Skift eller erstat nemt batterier for konstant mobilitet. Oplad på eller væk fra M90, og øg din rækkevidde ved at medbringe et ekstra batteri - perfekt til at forblive på farten.





Du skal blot dreje M90-navet for at aktivere hjælpemotoren eller skifte til free mode tilstand for manuel kørsel uden modstand.

Kør på din egen måde >

Benyt dine foretrukne dæk og drivringe:
Har du brug for en drivring, der fungerer med reduceret håndfunktion eller greb? Vi har løsningen. Leder du efter dæk, der fungerer på både glatte gulve indendørs og ujævnt udendørs terræn? Valget er dit.



M90 APP



Mode



All-Way



Outdoor

Profile

Base

Standard

Max

Kør ubesværet.

Skift hurtigt mellem **køretilstande (modes)** og **køreprofiler (profile)** for smidig manøvrering i ethvert miljø, og find den rigtige balance mellem power og effektivitet.

Finjuster din kørsel.

Vælg indstillingen **Base**, **Standard** eller **Max Drive** for at matche brugerens behov og omgivelser.

Få mest muligt ud af din M90 fra dag ét. Brug M90-appen under opsætningen for at optimere ydeevnen for brugeren og kørestolen.

Vælg en betjening (mode) og køreprofil (profile), der matcher dine omgivelser – indendørs eller udendørs – med forudindstillinger for hastighed, styrke og hældning. Bevar kontrollen med batteristatus i realtid til både controller og hjul.

Kompatibel med Android™ og Apple® iOS.



DYNAMISK YDEEVNE

Sikker, nem og intelligent

Fartpilot og hastighedskontrol ned ad bakke gør kørsel med M90 sikker, enkel og intuitiv. Komponenter centreret om navet betyder en bedre manøvrerbarhed og en bedre kørsel.

Op til 15 km rækkevidde

M90 er drevet af et letvægtsbatteri (0,6 kg), som tilbyder en rækkevidde på op til 15 km* – så du kan rejse ubesværet uden at skulle lade op mellem turene.

*Rækkevidden afhænger af køreflader, brugerens vægt, køreadfærd, temperatur og terræn.



TRANSPORT

Ubesværet rejse, når som helst og hvor som helst

Designet til at være let at transportere. M90-hjulene har en standard quick release aksel og vejer kun 5,9 kg, så de vil passe fint ind i bagagerummet på selv små biler.

Takket være det flyvevenlige batteri er M90 ideel til brugere, der søger en bekvem løsning til lange og korte afstande.

*De enkelte flyselskaber har forskellige krav i forhold til transport af produkter med Li-Ion-batterier. Inden du arrangerer flyrejser med hjælpemotoren, bedes du bekræfte med dit flyselskab eller luftfartsselskab, at de accepterer batteridrevne køretøjer. Se venligst brugervejledningen for yderligere detaljer.

Den holdbare rejsetaske i super kvalitet (tilkøb) er designet til at holde hjulene med batterier beskyttet og holde alt organiseret i en praktisk taske, som er nem at bære.

Rejsetasken er ikke tilgængelig på alle markeder.



TEKNISK DATA

Vægtkapacitet	120 kg
Kørestolens drivhjulsstørrelse	540 mm (24")
Batteriets rækkevidde ¹	15 km
Maks. hældning	6°
Total vægt på enhed	12 kg
Hvert hjul med batteri	5,9 kg
Hvert hjul uden batteri	5.3 kg
Batterivægt	0.6 kg
Kompabilitet	Krydsrammestole Fastrammestole
Maks. hastighed	6 km/t
Elektronik	Bluetooth / Wireless
Batterier Flyvevenlige ²	Lithium Ion (<100Wh farligt gods begrænsning)
Motor	150 W / 24 V

1. Rækkevidden er afhængig af underlaget, brugerens vægt, kørefærd, temperatur og terræn.

2. Bekræft altid med dit flyselskab for gældende regler.

⚠ ADVARSEL

Anvendelse af en hjælpemotor-enhed kan ændre dit tyngdepunkt eller den måde, din stol kører på. For at mindske risikoen for at vælte eller falde, skal du kontakte din sundhedsfaglige behandler om korrekt kørestolskonfiguration, herunder brug af tipsikringer og andre nødvendige justeringer.



Nu hvor du har læst alt om Empulse M90, hvorfor så ikke booke en gratis afprøvning og opleve den selv?



M90 Website

Sunrise Medical ApS
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Danmark
Tlf: +45 70 22 43 49
E-mail: info@sunrisemedical.dk

For yderligere information om specifikationer, muligheder og tilbehør henvises til bestillingsformularen. Alle oplysninger kan ændres uden varsel. Kontakt venligst Sunrise Medical med eventuelle spørgsmål, du måtte have.



Hvis du er svagtseende, kan dette dokument ses i PDF-format på www.SunriseMedical.dk.