

## Bide Faldbeskyttelse ved Sengen



**Bide** er en enkel, innovativ enhed designet til at hjælpe med at forhindre fald om natten. Den bruger diskrete bevægelses- og lyssensorer til at registrere, hvornår brugeren vågner, udsender et dæmpet lys og afspiller op til fem forud indspillede talebeskeder fra eksempelvis pårørende eller omsorgspersonale, hvilket tilskynder til sikker bevægelse i rummet.

Enheden bruger et slags 'trafiklyssystem' med rødt, gult og grønt lys. Mens en besked afspilles, skifter lyset fra rødt til gult og bliver derefter grønt, når beskeden slutter. Efter et minut aktiveres et blødt, hvidt lys for at hjælpe brugeren med at forlade sengen sikkert. Dette lys på lavt niveau forbliver tændt i 10 minutter, før det gradvist forsvinder. Lyset kan slukkes når som helst ved at trykke på Bide-knappen i midten.



Stemmeoptagelser skal være mindst 3 sekunder lange og kan tilpasses med nyttige beskeder til brugeren.

**Placér Bide ved siden af sengen**, helst på et natbord i madrashøjde eller lidt højere. Bide kræver ikke batterier og bør altid være tilsluttet stikkontakten for at sikre, at den altid er klar til at hjælpe, når det er nødvendigt.

**Bides** indhold af bevægelsesregistrering, stemmebeskeder, et 'trafiklyssystem' og dæmpet belysning gør det til en effektiv, brugervenlig og omkostningseffektiv løsning til faldforebyggelse om natten.

Det er især gavnligt for personer, der har svært ved at bevæge sig sikkert i løbet af natten og giver ro i sindet for både brugerne og deres pårørende.

**FAKTA:**

- **Forhindrer fald:** Hjælper f.eks. seniorer med at undgå fald om natten
- Bruger bevægelses- og lyssensorer til at registrere bevægelse
- Afspiller besked fra pårørende, der minder om sikker færden om natten
- Bide afspiller op til 5 gemte talebeskeder
- Bide bruger et 'trafiklyssystem' med rød, gul og grøn belysning for at sikre fokus på en sikker færdsel i værelset for brugeren
- Afgiver et dæmpet, hvidt lys i 10 min. for bedre orientering og sikker færdsel i soveværelset.
- Nem at bruge: Ingen opsætning nødvendig, fungerer automatisk ved tilslutning til strøm.
- Kassen inkluderer: Bide, USB-strømkabel og Kvikguide

**Se mere på [www.gmcare.dk](http://www.gmcare.dk)**

Ønsker du at høre nærmere er du også velkommen til at kontakte os på telefon

**51 15 01 10**

eller på mail [kundeservice@gmcare.dk](mailto:kundeservice@gmcare.dk)