



ProFem®'s Ovale Prolapsring er primært til behandling af let Uterusprolaps (nedsunken livmoder) af 1. grad samt **Cystocele** (underlivsprolaps/nedsynkning).

Prolapsringens ovale form forhindrer, at ringen roterer rundt. Dette kan være en fordel for kvinder, som tidligere har gennemgået en vaginal operation.

Ringene fås både med og uden en støttemembran. Hullerne i støttemembranen letter udtagning, idet vakuum slipper lettere.

Brugen af prolapsringe er en veldokumenteret og effektiv metode inden for konservativ behandling af bækkenbundsproblemer som for eksempel vaginale prolaps.

Denne behandlingsform har været anvendt med stor succes i mange år og vinder stadig større popularitet som et skånsomt alternativ.

Prolapsringe tilbyder en enkel, økonomisk og fuldt reversibel løsning på blandt andet vaginale prolaps. De udgør et attraktivt alternativ til kirurgiske indgreb og de risici, som ofte er forbundet med sådanne operationer.

ProFem®-serien er fremstillet i hypoallergen medicinsk silikone af høj kvalitet, og findes i mange forskellige former og størrelser, hvilket gør det muligt at tilpasse behandlingen individuelt og dække stort set alle behov ved bækkenbunds-lidelser og inkontinens.

For at finde den **korrekte ringstørrelse bør man starte med et Fitting-sæt**, som er produceret til sundhedsprofessionelle, som derved kan hjælpe patienten med at finde den mest effektive størrelse. Der findes et Fitting-sæt til de fleste produkter i ProFem-serien.

Fitting-sættet består af de mest almindelige størrelser.

Prolapsringen er kun beregnet til én patient

Ringene kan genbruges ved at følge producentens anvisninger for korrekt rengøring og sterilisering.

Det kan rengøres med mild sæbe og varmt vand, og det skal skylles grundigt efter med vand.

Patienten skal oplæres i isætning og udtagning af en sundhedsprofessionel.

Prolapsringen bør udtages og rengøres som en normal daglig rutine.

Den er godkendt til 150 rengørings- og steriliseringscykluser.

Det er muligt at søge støtte til køb af disse produkter jf. Servicelovens §112 – i den kommune, hvori patienten har fast bopæl.

Vareoplysninger:

Varenr.	HMI-nr.	Str.	Varenavn
FS 4000	-	-	ProFem Oval Pessary Fitting Sæt
OV2.00#1	145733	1	ProFem Oval Ring Pessary, 51 mm
OV2.25#2	145736	2	ProFem Oval Ring Pessary, 57 mm
OV2.50#3	145740	3	ProFem Oval Ring Pessary, 63 mm
OV2.75#4	145743	4	ProFem Oval Ring Pessary, 69 mm
OV3.00#5	145746	5	ProFem Oval Ring Pessary, 76 mm
OV3.25#6	145749	6	ProFem Oval Ring Pessary, 82 mm
OV3.50#7	145754	7	ProFem Oval Ring Pessary, 89 mm
OV3.75#8	145757	8	ProFem Oval Ring Pessary, 95 mm
OV4.00#9	145760	9	ProFem Oval Ring Pessary, 101 mm
OV2.00S#1	145764	1	ProFem Oval Ring Pessary m/støttemembran, 51 mm
OV2.25S#2	145767	2	ProFem Oval Ring Pessary m/støttemembran, 57 mm
OV2.50S#3	145770	3	ProFem Oval Ring Pessary m/støttemembran, 63 mm
OV2.75S#4	145773	4	ProFem Oval Ring Pessary m/støttemembran, 69 mm
OV3.00S#5	145776	5	ProFem Oval Ring Pessary m/støttemembran, 76 mm
OV3.25S#6	145780	6	ProFem Oval Ring Pessary m/støttemembran, 82 mm
OV3.50S#7	145783	7	ProFem Oval Ring Pessary m/støttemembran, 89 mm
OV3.75S#8	145786	8	ProFem Oval Ring Pessary m/støttemembran, 95 mm
OV4.00S#9	145789	9	ProFem Oval Ring Pessary m/støttemembran, 101 mm

