




ProFem® Gellhorn Støttepessar

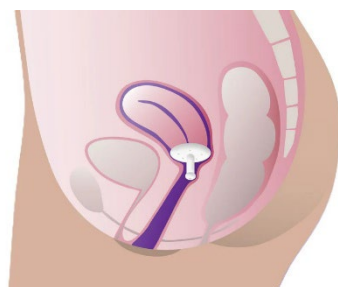

ProFem®'s Gellhorn Støttepessar med drænhuller bruges til **at lindre gener** forbundet med en **Cystocele** (forvægsprolaps), en **Rectocele** (nedsynkning af bagvæg) eller en **Uterusprolaps** (nedsunken livmoder) af 2. eller 3. grad.

Gellhorn fås i 2 længder for at gøre det muligt at finde den mest effektive og behagelige pasform, da nogle kvinder har en vaginal forkortelse. Begge kan klemmes sammen for at lette indføring eller udtagning.

Brugen af vaginalpessarer og prolapsringe er en veldokumenteret og effektiv metode inden for konservativ behandling af bækkenbundsproblemer som f.eks. en prolaps.

Denne behandlingsform har været anvendt med stor succes i mange år og vinder stadig større popularitet som et skånsomt alternativ.

ProFem's produkter tilbyder en enkel, økonomisk og fuldt reversibel løsning på både prolaps og stressinkontinens. De udgør et attraktivt alternativ til kirurgiske indgreb og de risici, som ofte er forbundet med sådanne operationer.

Gellhorn er fremstillet i hypoallergen medicinsk silikone af høj kvalitet.

ProFem®-serien findes i mange forskellige former og størrelser, hvilket gør det muligt at tilpasse behandlingen individuelt og dække stort set alle behov ved bækkenbundslidelser og inkontinens.

For at finde den **korrekte størrelse bør man starte med et Fitting-sæt**, som er produceret til sundhedsprofessionelle, som derved kan hjælpe patienten med at finde den mest effektive størrelse. Der findes et Fitting-sæt til de fleste produkter i ProFem-serien.

Gellhorn Støttepessar er kun beregnet til én patient

Det kan genbruges ved at følge producentens anvisninger for korrekt rengøring og sterilisering.

Det kan rengøres med mild sæbe og varmt vand, og det skal skylles grundigt efter med vand.

Patienten skal oplæres i indføring og udtagning af en sundhedsprofessionel.

Pessaret bør udtages og rengøres som en normal daglig rutine.

Det er godkendt til 150 rengørings- og steriliseringscykluser.

Det er muligt at søge støtte til køb af disse produkter jf. Servicelovens §112 – i den kommune, hvori patienten har fast bopæl.

Vareoplysninger:

Varenr.	HMI-nr.	Str.	Varenavn
FS 5000	-	-	ProFem Gellhorn Pessary Fitting Sæt
G1.50D#0	146362	0	ProFem Gellhorn Pessary, 38 mm
G1.75D#1	146365	1	ProFem Gellhorn Pessary, 45 mm
G2.00D#2	146368	2	ProFem Gellhorn Pessary, 51 mm
G2.25D#3	146371	3	ProFem Gellhorn Pessary, 57 mm
G2.50D#4	146374	4	ProFem Gellhorn Pessary, 63 mm
G2.75D#5	146377	5	ProFem Gellhorn Pessary, 70 mm
G3.00D#6	146380	6	ProFem Gellhorn Pessary, 76 mm
G3.25D#7	146383	7	ProFem Gellhorn Pessary, 82 mm
G3.50D#8	146386	8	ProFem Gellhorn Pessary, 89 mm
G3.75D#9	146389	9	ProFem Gellhorn Pessary, 95 mm
G1.50#0	146392	0	ProFem Gellhorn Pessary – short, 38 mm
G1.75#1	146395	1	ProFem Gellhorn Pessary – short, 45 mm
G2.00#2	146398	2	ProFem Gellhorn Pessary – short, 51 mm
G2.25#3	146401	3	ProFem Gellhorn Pessary – short, 57 mm
G2.50#4	146404	4	ProFem Gellhorn Pessary – short, 63 mm
G2.75#5	146407	5	ProFem Gellhorn Pessary – short, 70 mm
G3.00#6	146410	6	ProFem Gellhorn Pessary – short, 76 mm
G3.25#7	146413	7	ProFem Gellhorn Pessary – short, 82 mm
G3.50#8	146416	8	ProFem Gellhorn Pessary – short, 89 mm
G3.75#9	146419	9	ProFem Gellhorn Pessary – short, 95 mm

