



PRODUKTARK

Lasal lejringspuder

Løsningen på lejrning.

Lasal lejringspuder er udviklet til lejrning af brugere inden for følgende patientkategorier: demens, geriatri, neurologi, palliation og smerte.

Lejringspuderne bruges på fx plejecentre, institutioner, hospice og i private hjem.



- Trykfordelende effekt.
- Anti-bakterielt forseglet pudeoverflade.
- Mange lejringsmuligheder i hver enkel pude.
- Vaskbare betræk.
- Giver taktile og proprioceptive stimuli.
- Mere end 25 forskellige puder i serien.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

Anvendelse

Lasal lejringspuder bruges af børn og voksne som støtte og aflastning i liggende eller siddende stilling i fx sengen, kørestolen, sofaen eller på gulvet.

Puderne er formbare og tilpasser sig kroppens form. Derudover vil puderne også reflektere brugers kropsvarme. Når kropsvarmen reflekteres, virker det stimulerende på muskler og kredsløb.

Pudernes tætte berøring ind mod kroppen giver en følelse af ro og tryghed, og det er nemt at ændre på pudernes form undervejs.

Bemærk, at Lasal lejringspuder ikke er et dokumenteret tryksårsforebyggende produkt, trods den høje komfort og trykfordeling.



Bananpude L langs maven og mellem lårene.
Firkantpude L mellem underbenene.

Konstruktion

Lasal lejringspuder findes i en bred vifte af faconer og størrelser. Kombinationen af de små polystyrenkugler i en fleksibel inderpude betrukket med fx et yderbetræk i bomuld gør, at puderne former sig individuelt efter brugeren og underlaget.

Lasal lejringspuder er formbare og glider derfor ikke, som en almindelig pude kan gøre.

Der findes to yderbetræk. Et farvet betræk i bomuld til lejrning med farvekoder og et gråt hygiejnebetræk.

Bomuldsbetrækket er åndbart, vaskbart og anti-bakterielt behandlet. Hygiejnebetrækket er ligeledes vaskbart og mug- og svamperesistent.



Bananpude S bag om ryggen og under armen.
Bananpude L foran kroppen og mellem lårene.
Firkantpude L mellem underbenene.

Beroligende effekt

Udover at øge trykfordelingen kan puderne også bruges til mindskning af spasticitet og give taktile stimuli.

Taktil stimulering hjælper og har en betydning for fx mennesker med demens, idet den afgrænsende fornemmelse af kroppen giver en beroligende effekt.



Tyk halvmånepude i skødet. Halvmånepude bag nakken. T-pude M mellem lårene.

Rengøring og vedligeholdelse

Daglig rengøring af pude

Tør puden af med en ren klud vredet op i vand med et mildt rengøringsmiddel. Pudene skal være helt tør, før den tages i brug igen eller lægges væk.

Desinfektion og vask

Til overfladedesinfektion af inderpuden bruges engangsklude med ethanol (fx Wet Wipe 70 %)

eller et klorprodukt 1000-1200 ppm (fx Wet Wipe Chlorine Desinfection).

Bomuldsbetrækket vaskes på 60° C og kan tørretumbles. Det kryber cirka 5% og kan falme med tiden. Hygiejnebetrækket vaskes på 95° C og tørretumbles.

Lasal lejringspuder kan ikke vaskes. Maskinvask vil ødelægge fyldet i pudene.

Lasal lejringspuder



U-formet nakkepude, barn, S
Str. 62/109x33x4,5 cm
HMI: 65001, Varenr.: 0305-901-000



U-formet nakkepude, junior, S
Str. 54/90x15x4 cm
HMI: 6500, Varenr.: 0305-921-000



U-formet nakkepude, junior, L
Str. 60/114x21x6 cm
HMI: 65002, Varenr.: 0305-911-000

Nakkepude, barn
Str. 23x16x5 cm
HMI: 69 983
Varenr.: 0305-321-000



Nakkepude, voksen
Str. 24x21x7 cm
HMI: 65004
Varenr.: 0305-311-000



Halvmånepude, S
Str. 47x22,5x4 cm
HMI: 27873
Varenr.: 0305-301-000



Halvmånepude
Str. 79x33x7 cm
HMI: 27872
Varenr.: 0305-801-000



Halvmånepude, tyk
Str. 86x40x7 cm
HMI: 27871
Varenr.: 0305-811-000



Trekantpude, M/S
Str. 55x16x14 cm
HMI: 64993
Varenr.: 0305-231-000



Trekantpude, L
Str. 94x24,5x22 cm
HMI: 27870
Varenr.: 0305-201-000



Trekantpude, M
Str. 66x20x17,5 cm
HMI: 27869
Varenr.: 0305-211-000



Trekantpude, S
Str. 39,5x12x10 cm
HMI: 27868
Varenr.: 0305-221-000

T-pude, XS
Str. 36/13x27/12,5x4 cm
HMI: 27882
Varenr.: 0305-6041-000



T-pude, S, Str. 56,5/17,5x37/15x7 cm
HMI: 27883, Varenr.: 0305-6031-000



T-pude, M, Str. 63/22x40/19,5x7 cm
HMI: 27884, Varenr.: 0305-6021-000



T-pude, L/M, Str. 72/25x45/20x8 cm
HMI: 64994, Varenr.: 0305-6016-000



T-pude, L, Str. 83/27x56/27x10 cm
HMI: 27885, Varenr.: 0305-6011-000



T-pude, XL, Str. 98/26x61/29x11 cm
HMI: 27886, Varenr.: 0305-6001-000




Siddepude, lang
Str. 104x50x40/18,5 cm
HMI: 27879
Varenr.: 0305-421-000

Firkantpude, L
Str. 73x42x5 cm
HMI: 27875
Varenr.: 0305-711-000




Firkantpude, Lang
Str. 110x41x10 cm
HMI: 27876
Varenr.: 0305-721-000

Buttet støttepude
Str. 34x24x14/5,5 cm, HMI: 27877
Varenr.: 0305-511-000

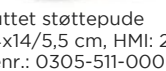

Siddepude, høj
Str. 73x50x29/13 cm, HMI: 27878
Varenr.: 0305-401-000

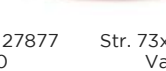

Firkantpude, S
Str. 59,5x29,5x5,5 cm
HMI: 27874
Varenr.: 0305-701-000



Firkantpude, XS
Str. 40x10x3 cm
HMI: 29374,
Varenr.: 0305-741-000



Firkantpude (marineblå)
Str. 40x18x3 cm
HMI: 135667,
Varenr.: 0305-761-000
(ikke afbilledet)

Firkantpude
Str. 35x22x3 cm
HMI: 69984
Varenr.: 0305-731-000

Bananpude, S, Str. 144x40x12 cm
HMI: 27 866, Varenr.: 0305-111-000



Slangeformet pude, Str. 320x30x9 cm
HMI: 27867, Varenr.: 0305-151-000

Bananpude, L, Str. 148x31x10 cm,
HMI: 27 865, Varenr.: 0305-101-000

Specifikationer

Kuglemateriale	Krøyer-kugler af ekspanderet polystyren.
Inderpude	PU-belagt flammehæmmet polyestertekstil. Mug- og svamperesistent.
Bomuldsbetræk	100% Øko-Tex® perlebomuld. Anti-bakterielt behandlet.
Hygiejnebetræk	PU-belagt flammehæmmet polyestertekstil. Mug- og svamperesistent.
Rengøring af inderpude	Puden tåler ikke maskinvask, men kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel eller desinficeres.
Vask af betræk	Bomuldsbetrækket vaskes på 60°C og kan tørretumbles. Det kryber cirka 5% og kan falme med tiden. Hygiejnebetrækket vaskes på 95°C og kan tørretumbles.
Opbevaring	Udsæt ikke puden for høj varme, langvarigt og intensivt sollys eller anden stråling.
Klassifikation HMI-basen	ISO 09.07.06
Forventet levetid	2 år
Grundlæggende UDI-DI	5740000100014N5

Cobi Rehab deltager gerne i konkrete afprøvninger hos brugere med komplicerede lejringsproblematikker.

Kontakt os på **cobi@cobi.dk** eller **7025 2522**.

Bestilling af Lasal lejringspuder med betræk

På oversigten side 3 finder du en oversigt over alle Lasal lejringspuder med deres HMI-nummer og varenummer. Varenummeret gælder kun selve inderpuden. Varenumre på hygiejnebetræk ender på 010, mens bomuldsbetræk ender på 020.

Se eksempel på bestilling her:

Firkantpude, Lang, HMI-nummer 27876, Varenummer 0305-721-000

Firkantpude, Lang, Hygiejnebetræk, Varenummer 0305-721-010

Firkantpude, Lang, Bomuldsbetræk, Varenummer 0305-721-020

Ring din bestilling ind på **7025 2522** eller send os en mail på **cobi@cobi.dk**.
