


Vigtigt!

Installer produktet før denne quick guide gennemgås.

TILSLUTNING AF HALSSLYNGEN

- Fjærg halsslyngen **R10** fra halsslyngesøkket **R9** ved at trække halsslyngedelingen ud.
- Placer modtageren på brystet og halsslyngedelingen omkring halsen.
- Slut halsslyngen **R10** til **R9** igen.
- Sæt høreapparatet i T-position (kun telespole) eller i M/T-position (mikrofon og telespole samtidig).

TILSLUTNING AF HALSSLYNGEN

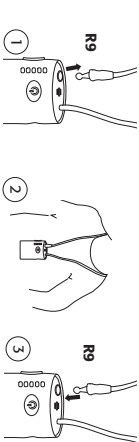

LYTTE TIL FJERNSYNET


- Tænd for modtageren ved at trykke og holde modtagerast **R1** i op til fem sekunder.
 - Placer senderen i ladestanden.
 - Tænd for senderen med et enkelt tryk på senderast **T1**.
 - Senderens lysindikator **T2** og **T3** indikerer transmission ved at lyse hvidt.
 - Modtagerens lysindikator **R1** lyser hvidt, når der lyttes til fjernsynet.
- Tryk og hold modtagerast **R2+** (volumen op) i fem sekunder for at aktivere den trådløse forbindelse, hvis der ikke er nogen lyd.

KOMMUNIKATION

- Tag senderen og modtageren fra ladestanden.
- Placer modtageren om halsen.
- Senderen og modtageren med et enkelt tryk på senderast **T1**, og tryk og hold modtagerast **R1** i op til fem sekunder.
- Vælg mellem omni eller retningsbestemt mikrofonindstilling.
- Hold senderen i hånden og peg den i retning af lyden.
- Sluk senderen og modtageren med et enkelt tryk på senderast **T1** og tryk og hold modtagerast **R1** i op til fem sekunder.

*Tryk og hold modtagerast **R2+** (volumen op) i fem sekunder for at aktivere den trådløse forbindelse, hvis der ikke er nogen lyd.*

KOMMUNIKATION

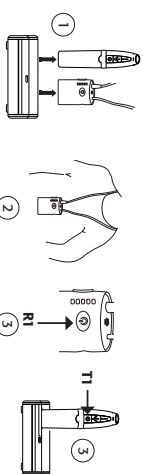

ACCEPTERE ET OPKALD

- Ved et indkommende opkald høres en ringetone i høreapparatene eller hovedtelefonen og modtagerens lysindikator **R1** blinker blåt.
- Tryk kort på modtagerast **R1** for at acceptere opkaldet.
- Tryk på modtagerast **R1** for at afslutte opkaldet.

FORETAGE ET TELEFONOPKALD

- Tænd for modtageren ved at trykke og holde modtagerast **R1** i op til fem sekunder.
- Tryk kort på modtagerast **R1** og åvært klartonen.
- Tag røret af, læg det ved siden af telefonen og åvært klartonen.
- Indtast det ønskede telefonnummer.
- Tryk på modtagerast **R1** for at afslutte opkaldet.

FORETAGE ET TELEFONOPKALD



FORETAGE ET MOBILTELEFONOPKALD

- Tænd for modtageren ved at trykke og holde modtagerast **R1** i op til fem sekunder.
- Indtast nummeret på mobiltelefonen og kald op.
- Opkaldet bliver automatisk overført til HearIt All modtageren.
- Tryk på modtagerast **R1** eller afslut opkaldet på mobiltelefonen.

PhonicEar®
Connected to life

921-1-3-4-701-00 Rev. A 0808

For mere information besøg
www.phonicear.dk

Du kan høre!

Fjernsyn
Samtaler
Telefon
Mobiltelefon



Produceret af: **PhonicEar®**
Connected to life

Kongsbakken 9 • 2765 Smørum • Danmark
Phone: 3917 7101 • Fax: 3927 7900
E-mail: mail@phonicear.dk


Quick Guide

Betjening

Tast/diode/stik	Funktion
Modtager	
R1	- Tænd (tryk og hold i op til 5 sekunder) - Sluk (tryk og hold i op til 5 sekunder) - Besvare og afslutte telefonsamtaler og mobiltelefonsamtaler - Hvidt lys: WDA forbindelse er aktiv - Blåt lys: Bluetooth forbindelse er aktiv - Blåt blink: Indkommende opkald
R2+ (op)	- Volumen op - Forbind/afslut WDA signal
R2- (ned)	- Volumen ned - Afvis mobiltelefonsamtale (tryk og hold i 2 sekunder)
R3	- Blåt blink: Bluetooth ikke forbundet - Grønt lys: Volumenniveau 1
R4	Grønt lys: Volumenniveau 2
R5	Under brug - Rødt blink: Batteriniveau lavt - Grønt lys: Volumenniveau 3 Under opladning - Rødt lys: Opladning - Grønt lys: Fuldt opladet
R6	Grønt lys: Volumenniveau 4
R7	- Hvidt blink: WDA forbindelse tabt - Grønt lys: Volumenniveau 5
R8	Stik til hovedtelefon
R9	Stik til halsslynge
R10	Halsslynge
R11	Stik til ladestand
Sender	
T1	Tænd/sluk, indikator for WDA og batteri
T2	Omnimikrofon. Til at opfange lyde fra forskellige retninger
T3	Retningsbestemt mikrofon. Til at opfange lyde fra én retning
T4	Stik til ladestand
T5	Hul til bærerem
T6	Bælteclips
T7	Hul til halssnor
Ladestand	
C1	Ladestand til sender
C2	Ladestand til modtager
C3	Lysindikator for strømforsyning og Bluetooth
C4	WDA kanalvælger
C5	Tast til Bluetooth og WDA forbindelse
C6	Stik til strømforsyning
C7	Lydingang til fjernsyn, radio, osv.
C8	Telefonindgangsstik
C9	Telefonudgangsstik


Modtager

- R1:** Tænd/sluk og svarertast, indikator for WDA og Bluetooth
R2: Volumetast +/- (op/ned)
R3: Lysindikator for Bluetooth og volumenniveau 1
R4: Lysindikator for volumenniveau 2
R5: Lysindikator for batteri og volumenniveau 3
R6: Lysindikator for volumenniveau 4
R7: Lysindikator for WDA og volumenniveau 5
R8: Stik til hovedtelefon
R9: Stik til halsslynge
R10: Halsslynge
R11: Stik til ladestand

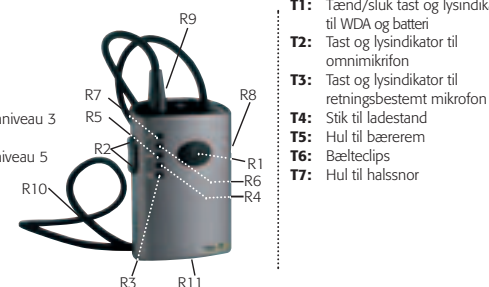


Sender

- T1:** Tænd/sluk tast og lysindikator til WDA og batteri
T2: Tast og lysindikator til omnimikrofon
T3: Tast og lysindikator til retningsbestemt mikrofon
T4: Stik til ladestand
T5: Hul til bærerem
T6: Bælteclips
T7: Hul til halssnor

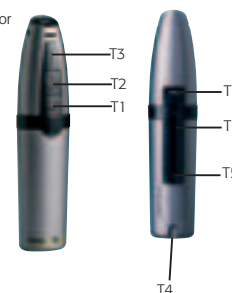


Ladestand

- C1:** Ladestand til sender
C2: Ladestand til modtager
C3: Lysindikator for strømforsyning og Bluetooth
C4: WDA kanalvælger
C5: Tast til Bluetooth og WDA forbindelse/kanal
C6: 6V DC strømforsyningsstik
C7: Lydingang til fjernsyn, radio, MP3, osv.
C8: Telefonindgangsstik
C9: Telefonudgangsstik

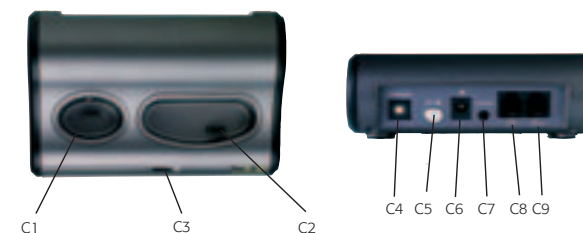

INDSTILLING AF VOLUMEN

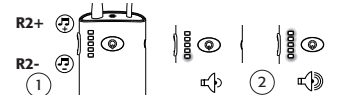

INDSTILLING AF VOLUMEN

- Tryk på modtagerknappen **R2+** (volumen op) eller **R2-** (volumen ned) for at finde et komfortabelt lydniveau.
- Modtagerens lysindikatorer **R3** til **R7** lyser afhængigt af volumenniveauet.

OPLADNING

Hvis senderens lysindikator **T1** eller modtagerens lysindikator **R5** blinker rødt under betjening, eller hvis enhederne ikke kan tændes, er det tid til at oplade senderen og modtageren.

- Placer senderen og/eller modtageren i henholdsvis **C1** og **C2**.
- Modtagerens lysindikator **R5** og senderens lysindikator **T1** lyser konstant rødt under opladningen.
- Når enhederne er fuldt opladet, lyser modtagerens lysindikator **R5** og senderens lysindikator **T1** konstant grønt.

OPLADNING

