

Freedom Bath



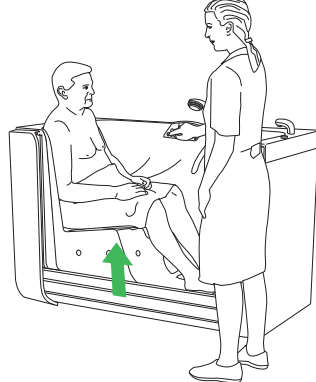

Badning og brusebadning af plejemodtageren

1




Tryk på dør ned-knappen for at sænke døren til dens laveste stilling. Hjælp plejemodtageren med at komme ind i badekarret.

2

Risiko for fastklemning

Badning: Hæv døren til topstillingen ved hjælp af dør op-knappen.
Brusebad: Lad døren være mindst 25 mm (1 tomme) nede i forhold til topstillingen for at holde afløbet åbent.

3



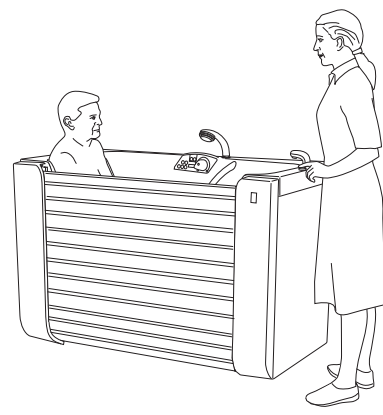
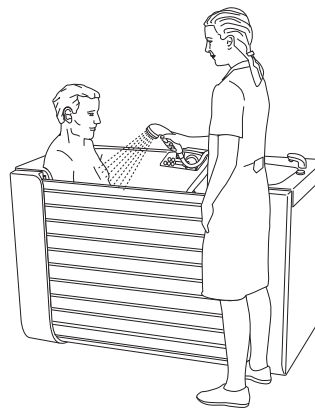


Tryk på dør tætnings-/afløbsknappen, hvorefter LED'en blinker grønt.

4



Ved korrekt oppustning lyser LED'en grønt konstant.

5

Risiko for skoldning

Mærk på vandet med hånden. Tilpas vandtemperaturen efter behov.

Badning: Fyld badekarret ved hjælp af badfyldeknappen.
Brusebad: Brug bruserknappen.

Afslutning af badet

6



Tryk på dørtætnings-/afløbsknappen én gang for at åbne afløbet.

7



Tryk igen for at lukke luften ud af tætningen. Mens trykket tages af tætningen, blinker LED'en grønt.

8



Tilvalg. Giv plejemodtageren brusebad. Sænk døren for at få lettere adgang til plejemodtageren.

9




Tryk på dør ned-knappen for at sænke døren til den laveste stilling. Hjælp plejemodtageren med at komme ud af badekarret.