



940TM Halsmikrofon

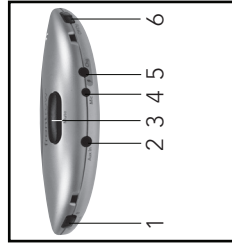


Funktioner

1. Kanalvælger
2. Aux-indgang
3. Mute knap (tryk for at afbryde/annullere afbrydelsen)
4. Stik til mikrofon
5. Stik til ladeledning
6. Tænd/sluk-knap

Isæt batteri

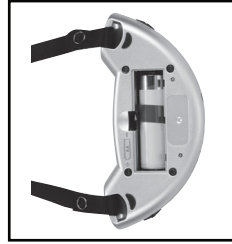

Opladning

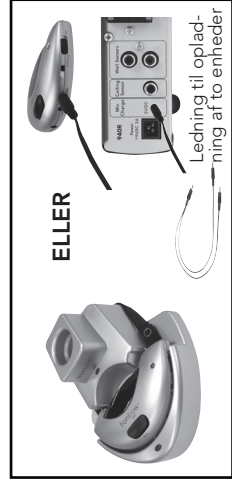

Inden mikrofonen tages i brug, bør batteriet være fuldt opladet. Derefter oplades batteriet dagligt.

950C lysindikator


Slukket: Holderen er tom

Rød: Oplader

Blinker **Rød:** Fejl eller ikke-genopladeligt batteri

Grøn: Fuldt opladet

Tænd for at sikre, at mikrofonen virker

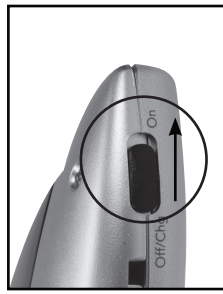

Lysindikator



Grøn: Tændt


Blinker **Grøn:** Mikrofon afbrudt

Blinker **Rød:** Lav batterikapacitet

Rød: Oplader med ladeledning


Slukket: Slukket/oplader ikke

AUX-indgang

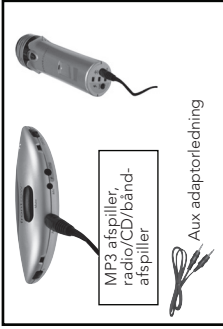


Tilslutning til andre medier via adaptorledning.



Brug af to mikrofoner

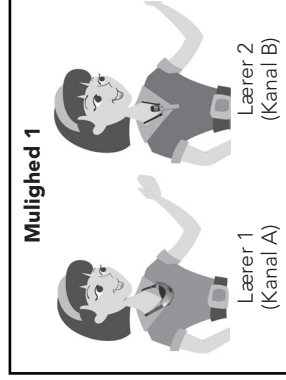

Mulighed 2

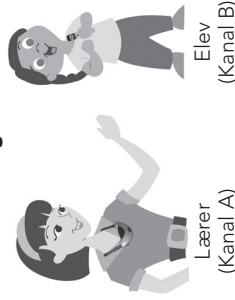


950H Elevmikrofon og 950C Ladestation

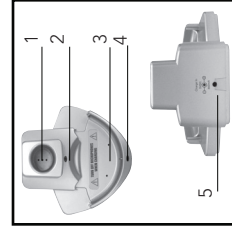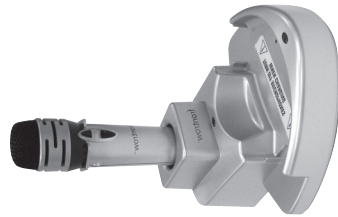

Funktioner

1. Ladeholder til 950H
2. Lysindikator for 950H
3. Ladeholder til 940 TM
4. Lysindikator for 940TM
5. Stik til strømforsyning

Tænd for at sikre, at mikrofonen virker

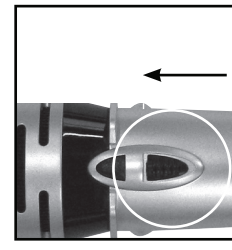

Opladning



Inden mikrofonen tages i brug, bør batteriet være fuldt opladet. Derefter oplades batteriet dagligt.

950C lysindikator


Slukket: Holderen er tom, eller batteriet er ikke genopladeligt

Rød: Oplader

Blinker **Rød:** Fejl


Grøn: Fuldt opladet

Isæt batteri

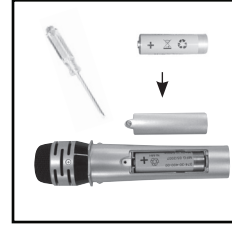

Funktioner

1. Sendediode (må ikke tildækkes)
 2. Tovejs lysindikator
- Grøn:** Tændt, sender
Rød: Lav batterikapacitet
3. Tænd/sluk-knap
 4. Batterirum

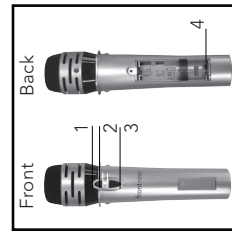

eping pinq



frontrow™
pro digital


Kontrolknapper

940R Pro Digital Modtager

- Strøm** Tænd/sluk
Grøn Tændt
Gul Stand by mode
- Mikrofon statuslys** Tændt
Grøn Mikrofon slukket/afbrudt
Rød
- Lydstyrke** Mikrofon A
- Lydstyrke** Mikrofon B
- Lydstyrke** PC/mp3/CD
- Lydstyrke** TV/Video/DVD
- OptiVoice**
Low - Miljø med lav baggrundsstøj
Med - Miljø med medium baggrundsstøj
High - Miljø med høj baggrundsstøj



Indgange / udgange

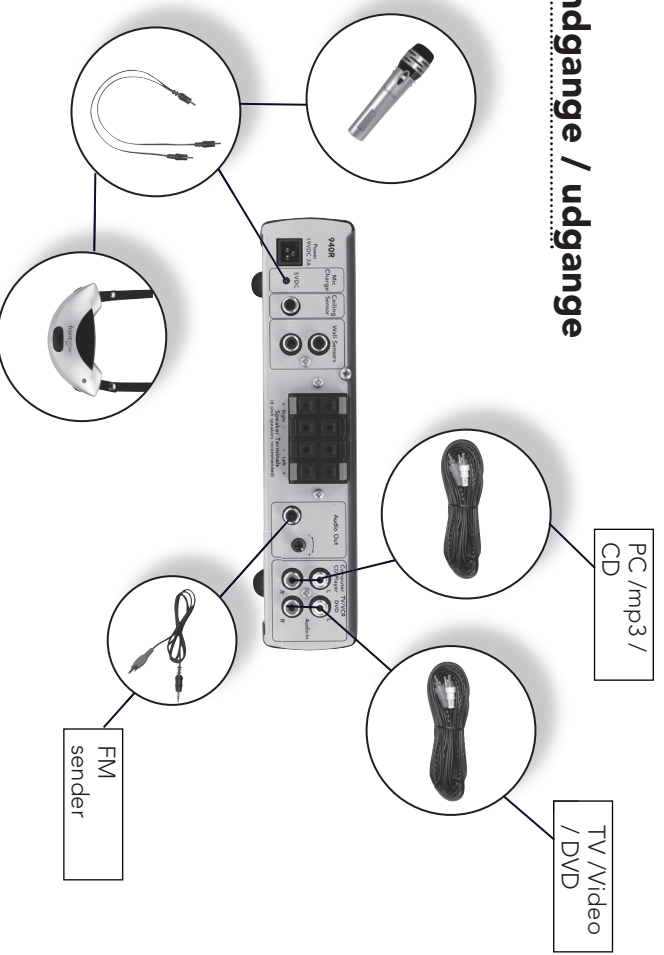

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
tlf.: 3917 7101
fax.: 3927 7900
web: www.gofrontrow.com
www.phonicear.dk