


# Likorall 200

## Brugsvejledning

Dansk

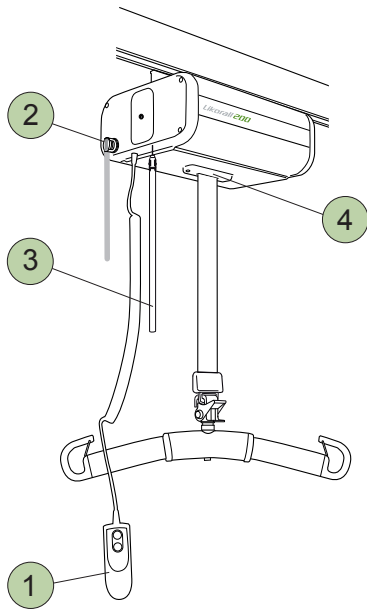

### Sikkerhedsforskrifter


- Læs brugsanvisningen for både lift og løfte-tilbehøret før anvendelse.
- Planlæg forflytningen nøje inden løftet.
- Inden brugeren liftes fra underlaget, men inden løftesejlets stropper er udstrakte, er det vigtigt at kontrollere at bånddøjerne er korrekt påhægtet på løftebøjlen.
- **Maks. last: 200 kg**

For at bibeholde maks. last kræves tilbehør som kan klare samme belastning eller mere.

### **i** VIGTIGT!


Denne brugsvejledning erstatter ikke liftens brugsanvisning, som kan downloades på [www.botved.dk](http://www.botved.dk).

### 1 Håndbetjening

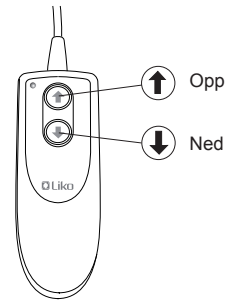

### 2 Nødstop


Aktivér:

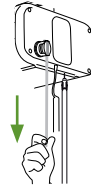


Deaktivér:



### 3 Elektrisk nødsænkning

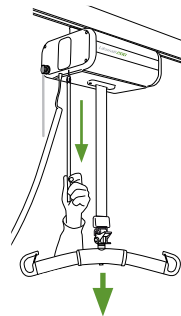


### 4 Afbryder

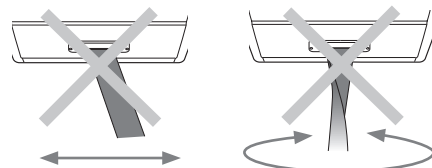


Liften afbrydes ved belastning skråt på løftebåndet eller hvis løftebåndet er vredet.

### Opladning af batterier

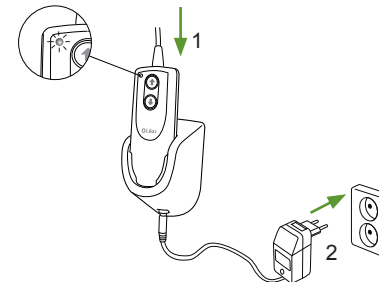


- Oplad liften regelmæssigt efter brug.
- Liften fungerer ikke under opladning.
- **Kontrollér at nødstopet ikke er trykket ind under opladning.**

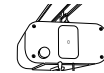


☀ Gult lys – oplad snarest!

((••)) Lydsignal – oplad snarest!

### Skift af løftetilbehør

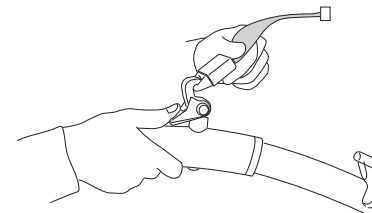

### Alternativ anvendelse

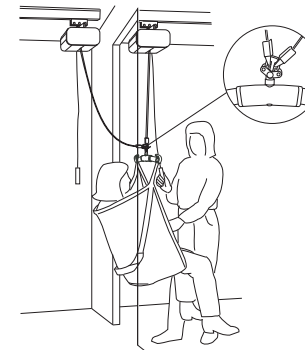

**i** Læs brugsanvisningen for mere information.

### Ergonomi

- Ingen manuelle løft – lad liften gøre jobbet.
- Stress ikke – arbejd stille og metodisk.
- Skån ryggen – arbejd i gangstående med ret ryg.
- Anvend sengens hæve- og sænke funktioner.
- Arbejd tæt på bruger og lift.

### Rengøring

Rengør liften efter behov, ved at tørre den med en fugtig klud opvredet med vamt vand eller sprit.

### Enkel fejlfinding

Kontroller at:

- nødstopet ikke er aktiveret, se ②
- batteriet er opladt.

### Øvrige brugsvejledninger

Brugsvejledninger til Likos lifte og løftesejl kan downloades på [www.botved.dk](http://www.botved.dk).

© Copyright Liko AB



A Hill-Rom Company

[www.liko.com](http://www.liko.com)

Liko AB  
SE-975 92 Luleå  
Sweden  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)