



Yes, you can.®






# SoftAIR®



Yes, you can.®

## Problemløsning i forbindelse med SoftAIR madrassystemerne

Den røde lampe lyser, og der udsendes en akustisk alarm for at angive, at der er fejl på pumpen eller madrassen. LED-lampen forbliver tændt, indtil fejlen er rettet. Den akustiske alarm kan slås på lydløs ved tryk på Alarm Mute-knappen. Systemet har forskellige alarmsignaler, der angives ved fem forskellige indstillinger. Signalerne og det tilhørende lampedisplay vises nedenfor.

Alarm/Fejl	Årsag	Løsning
 + akustisk alarm	Opstartsfejl	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil alarmen - sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm Mute".</li> <li>2. Kontrollér, at luftslangens håndtag er sat korrekt ind i pumpen. Kontrollér, at CPR strop er sat korrekt fast = ikke lækker.</li> <li>3. Kontrollér at alle luftslinger langs indersiden af madrassen sidder godt fast</li> <li>4. Kontrollér alle celler og rør for luftlækager.</li> <li>5. Kontrollér at luftfilter er placeret korrekt og at det er rent.</li> <li>6. Tænd for strømmen.</li> </ol>
 + akustisk alarm	Tryk for lavt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil alarmen - sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm Mute".</li> <li>2. Kontrollér, at luftslangens håndtag er sat korrekt ind i pumpen. Kontrollér, at CPR strop er sat korrekt fast = ikke lækker.</li> <li>3. Kontrollér at alle luftslinger langs indersiden af madrassen sidder godt fast</li> <li>4. Kontrollér alle celler og rør for luftlækager.</li> <li>5. Kontrollér at luftfilter er placeret korrekt og at det er rent.</li> <li>6. Tænd for strømmen</li> </ol>
 + akustisk alarm	Tryk for højt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil alarmen - sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm Mute".</li> <li>2. Frakobl luftslingerne for at reducere trykket - sæt dem på igen, når trykket er faldet.</li> <li>3. Kontrollér, om luftslingerne snor sig/kinker/klemmes af mellem madrassen og kontrolenheden.</li> <li>4. Tænd for strømmen.</li> </ol>
 + akustisk alarm	Ingen vekselstryk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nulstil alarmen - sluk for strømmen, og tryk på knappen "Alarm Mute".</li> <li>2. Frakobl luftslingerne for at reducere trykket - sæt dem på igen, når trykket er faldet. Vekselsmodus-fejl (Ingen vekslen)</li> </ol>
 + akustisk alarm	Strømsvigt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på knappen "Alarm Mute" for at slå lyden fra den akustiske alarm fra.</li> <li>2. Kontrollér, at ledningen sidder i stikkontakten og kontrolenheden, og kontrollér, at der er tændt for strømmen.</li> <li>3. Kontrollér kontrolenhedens sikring (1 AMP) - sikringen kan løsnes ved at presse en skruetrækker ind og dreje den.</li> </ol>

**Bemærk!** SoftAir filter skal skiftes én gang årligt samt når pumpen skal placeres hos ny borger

Yderligere information om problemløsning og betjening af SoftAIR madrasserne, se venligst brugermanualen. Brugermanual samt øvrig dokumentation kan frit downloades på Invacares hjemmeside [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

## Quick betjeningsvejledning for SoftAIR Super og SoftAIR Excellence

**OBS!** Det kræver tilvending at ligge på en dynamisk luft madras. Madrassen tilpasser sig den valgte indstilling henover 2 vekselstrykscykluser (20-25 min).

Kontroller altid den valgte indstilling af SoftAir madrassen – Før hånden ind under madrassen under borgerens sæde – der skal være min. 2 cm mellem sædeparti og hånd. Madrassen skal føles komfortabel for brugeren før denne forlades.

Minimum brugervægt: 30 kg  
Maksimum brugervægt: 180 kg

### Kom godt i gang:

- 1 Rul madrassen ud og placer den i sengen
- 2 Placer pumpen på sengens gavl (benenden)
- 3 Tilslut el-kabel (før ledningen igennem håndtag på siden af madras)
- 4 Lyn betrækket op i hovedenden og tjek at CPR slutter helt til  
- følg herefter nedenstående punkter:



= benende

### A Tænd/sluk - knap

Tænder og slukker for systemet. Pumpen fylder automatisk indtil den stopper på 90 kg. Madrassen fyldes på 30 – 45 min. Herefter kan madrassen indstilles.

### B Komfort – indstilling

Når madrassen er fyldt indstilles komfort niveau. Vælg pil op/ned indtil borgerens ca. vægt er fundet. Vent 20-25 min og undersøg så om borgeren er komfortabel og at borgeren ikke sidder madrassen igennem (se instruks øverst på siden).

### C Valg mellem vekselstryk eller statisk tryk

Tryk her for at vælge enten vekslende tryk (cellerne skiftevis oppustes og tømmes for luft) eller statisk indstilling (cellerne er uden dynamisk vekslen). Den statiske indstilling slår automatisk fra og genindstiller vekselstrykfunktion, efter ca. 20 min.

### D Alarmlampe

Denne røde lampe lyser, og der udsendes en akustisk alarm for at advare om, at pumpen eller madrassen er fejlbehæftet. Alarmen har fem forskellige signaler til angivelse af årsagen til fejlen

### E Knapen "Alarm Mute"

Slår den akustiske alarm til/fra. Den akustiske alarm genoptages efter 20 minutter, såfremt fejlen ikke er blevet rettet.

### F Max. fyldnings-knap

Tryk her for at starte hurtig oppustning til maksimal/plejefunktion. Efter 30 minutter vender systemet automatisk tilbage til den foregående indstilling.

### G Lås/Lås op-knap / børnesikring

Holdes inde i mindst 5 sekunder for at låse pumpens indstillinger - der høres et bip, og den gule lampe lyser for at angive, at systemet er låst. I låst tilstand kan man kun betjene knapperne til Alarm Mute og Lås/Lås op. Hold knappen inde i mindst 5 sekunder for at låse enheden op (der høres et bip, og den gule lampe slukkes)

### OBS! Pumpen låses automatisk op i tilfælde af strømsvigt.

- Dette udstyr må ikke anvendes ved tilstedeværelse af brandbare bedøvelsesmidler.



- Minimér antallet af ting imellem systemets overflade og patienten, og læg lagner løst på (fæstet i hjørnerne), så de ikke påvirker vekselscellernes bevægelse.

