

Carebed anvendt sammen med helbetræk med skum

Helbetrækket placeres på sengens liggeflade med skummet nedad (se vejledning på betrækket)

Skummadrasen skal være placeret i en indvendig lomme i betrækket.

Betrækkets lynlås åbnes. **Carebed** placeres i betrækket ovenpå den afdækkede skummadras.

Det er mest praktisk at vende **Carebed** åbningen opad, men det har ingen funktionel betydning hvilken vej den vender i betrækket.

Skrue den grønne prop af og sæt fyldningspumpen til.

Tænd for fyldningspumpen og lad denne fylde luft i madrassen i ca. 1 minut.

Skrue den grønne prop på igen- husk at dreje proppen en ekstra kvart omgang.

Bemærk

Borgeren kan ligge på madrassen mens denne fyldes.

Undersøg om madrassen er korrekt fyldt ved at føre en hånd ind under sædepartiet mellem skummadras og **Carebed** – Der skal være min. 2 cm mellem sædet og hånd.

Kontroller dagligt at borgeren ikke sidder madrassen igennem.

Tømning

Skrue den grønne prop af og træk den røde ventil ud. Madrassen er tømt på få sekunder.



CAREBED

Quick betjeningsvejledning for Carebed



Yes, you can.®



Opstart

Carebed udrulles og placeres ovenpå en egnet skummadras (minimum 5 cm høj) på sengens liggeflade. Anbring hjørnestropperne omkring skummadrasen.

Skrue den grønne prop af og sæt fyldningspumpen til. Tænd for fyldningspumpen og lad denne fylde luft i madrassen i ca 1 minut.

Skrue den grønne prop på igen- husk at dreje proppen en ekstra kvart omgang.

Borgeren kan ligge på madrassen mens denne fyldes.

Undersøg om madrassen er korrekt fyldt ved at føre en hånd ind under sædepartiet mellem skummadras og **Carebed** – Der skal være min. 2 cm mellem sædet og hånd.

Kontroller dagligt at borgeren ikke sidder madrassen igennem.



Yderligere information om problemløsning og betjening af **Carebed** madrassen, se venligst brugermanualen. Brugermanual samt øvrig dokumentation kan frit downloades på Invacares hjemmeside www.invacare.dk



Yes, you can.®