

# Brugsanvisning

ROHO® DRY FLOATATION®

ELLER SOFFLEX® 2

TOPMADRASSER





## INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE AF ROHO® DRY FLOATATION® ELLER SOFFLEX® 2 TOPMADRASSER

Tillykke med valget af en ROHO DRY FLOATATION / SOFFLEX 2 madras. Formålet med indstilling af madrassen er at "nedsænke" brugeren så dybt som muligt i madrassen uden at berøre bunden. Dyb nedsænkning kan opnås ved at have så lille lufttryk som muligt i madrassen.

## SÅDAN INSTALLERES MADRASSEN

1. Læg madrassektionerne på den eksisterende madras og saml dem med tryklåsene. (ROHO® DRY FLOATATION® madrassen har 2 ventiler, husk derfor at lukke den ene ventil til)
2. Pump nu luft i sektionerne indtil madrassen buler let opad og lad herefter luften sive ud, til du hverken kan mærke eller høre ud-sivning. Luk herefter ventilerne. Madrassen har nu atmosfærens tryk
3. Læg evt. et madrasbetræk og et lagen løst på, og placer brugeren på madrassen liggende på siden. Hvis brugeren aldrig ligger på siden, vælges rygleje
4. Start med at kontrollere området ved hoften ved at lægge en hånd mellem brugerens hofteben/ bækken og madrassen. Nu lukkes luften langsomt ud indtil brugeren synker ned i madrassen og der er ca. 1½ - 2 cm mellem bruger og madrassens bund
5. Samme procedure gennemføres for skulderpartiet. Vend brugeren til rygliggende og indstil området under hælene. Området under bækkenpartiet bør også kontrolleres i denne stilling

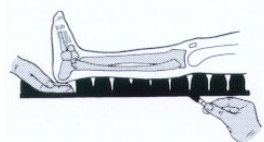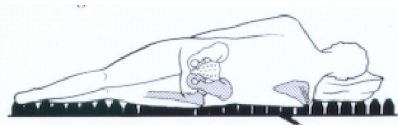

Så er madrassen klar og yder nu den maximale beskyttelse. For til stadighed at sikre en optimal funktion kontrolleres luftmængden kvartalsvis, ved at mærke efter under ovennævnte særligt udsatte steder.

**Tip:** Træk en plastpose over hånden, når du skal kontrollere luftmængden mellem madras og bruger.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør 1 sektion ad gangen
- Luk ventilerne og læg evt. madrassen i blød i koldt vand

- Brug en blød børste og et rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel og varmt vand og rengør forsigtigt madrassen
- Skyl omhyggeligt og lad tørre
- Lugt af røg kan fjernes fra ROHO madrassen ved at bruge en blanding af 1 del eddike til 9 dele vand. Lugt af urin kan fjernes ved brug af Ph. neutral skyllemiddel i 4 x normal dosis. Efter at have fjernet lugten, rengøres som ovenfor beskrevet.

Madrasbetrækket kan vaskes ved 80° og tørretumbles ved lav varme.

Madrassektionerne bør tjekkes dagligt for punktering. Mærk langs kanten på alle sektionerne, at de er luftfyldte, når brugeren ligger på madrassen!

## REPARATION

Der er vedlagt lappegrej

1. Læg madrassektionen med cellerne nedad og pump den så meget op, at sektionen begynder at bue. Luk ventilen
2. Sænk madrassektionen med lukkede ventiler ned i vand for at finde lækken
3. Lækken kan evt. markeres med en tandstikker
4. Lad madrassen blive helt tør
5. Rens området omkring hullet med alkoholkluden, som er i reparationssættet. Lad overfladen blive helt tør
6. Træk filmen af den medfølgende lap og sæt den på og pres
7. Saml madrassektionerne igen og indstil madrassen

## OBS!

Brug ikke oliebaseerede cremer eller produkter med lanolin på legemsdele, som kommer i kontakt med madrassen, da disse produkter kan forårsage ødelæggelse.