

# Vaskeanvisning - Lasal Flydepuder

Skyl Lasal Flydepudernes yderside rene for klor med rigeligt rent, ikke-klorholdigt vand efter brug.

Hæng flydepuderne til tørring. Den blå netside vendes nedad, så vandet frit kan løbe ud af flydepuden. Flydepudernes tørringstid er lang.

Flydepuderne kan håndvaskes med vand og sæbe eller sprittes af med et desinficeringsmiddel.

Vær opmærksom på, at pH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel ikke bør være højere end 11,4.

Flydepuderne kan ved behov maskinvaskes på 60°C. Flere af flydepuderne er så store, at de kræver vask i en industrivaskemaskine. Det gælder bananformet flydepude i str. M og L.

⚠ Flydepuderne skal - uanset størrelse - altid vaskes i en vaskepose med fint net. Hvis pudens fyld kommer ud i tromlen, kan det ødelægge vaskemaskinen.

⚠ Flydepuder må ikke tørretumbles, men gerne tørre i tørreskab på max. 60°C.

⚠ Temperaturer over 70°C ødelægger fyldet, da polystyrenkuglerne smelter over 71°C.

⚠ Undgå blegemidler, skyllemidler og andre rengøringsprodukter, som indeholder opløsningsmidler.



T-formet flydepude, S + L



Nakkeflydekrave, S + L



U-formet flydepude



Bananformet flydepude, S + M + L



Badeblomst, S + L



Flydestabilisator, S + L



Halsflydekrave, XS + S + M + L

