

Gode råd

For at opnå de bedste resultater og undgå problemer ved daglig brug, anbefales det at følge nedenstående gode råd.

Generelt:

- Tag ikke et batteri ud af styringen før tidligst 2 sekunder efter at den sidste aktuator er stoppet. I modsat fald skal stolen kalibreres ved at holde de to nederste knapper nede, indtil stolens position er i bund.
- Såfremt sikkerstermostaten i batteriet aktiveres ved overbelastning, skal batteriet køle af i mindst en halv time, før det igen kan anvendes. Efter 1 minut kan et nyt batteri sættes i styringen.
- Såfremt to eller flere aktuatorer, som kører parallelt, er kørt skæve, vil styringen lukke ned for dem. I så fald skal stolen kalibreres ved at holde de to nederste knapper på fjernbetjeningen nede, indtil stolen er i bundposition, og dermed kalibreres.

Fejlsøgning

Såfremt der opstår problemer eller uregelmæssigheder bør følgende punkter gennemgås evt. i samråd med en tekniker.


- Kontrollér, at alle stik sidder korrekt i styringen og ved aktuatorerne, fjernbetjening, samt mellem batteri og styring.
- Såfremt aktuatorerne ikke kan køre, bør der gennemføres en 0-punkts kalibrering, ved at holde fjernbetjeningens to nederste knapper nede, indtil stolen er i bundposition og derved kalibreret.

1. Ved lade-fejl, blinker den gule diode på batteriet.
 - For afhjælpning, tag strømstikket ud af kontakten, vent 2 minutter og sæt i igen.
2. Hvis alle dioder blinker, er der en fejl på stolen, og den skal nulstilles. Alle aktuator skal køres i deres "Nulstilling", hvis det er muligt.
3. Ved anden fejl kontakt forhandleren.

Batteri fuldt opladet:

Alle 3 dioder er tændt

Status	Batteri
Fuldt opladet	>85%
Medium opladet	85 - 40%
Næsten tomt	40 - 20%

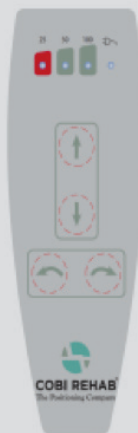

Fjernbetjening til stol

For kalibrering/reset af stolens bevægelser: Hold de to nederste knapper nede, indtil stolens position er i bund.

Find den udvidede brugsanvisning på www.cobirehab.com

QUICK guide



COBI REHAB®
The Positioning Company

Opladning og elektrisk system XXL-Rehab Rise N Tilt badetoiletstol

Klargøring

Inden systemet kan anvendes, skal batteriet lades op. Dette sker ved brug af den medfølgende lader. Det tager op til 10 timer at lade et batteri helt op.

Når kontrolboksen med batteri tilsluttes lysnettet, kommer der lys i den gule diode på batteriet. Når batteriet er opladt, slukkes den gule diode.

Efter endt opladning lyser alle de tre dioder på fjernbetjeningen på samme tid.

Det anbefales at stolen (med batteri) oplades hver dag, hvor stolen har været i anvendelse.

Normal drift

Under normal drift styres aktuatorerne ind og ud med de relevante knapper på fjernbetjeningen. Der kan opstå situationer, som kræver en bestemt handling. Disse situationer er beskrevet i det følgende.

Lavt batteriniveau

Når der kun er 25% tilbage af batteriet, kan stolen kun køre ned. Dette sikrer at brugeren altid kan komme ned og dermed ud af stolen.

Hård belastning af batteri

Såfremt batteriet belastes meget hårdt med gentagne kørsler umiddelbart efter hinanden, kan det blive for varmt og derved aktiveres sikkerstermostaten inde i batteriet. Styringen lukkes ned, og batteriet skal køle af i mindst en halv time, inden det igen kan anvendes. Der skal gå mindst 1 minut, før et andet batteri kan sættes i styringen.

Det anbefales derfor altid at have et opladet batteri til rådighed, når systemet skal anvendes.



Batteri.