

Vaskeanvisning - Cobi hygiejnepuder

Hygiejnepudens kerne tørrer langsomt, derfor skal puden tørre hurtigst muligt efter brug.

Hæng hygiejnepuden op et lunt sted og lad den tørre helt. Pudens hænges op med den blå side nedad, så vandet kan løbe fra.

Hygiejnepuderne kan håndvaskes med vand og sæbe eller sprittes af med et desinficeringsmiddel.

Vær opmærksom på, at pH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel ikke bør være højere end 11,4.

Hygiejnepuderne kan ved behov maskinvaskes på 60°C. Flere af flydepuderne er så store, at de kræver vask i en industrivaskemaskine. Det gælder fx bananformet hygiejnepude i str. M og L.

⚠ Hygiejnepuderne skal – uanset størrelse – altid vaskes i en fintmasket vaskepose. Hvis pudens fyld kommer ud i tromlen, kan det ødelægge vaskemaskinen.

⚠ Hygiejnepuder må ikke tørretumbles, men gerne tørre i tørreskab på max. 60°C.

⚠ Temperaturer over 70°C ødelægger fyldet, da polystyrenkuglerne smelter over 71°C.

⚠ Undgå blegemidler, skyllemidler og andre rengøringsprodukter, som indeholder opløsningsmidler.



Banahygiejnepude L



Banahygiejnepude M



Nakkehygiejnepude



Banahygiejnepude S



T-hygiejnepude L



T-hygiejnepude S



Halvmånehygiejnepude

