


Sammenfoldning og udfoldning af kørestol

"Dolphin" kan enkelt sammenfoldes og udfoldes.

For at sammenfolde løftes fodpladerne op, og derefter hives sædet opad. For at udfolde presses på begge de rør, hvor sædet er monteret. Undgå at placere hånden mellem rørene og rammen, da fingrene så kan komme i klemme (se tegning til højre).


OBS! Klemningsfare! Pas på når stolen sammenfoldes eller udfoldes, at fingrene ikke placeres mellem rørene der holder sædet og rammen.

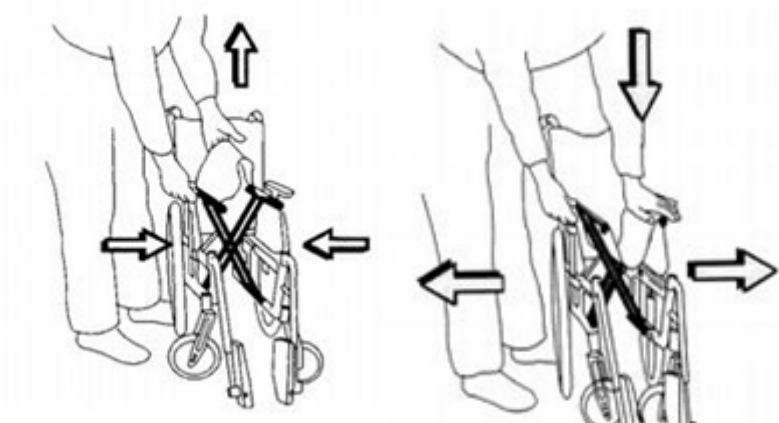

Løftning af kørestolen

Kørestolen løftes ved at tage i kørehåndtagene samt forenden af rammen hvor fodstøtterne er placeret.

OBS! Kørestolen må ikke løftes i armlænen eller fodstøtter.

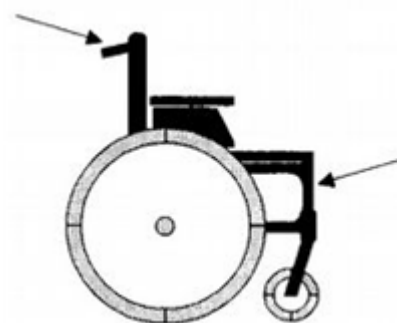

Anvendelse af kørestolen

Indlæring af teknikker til at forflytte brugeren skal ske under opsyn af kvalificerede personer. Nedenfor angives kun vore anbefalinger.

Forflytning af brugeren fra kørestolen til en seng

- Kør kørestolen så tæt på sengen som muligt med forhjulene parallelt med sengen.
- Aktiver bremserne, løft armlænene op på den side af kørestolen der vender mod sengen.
- Foretag forflytning, idet hjælperen forsøger at løfte så lidt som muligt med ryggen, men i stedet bruger lårmusklerne.

Forflytning af brugeren fra en seng til en kørestol

- Kør kørestolen så tæt på sengen som muligt med forhjulene parallelt med sengen.
- Aktiver bremserne, løft armlænene op på den side af kørestolen der vender mod sengen. Løft fodpladerne. Det er vigtigt at patienten ikke står ned på fodpladerne da stolen derved kan kippe.
- Foretag forflytning, idet hjælperen forsøger at løfte så lidt som muligt med ryggen, men i stedet bruger lårmusklerne.

