



Quickguide

Trykvogteren Hybrid

HMI NR. 107046

HYBRIDMADRAS TIL FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF TRYKSÅR T.O.M. STADIE 4

1. Læg madrassen på sengen.
2. Hæng pumpen på ende gavlen (fodenden), ved hjælp af de to ophæng, eller stil pumpen på et fast underlag ved siden af sengen.
3. Klik slangerne fra madrassen fast på pumpen. Når der høres et "klik", er slangerne koblet korrekt på pumpen.
4. Sæt strømstikket til og tænd for pumpen.
5. Pumpen fylder nu madrassen. Der kan ikke stilles på pumpen før madrassen er fyldt.
6. Når madrassen er helt fyldt (fast) vil pumpen gå på ALTERNATE og stille sig på sidst indstillede komfort.
7. Indstil komforten i madrassen ud fra brugerens ønske.
8. Indstil den ønskede terapi funktion.

Indstillinger

Trykvogteren Hybrid

HMI NR. 107046

HYBRIDMADRAS TIL FOREBYGGELSE OG BEHANDLING AF TRYKSÅR T.O.M. STADIE 4

Tryk/komfort:	Regulering af madrassens hårdhed. Indstil efter brugerens ønske for komforten. Lav altid HÅNDTESTEN.
Terapiform	Indstil den ønskede terapi ved at trykke på knappen, indtil der er lys ved det ønskede.
AUTOFIRM	Bruges ved pleje/vende. Madrassen bliver hel fast/hård så det er lettere at arbejde. Denne funktion holder i 20 minutter. Herefter vender pumpen tilbage til ALTERNATE og den tidligere valgte komfort indstilling.
ALTERNATE	Vekseltryksfunktion med skiftende tryk i madrassens luftceller.
FLOAT	Stillestående/statisk funktion. Denne funktion holder i 20 minutter. Herefter vender pumpen tilbage til ALTERNATE og den tidligere valgte komfort indstilling.
AUDIBLE ALARM ON/OFF	Opstår der en fejl kan det høres og ses på pumpen. Lyden kan slås fra ved at trykke på ALARM-knappen. Hvis fejlen ikke rettes i løbet af 5 minutter starter alarmen igen.