


# Bækkenbælte Installation Brugervejledning

da

ART NOS. HB2, HB4, LB2, LB4, NB2 & SB2

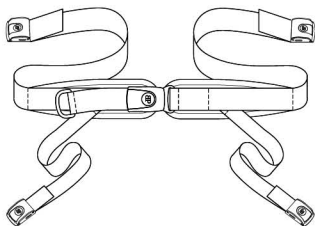

Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om sikker brug og vedligeholdelse af alle Bodypoint-bækkenbælter. Giv denne brugervejledning til brugeren eller til dennes plejepersonale, og gennemgå den nøje, for at sikre at instrukserne er forstået.

**⚠ ADVARSEL!** Produktet skal installeres og monteres af en kvalificeret person.

#### Brug:

**⚠ ADVARSEL!** Dette produkt bør kun anvendes til at placere en person i en kørestol eller kontorstol. Det må IKKE anvendes som sikkerhedsudstyr under transport, som personligt fastholdelsesudstyr eller til noget andet formål, hvor det kan forårsage tilskadekomst, såfremt det svigter. Misbrug af dette produkt er hverken godkendt eller sikkert.

**⚠ ADVARSEL!** Dette bækkensupportbælte skal konstant være stramt tilpasset henover den nedre del af bækkenet eller over lårene. Et løst bælte kan forårsage at brugeren glider ned, og derved kan der opstå risiko for strangulering. Få din specialist til at demonstrere anordningens korrekte justering og brug.

(Bemærk: Bælter med fire punkter kan bæres på det øvre bækkenparti, hvis de sekundære remme forankres for at forhindre, at de forskubber sig.)

**⚠ ADVARSEL!** Utilsigtet frigørelse af bækkensupportbæltet kan forårsage, at brugeren glider ned eller falder ud af kørestolen. Hvis brugerens bevægelser eller kognitive evner kan medføre utilsigtet frigørelse, skal der være en plejeassistent til stede under hele perioden, hvor det anvendes. Sørg for, at plejeassistenten forstår at løse produktet. Hvis ikke, kan dette forårsage forsinket frigørelse i en nødsituation.

**⚠ ADVARSEL!** Som med hvilken som helst

ny sidde-support, kan dette produkt ændre den måde en person sidder på. Brugere skal fortsætte med at udøve regulære tryklindrende aktiviteter og få kontrolleret hudintegriteten, ikke kun på det område hvor dette produkt har kontakt med brugeren, men også på de primære trykbærende områder såsom sakrum (korsbenet), benene og bagdelen. Hvis der forekommer øget rødme eller irritation, ophør brug og kontakt din læge eller siddepecialist. Undladelse af dette kan resultere i alvorlige skader, som f.eks. tryksår.

**VEDLIGEHOLDELSE:** Check regelmæssigt syningerne, remmene og polstringerne for tegn på slid. I tilfælde af betydeligt slid skal man kontakte sin forhandler ang. kvalificere reparation eller udskiftning af Bodypoint. Af hensyn til sundhed og sikkerhed må produktet under ingen omstændigheder ændres eller er repareres af ukvalificerede personer.

**RENGØRING:** Tåler maskinvask ved 40°C (100°F). Må ikke bleges. Tørretumbles ved lav temperatur eller ved lufttørring. Må ikke stryges. (Ridser i produktet og vaskemaskinen kan forhindres, ved at anbringe produktet i en stofpose ved vask.)

**GARANTI:** Med dette produkt følger en begrænset livstidsgaranti mod defekter på fabrikation og materialer, der opstår under normal brug af den oprindelige køber. Kontakt Deres Bodypoint-forhandler ved garantisager.


Der kan indhentes yderligere oplysninger om Bodypoint-produkter, samt en liste over distributører udenfor USA, på [www.bodypoint.com](http://www.bodypoint.com)

 **Bodypoint**<sup>®</sup>

**EC REP**


MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover  
Germany

**CE**

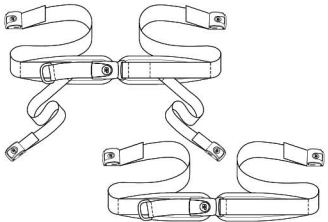

**PAKKENS INDHOLD**

- Bækkenbælte
- Cinch-Mount™- eller Flat-Mount™-endestykker
- FrameSaver™ klemmer (Option)



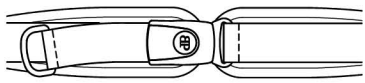


**INSTALLATION**

På bækkenbæltet med puder skal remmene justeres så stramt at puderne kommer i kontakt med hinanden. I tilfælde af bækkenbæltet uden puder skal man trække 10-15 cm rem gennem spændet.


**BÆKKENBÆLTE MED TO PUNKTER**

1. Find et passende forankringspunkt.
2. Monter FrameSaver og Cinch-Mount på rullestollens stel
3. Placer bæltet midt på bækkenpartiet og før remmens ende gennem Cinch-Mount
4. Stram remmen.

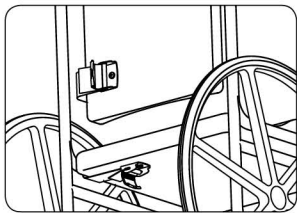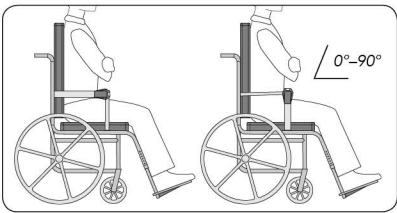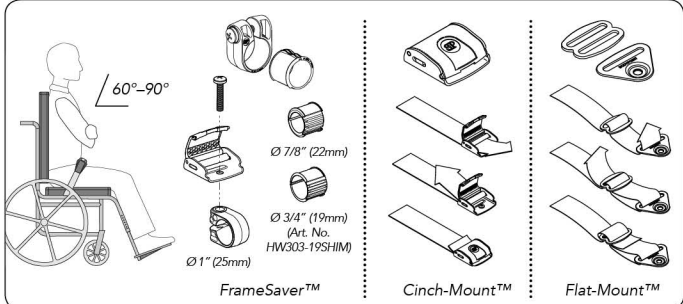


**BÆKKENBÆLTE MED FIRE PUNKTER**

1. Find passende forankringspunkter.
2. Følg installationsvejledningen oven for i justering af de primære remme.
3. Monter de sekundære remme på stolen, således at de forankrer de primære remme.
4. Stram de sekundære remme for at forhindre bevægelse af de primære remme.

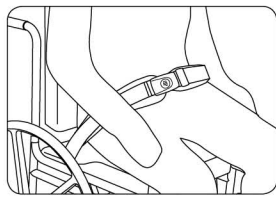

**DIREKTE MONTERING**

Endebeslagene kan sættes direkte på faste sædeoverflader. Monteringskruerne skal mindst kunne holde til et træk på 90 kg/200 lbs. (Ikke inkluderet i pakken).

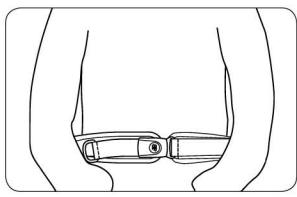

**JUSTERING**

Når de er korrekt tilpassede og bæltet strammet, vil de sidde tæt, således at brugerens bækkenparti sikret. På pudebæltet skal man stramme remme med D-ringen, således at den udspringes helt og puderne under spændet er i kontakt med hinanden. Hvis det er nødvendigt at justere længden for at opnå den rette pasform eller tage bæltet af ved rengøring, kan dette gøres vha. bæltets endestykker.

**SIKKERHEDSTJEK**

Når brugeren sidder korrekt i kørestolen, bed ham/hende om at læne sig forover og til siderne for at kontrollere pasformen. Kontroller:

1. At spændet og justeringsremmene fungerer korrekt.
2. Komfort – se efter områder, der er til gene.
3. Position – juster forankringspunkterne, hvis denne er for høj eller for lav.
4. Berøring med andet udstyr – Flyt evt. forankringspunkterne.
5. Flyt stolen i alle bevægelsesretninger, heriblandt vipning, sammenklapping og rulling. Kontroller for berøring med andet udstyr.