

Anvendelse af kørestolen

Indlæring af teknikker til at forflytte brugeren skal ske under opsyn af kvalificerede personer. Nedenfor angives kun vore anbefalinger.

Forflytning af brugeren fra kørestolen til en seng

- Kør kørestolen så tæt på sengen som muligt med forhjulene parallelt med sengen.
- Aktiver bremserne, løft armlænene op på den side af kørestolen der vender mod sengen.
- Foretag forflytning, idet hjælperen forsøger at løfte så lidt som muligt med ryggen, men i stedet bruger lårmusklerne.

Forflytning af brugeren fra en seng til en kørestol

- Kør kørestolen så tæt på sengen som muligt med forhjulene parallelt med sengen.
- Aktiver bremserne, løft armlænene op på den side af kørestolen der vender mod sengen. Løft fodpladerne. Det er vigtigt at patienten ikke står ned på fodpladerne da stolen derved kan kippe.
- Foretag forflytning, idet hjælperen forsøger at løfte så lidt som muligt med ryggen, men i stedet bruger lårmusklerne.



Tilbehør

Dolphin kørestolen kan leveres med følgende tilbehør:

- ✓ Anti-tip
- ✓ Transferhjul
- ✓ Sikkerhedssele
- ✓ Tromlebremser
- ✓ Vinkel- og højdejusterbare benstøtter
- ✓ Indstillelig ryg (Velcro-ryg)

Dolphin kørestol med tromlebremser

Transport af kørestolen

Hvis det er muligt bør kørestolen transporteres i bagagerummet i bilen. Hvis dette ikke er muligt bør den placeres mellem forsædet og bagsædet. Det skal sikres at kørestolen er fastgjort så den ikke kan flytte sig. Evt. kan den fastgøres med en sikkerhedssele.

OBS! Kørestolen er ikke et bilsæde! Under transport må kørestolen ikke benyttes som et sæde. Kørestolen skal være sammenfoldet og være fastgjort.

OBS! Kørestolen må ikke løftes i armlæn eller fodstøtter

