

Funktionsbeskrivelse

- Juster højden af skubbehåndtagene sådan at håndtagene er i håndledshøjde når brugeren står med armene langs siden. Dette vil betyde at armene er i en 20°-30° vinkel når rollatoren bruges. Juster længden af skubbehåndtagene ved at løsne og aftage stjernegrebene, placere skubbehåndtagene i den ønskede højde og placere stjernegrebene igen og stramme til. Kontroller at kørehåndtagene er korrekt fastspændte og stabile.
- Kontroller at rollatoren er korrekt samlet og at låsemekanismen er i indgreb, samt at ingen dele sidder løst før rollatoren bruges.
- For at bremse rollatoren trækkes opad i bremsegrebet. Grebet løsnes for at frigøre bremsen igen.
- Når rollatoren anvendes til at sidde på i parkeret tilstand SKAL bremserne blokeres. Dette gøres ved at trykke ned på bremsehåndtaget. Bremserne bør altid være blokerede når rollatoren parkeres, specielt hvis terrænet ikke er jævnt.



Transport beskrivelse

Rollatoren kan enkelt foldes sammen for transport. Rollatoren bør lægges i bagagerum eller spændes fast under transport i en bil.