

Funktionsbeskrivelse for Kudu rollator

- Juster højden af skubbehåndtagene sådan at håndtagene er i håndledshøjde når brugeren står med armene langs siden. Dette vil betyde at armene er i en 20°-30° vinkel når rollatoren bruges. Juster længden af skubbehåndtagene ved at løsne og aftage skruehåndtagene, placer skubbehåndtagene i den ønskede højde og monter skruehåndtagene igen og stram til. Kontroller at kørehåndtagene er korrekt fastspændte og stabile.
- For at bremse rollatoren trækkes opad i bremsegrebet. Grebet løsnes for at frigøre bremsen igen.
- For at låse bremserne, skubbes bremsehåndtaget nedad til et "klik" høres. For at løsne bremsen trækkes håndtaget opad og man kan skubbe rollatoren igen.
- Når rollatoren anvendes til at sidde på i parkeret tilstand SKAL bremserne blokeres. Dette gøres ved at trykke ned på bremsehåndtaget. Bremserne bør altid være blokerede når rollatoren parkeres, specielt hvis terrænet ikke er jævnt



Transport

Rollatoren kan enkelt foldes sammen som beskrevet for transport. Rollatoren bør lægges i bagagerum eller spændes fast under transport i en bil.