

QUICK GUIDE TIL IRIS



Lindevej 2, DK-4200 Slagelse
CVR-nr. 34578885, Tel: 58 55 10 99
kontakt@carepartner.dk

carepartner.dk

SENGEHESTE



Sengeheste frigøres ved at løsne de sorte plastikbeslag (træk udad).

For at fastlåse dem, løft da sengeheste helt op. Herved klikkes de automatisk på plads i de sorte plastikbeslag.


SIKRING HOVEDSTØTTE




For at slå hovedstøttesikringen ned, skal den løftes og vippes nedad. Et plastikbeslag gør det muligt at fastlåse den under lejet.

Gør det modsatte for at sætte hovedstøttesikringen på plads igen.


OP / NED

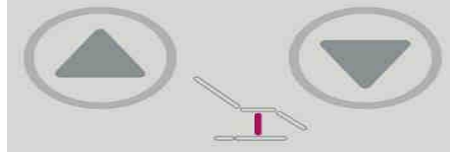

ELEVATION OVERKROP

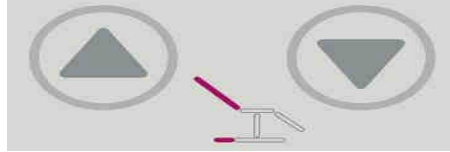

ELEVATION UNDERKROP

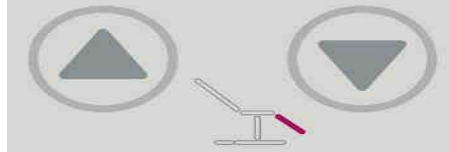

SYNKRONISERET ELEVATION



VEJLEDNING BREMSE/PEDAL



Bremse-/styrepedaler er placeret på begge sider af stellet og har 3 positioner:

- RØD – bremse aktiveret
- MIDT – bremse deaktiveret
- GRØN – retningsbestemte hjul

ON / OFF KNAK

For at undgå, at batteriet aflader, tryk på OFF-knappen i lidt mere end 3 sek., så snart enheden ikke længere er i brug.



For at tænde batteriet, tryk da på ON-knappen i lidt mere end 1 sek.

Batterilys/batterikapacitet:
GRØN (langsomt blinkende): > 80 %
BLINKER GRØNT (langsomt 1s/1s): < 80 %
BLINKER GRØNT (længde 0,5s/4s): > 25 %
BLINKER ORANGE (længde 0,5s/4s): < 25 %
SLUKKET: < 20 % - **batteriet skal oplades!**
ORANGE: batterifejl

NØDSTOP



For at frigøre nødstoppet, drej da i retning af pilene angivet på toppen af den røde knap.

Tryk derefter på ON-knappen på batteriet.

ANVENDELSESINSTRUKTION

IRIS Bruseleje bør kun anvendes til forflytning eller brusebad af patienter.

IRIS har en MAX belastning på 160 kg.

IRIS er beregnet til indendørs brug, på fast jævnt underlag med en hældning på mindre end 5°.

IRIS må kun anvendes med den madras, der er leveret til formålet.

Anvend IKKE IRIS, hvis madrassen er beskadiget!

Anvend KUN den batterioplader, som følger med enheden!

Oplader og ladestander må KUN tilsluttes 220/230V AC-stikkontakt placeret i et tørt miljø!

Oplad IKKE IRIS i et vådt område.

BATTERIOPLADNING



Placér batteriet i ladestanden. Sæt opladerstikket i stikkontakten. Det grønne LED-lys på siden af stikket indikerer, at den er tændt. Tilslut opladeren til en 230V stikkontakt. LED-lyset på opladeren angiver batteriets status:
Gul LED: Batteriopladning
Grøn LED: Batteri er opladet
Samlet opladningstid: 3-6 timer

SIKKERHEDSINSTRUKTION


Placér **IKKE** patienten for enden af lejet!

Fyld **IKKE** madrassen med vand!

Blokér IKKE udstigningen af IRIS! **Vægten af vand kan forårsage, at lejet tilter.**

Kontrollér visuelt og manuelt pallåsen før hver brug!

Tjek bremserne, før en forflytning!

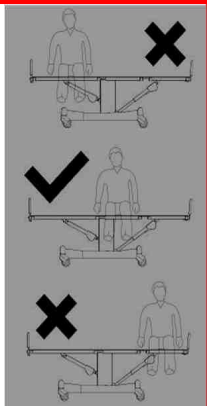

QUICK GUIDE TIL IRIS



Lindevej 2, DK-4200 Slagelse
CVR-nr. 34578885, Tel: 58 55 10 99
kontakt@carepartner.dk

carepartner.dk

SENGEHESTE



Sengeheste frigøres ved at løsne de sorte plastikbeslag (træk udad).

For at fastlåse dem, løft da sengeheste helt op. Herved klikkes de automatisk på plads i de sorte plastikbeslag.


SIKRING HOVEDSTØTTE



For at slå hovedstøttesikringen ned, skal den løftes og vippes nedad. Et plastikbeslag gør det muligt at fastlåse den under lejet.

Gør det modsatte for at sætte hovedstøttesikringen på plads igen.

OP / NED

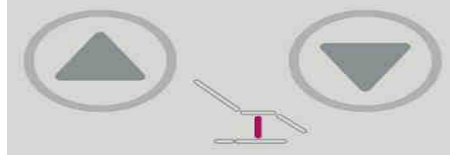

ELEVATION OVERKROP



ELEVATION UNDERKROP



SYNKRONISERET ELEVATION



VEJLEDNING BREMSE/PEDAL



Bremse-/styrepedaler er placeret på begge sider af stellet og har 3 positioner:

- RØD – bremse aktiveret
- MIDT – bremse deaktiveret
- GRØN – retningsbestemte hjul

ON / OFF KNAK

For at undgå, at batteriet aflader, tryk på OFF-knappen i lidt mere end 3 sek., så snart enheden ikke længere er i brug.



For at tænde batteriet, tryk da på ON-knappen i lidt mere end 1 sek.

Batterilys/batterikapacitet:
GRØN (langsomt blinkende): > 80 %
BLINKER GRØNT (langsomt 1s/1s): < 80 %
BLINKER GRØNT (længde 0,5s/4s): > 25 %
BLINKER ORANGE (længde 0,5s/4s): < 25 %
SLUKKET: < 20 % - **batteriet skal oplades!**
ORANGE: batterifejl

NØDSTOP



For at frigøre nødstoppet, drej da i retning af pilene angivet på toppen af den røde knap.

Tryk derefter på ON-knappen på batteriet.

ANVENDELSESINSTRUKTION

IRIS Bruseleje bør kun anvendes til forflytning eller brusebad af patienter.

IRIS har en MAX belastning på 160 kg.

IRIS er beregnet til indendørs brug, på fast jævnt underlag med en hældning på mindre end 5°.

IRIS må kun anvendes med den madras, der er leveret til formålet.

Anvend IKKE IRIS, hvis madrassen er beskadiget!

Anvend KUN den batterioplader, som følger med enheden!

Oplader og ladestander må KUN tilsluttes 220/230V AC-stikkontakt placeret i et tørt miljø!

Oplad IKKE IRIS i et vådt område.

BATTERIOPLADNING



Placér batteriet i ladestanden. Sæt opladerstikket i stikkontakten. Det grønne LED-lys på siden af stikket indikerer, at den er tændt. Tilslut opladeren til en 230V stikkontakt. LED-lyset på opladeren angiver batteriets status:
Gul LED: Batteriopladning
Grøn LED: Batteri er opladet
Samlet opladningstid: 3-6 timer

SIKKERHEDSINSTRUKTION

Placér **IKKE** patienten for enden af lejet!

Fyld **IKKE** madrassen med vand!

Blokér IKKE udstigningen af IRIS! **Vægten af vand kan forårsage, at lejet tilter.**

Kontrollér visuelt og manuelt pallåsen før hver brug!

Tjek bremserne, før en forflytning!

