



Artikelnummer quickguide: 95-001413



OBS! Læs altid brugsanvisningen, inden madrassen tages i brug.

Installation & opstart

1. Placer madrassen oven på den eksisterende madras, og fastgør elastikbåndene omkring den underliggende madras.
2. Hæng pumpetasken på sengegavlen i fodenden eller placer den på en flad og stabil overflade. Hvis pumpetasken (tilbehør) anvendes, fastgøres den til sengegavlen.
3. Tilslut luftslangerne fra madrassen til pumpen.
4. Indstil pumpekontakten til "0" (fra). Tilslut elledningen til en stikkontakt (220 V). Start pumpen ved at trykke på "1" (til).
5. Indstil det ønskede luftryk (se punkt 7). Luftrykket opnås efter 15 – 20 minutter.

Funktion

6. Komfortindstillinger

Passende lufttryk justeres med komfortknappen (1-8). Vejledning til valgt af lufttryk baseret på brugervægt er angivet i tabellen på pumpen. Indstillingen foretages, når brugeren ligger på madrassen.

7. Kontrol af lufttryk (Håndkontrol)

Åbn betrækket. Placer en flad hånd under luftcellerne direkte under brugeres bækken, og kontrollér at brugeren ikke ligger direkte på den underliggende madras. Der skal være et mellemrum på ca. 1-2 fingre. Hvis du kan mærke, at brugerens krop hviler på din hånd, skal du øge komfortindstillingerne til næste højere trin. Vent 10 minutter, og foretag en ny kontrol med hånden. Madrasserne er egnede til brug af personer med en anbefalet brugervægt på 0 – 200 kg.

8. Når lufttrykket er indstillet, er der to muligheder

a) Tag luftslangerne ud af madrassen, og sluk derefter for pumpen. Madrassen er udstyret med afspærringsventiler, der gør det muligt for luften at forblive i madrassen. Hvis pumpen ikke konstant er tændt, anbefaler vi, at den tændes hver uge og punkt 7 og 8 gentages.

b) Lad pumpen være tilsluttet, og lad den køre.

9. Udlukning af luften (CPR)

I forbindelse med CPR (hjertestopbehandling) lukkes luften ud af madrassen ved at slutte luftslangerne til madrassen, uden at de er sluttet til pumpen. Samme fremgangsmåde anvendes efter brug.

Fejl/problemer

Læs punktet "Fejlfinding" i brugsanvisningen. Kan fejlen fortsat ikke rettes, bedes du kontakte Wolturnus A/S, som forhandler dette produkt i Danmark.

Kontakt

Wolturnus A/S, Skalhuse 31, 9240 Nibe

Telefon: + 45 96717170, info@wolturnus.dk

Nødtelefon, +45 8880 8260 (Hverdage og weekend hele døgnet)