

Audinor DUO+ system

Quick Guide DK_20180612_01



Ladekontakt/
Audioindgang

Mikrofon
TIL SAMTALEPARTNER

Ekstern
mikrofon



Ladekontakt/
Audioindgang

Modtager
TIL DIG

Lyd-
udgang
Volum-
kontrol

Opladning

Sæt strømkontakten i bunden af enheden. Når en enhed lades op, lyser lampen rødt. Når enheden er fuldt opladet lyser indikatoren grønt.

Tænd/sluk

- Tænd: Tryk og hold tænd/sluk knappen ind i 1 sekund. Lampen lyser grønt når enheden tændes.
- Sluk: Tryk og hold tænd/sluk knappen ind i 1 sekund. Lampen lyser rødt når enheden slukkes.

Lytte

Ved brug af halsslyngen, skal høreapparaterne skiftes til teleslynge programmet. Hvis man ikke har høreapparater, kan man i stedet tilkoble et par almindelige hovedtelefoner.

Lydjustering

Bevæg volumenkontrollen opad for at justere niveauet op, og nedad for at regulere niveauet ned.

Tilkobling af ekstern lydkilde

Man kan tilkoble en ekstern lydkilde til både mikrofon (TV mm) og modtager (iPad, mobiltelefon mm). Tag evt. kontakt med din leverandør for nærmere information.

Lavt batteri

Ved lavt batteri vil lampen blinke rødt. Lad enheden op når indikatoren for lavt batteri lyser.

Flere spørgsmål?

Kontakt enten din forhandler, dit lokale kommunikationscenter eller:

Audinor ApS, Benediktevej 5, 3480 Fredensborg

Mail: info@audinor.dk

Telefon: 42 18 06 85