

## Zibo Combi Active

# Quick guide

Denne guide vil hjælpe dig i gang med madrassen. Det simple panel på toppen af pumpen samler funktionerne og viser madrassens tilstand via lysdioderne.



### Tænd/sluk for pumpen

Forbind pumpen med slangen fra madrassen. Tilslut strømkablet og tænd for kontakten på siden. Hvis CPR-ventilen ikke er monteret, vil madrassen ikke pumpe.



### Juster vækselftryk - Komfortindstillinger

+/- knappen bruges til at justere trykket i forskellige komfortindstillinger, så det bliver komfortabelt for brugeren. Pumpen starter altid op i funktionen "Lavt tryk".

Venstre LED angiver funktionen "Lavt tryk". Højre LED angiver funktionen "Højt tryk".



### Alarm for trykproblem

Den gule advarselstrekant angiver et trykproblem i madrassen.

**Lavtryksalarm:** Den røde LED blinker langsomt.

**Højtryksalarm:** Den røde LED blinker hurtigt.

**Ved en alarm:** Kontroller alle slangetilslutninger.



### Systemfejl

Den røde LED-pære ved siden af svensknøglen blinker, og der høres også en alarm. Kontakt ZiboCare for service af madras og pumpe.