

## Zibo Pius

# Quickguide

Denne guide vil hjælpe dig, med at komme igang med madrassen. Det enkle panel på toppen af pumpen samler funktionerne og indikerer madrassen tilstand via lysdioderne



### Tænd/sluk for pumpen



### Indstil pumpe til brugerens vægt

Knapperne '+' og '-' bruges til at justere i forhold til brugerens vægt. Systemet vil som standard være indstillet til 70 kg ved opstart.



### Vekseltryk funktion

Dynamisk funktion der får luftcellerne til at skiftevis at fyldes/tømmes for luft. Luftsiftet i cellerne stimulerer huden.



### Alarmer

Lys udfør mmHg og den gule advarselstrekant angiver et trykproblem i madrassen.



### Statisk funktion

Alle luftcellerne vil have samme konstant lave tryk i cellerne. Anbefalet til patienter der ikke tåler uroen fra den dynamiske funktion f.eks. smertepatienter.

#### Lavtryksalarm:

Den røde LED-pære blinker langsomt. Kontroller for lækage f.eks. åben CPR-ventil, koblinger og hul i luftcelle.

#### Højtryksalarm:

Den røde LED blinker hurtigt. Kontroller om en luftslange er klemt, eller om der er en ekstra belastning på madrassen f.eks. udstyr eller en gæst der sidder på den.



### Plejeindstilling/Max.firm

Funktionen benyttes til pleje/mobilisering. Madrassen bliver hård/statisk, det kan tage op til 6 minutter, Efter 20 minutter vender systemet automatisk tilbage til standard programmet P3, hvorefter man skal vælge ønsket program. For selv at slå funktionen Plejeindstilling fra, tryk på knappen igen.



### Systemfejl

Den røde LED-pære ved siden af svensknøglen blinker, og der høres også en alarm. Kontakt ZiboCare for service af madras og pumpe.

Har du brug for hjælp, så kontakt os på  
Tlf.: +45 76 900 407  
E-mail: [post@zibocare.dk](mailto:post@zibocare.dk)  
[www.ZiboCare.dk](http://www.ZiboCare.dk)

