



Doro

DK QUICKGUIDE  
Magna 4000





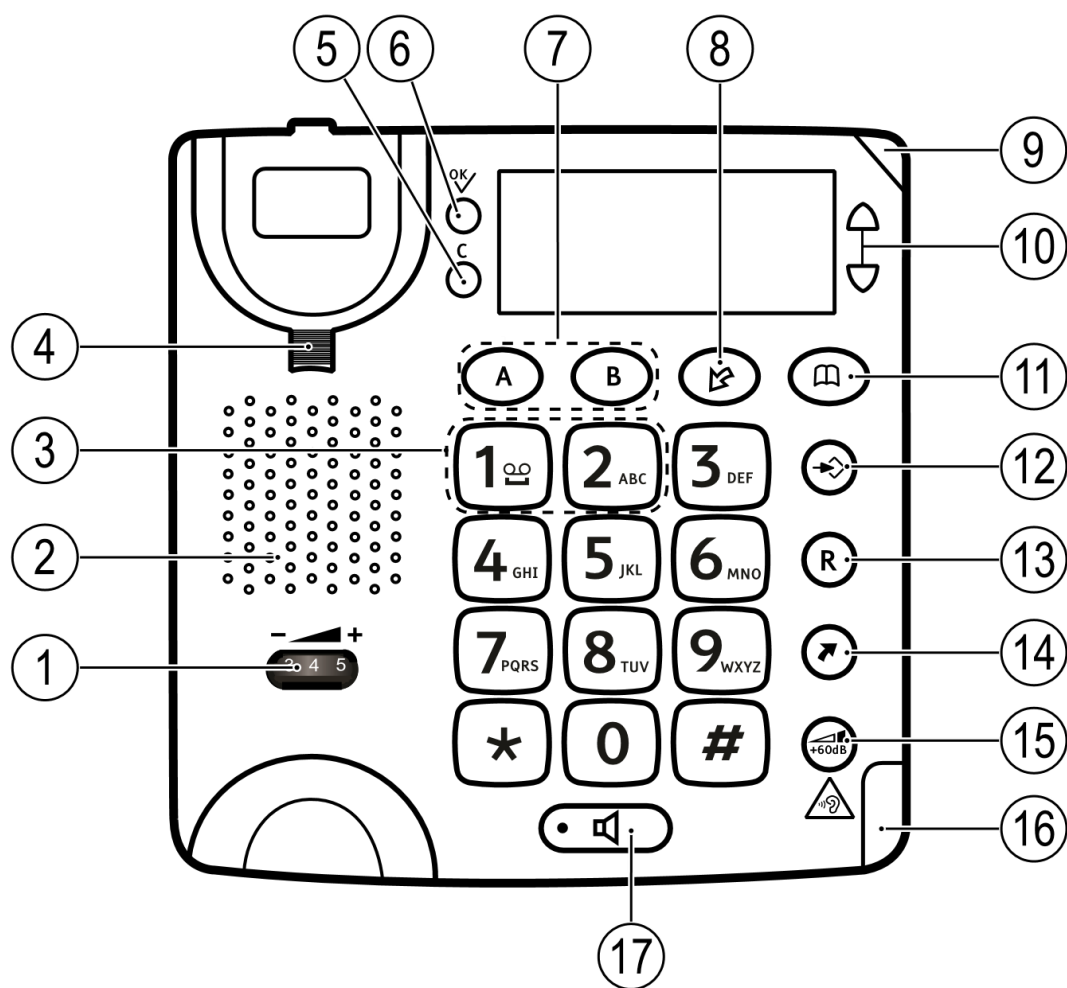

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Volumenkontrol røret            | 10. Op/ned                         |
| 2. Højtaler                        | 11. Telefonbog                     |
| 3. Adgangstaster til teletjenester | 12. Menu                           |
| 4. Ophængningskrog til rør         | 13. R-tast                         |
| 5. Slet                            | 14. Genopkald                      |
| 6. OK                              | 15. Ekstra forstærkning (boost)    |
| 7. Hurtigvalgstaster               | 16. Forstærkning på/ringeindikator |
| 8. Nummervisning                   | 17. Højtaler                       |
| 9. Indikator for nyt opkald        |                                    |

## Tilslutning
































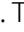

1. Slut spiralledningen til røret og til udtaget.
2. Slut netadapteren (ekstraudstyr) til udtaget i væggen og til udtaget, der er markeret med **DC 12V** på enheden.
3. Slut telefonledningen til et telefonstik og til udtaget, der er markeret med  på enheden.
4. Løft røret, og kontrollér, at der høres en klartone.

**Bemærk:** Brug den medfølgende telefonledning. En ledning fra en tidligere telefon er muligvis ikke kompatibel.

## Opsætning

Åbn opsætningsmenuen ved at trykke på . Når en indstilling er bekræftet med , vises den næste indstilling automatisk. Spring til den næste indstilling ved hjælp af / .

Telefonen vender tilbage til standbytilstand efter 60 sekunders inaktivitet, eller hvis du trykker på **b**.

1. Tryk på .
  2. **DANSK** vises.
  3. Vælg det ønskede sprog med / . Tryk på .
  4. Vælg den ønskede kontrastindstilling (**LCD-KONTRAST**, 2) med / . Tryk på .
  5. Vælg det ønskede timetal (00-23) med / . Tryk på .
  6. Vælg det ønskede minuttal med / . Tryk på .
  7. Vælg den ønskede dag med / . Tryk på .
  8. Vælg den ønskede måned med / . Tryk på .
  9. Vælg **TONE** eller **PULS** med / . Tryk på .
- Bemærk!** Hvis du ikke er sikker på, hvilken tilstand du skal bruge, kan du vælge **TONE**, da den fungerer de fleste steder.
10. Vælg **FLASH TID** med /  (100 for EU/GB/AUS, 270 Frankrig/ Portugal og 600 New Zealand). Tryk på .
  11. **NYT OPKALD IND.** vises. Tryk på . Aktiver/deaktiver lysdioden for nye opkald. Vælg **TIL** eller **FRA**. Tryk på .
  12. Knapperne 1 og 2 kan programmeres med servicenummer. **TELE-TJENESTER** vises. Tryk på . Brug /  til at vælge **TAST 1** eller **TAST 2**, og tryk derefter på . Brug tastaturet til at redigere adgangsnummeret. Tryk på . Indtast et navn på tjenesten. Tryk på .

# Betjening

## Sådan foretages et opkald

### Normale opkald

1. Løft telefonrøret.
2. Indtast det ønskede telefonnummer.



### Opkald med korrigeringsfunktion

Giver mulighed for at indtaste og ændre et nummer, før nummeret ringes op.



1. Indtast det ønskede telefonnummer. Fejlindtastninger kan slettes med c.
2. Løft telefonrøret.


### Genopkald

De senest kaldte telefonnumre kan uden videre kaldes op igen.

1. Tryk gentagne gange på  for at bladre igennem de kaldte numre.
2. Løft røret for at kalde nummeret op, eller løft røret, og tryk derefter på  for at kalde det senest kaldte nummer op.

### Håndfri opkald

1. Tryk på , håndfri funktion er aktiveret.
2. Indtast det ønskede telefonnummer.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

**Bemærk!** Du kan skifte imellem røret og håndfri tilstand ved blot at trykke på  eller løfte røret. Husk, at kun en person kan tale ad gangen, når telefonen er i håndfri tilstand. Omskiftningen mellem højttaler og mikrofon sker automatisk. Det er derfor meget vigtigt, at der ikke forekommer høje lyde, f.eks. musik, i telefonens umiddelbare nærhed, da dette vil forstyrre den håndfrie funktion.

### Adgangsopkald til tjenester

Genvejstaster til adgangsnumre til operatørtjenester.

1. Tryk på 1 eller 2, og hold den nede, indtil adgangsnummeret til tjenesten vises.
2. Tryk på 0, eller løft røret for at kalde op til nummeret.