

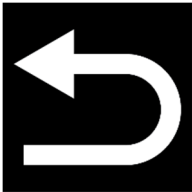

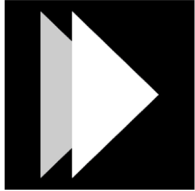



## Dolphin GuideConnect - Kom-godt-i-gang-manual til touch-skærm



	Handlinger (Dukker op, når til rådighed)
	Forrige
	Gå tilbage

	Hjælp og oplysninger
	Næste
	Vælg


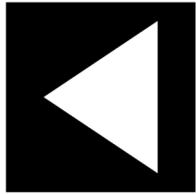

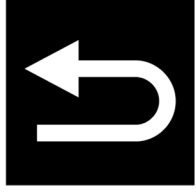
For hjælp og support ring til 57 67 20 99

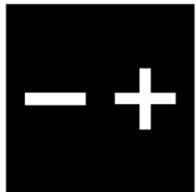
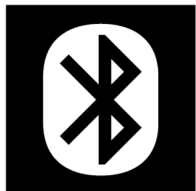
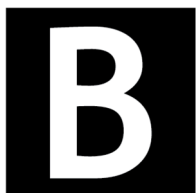
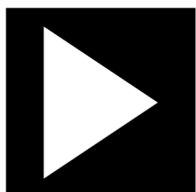

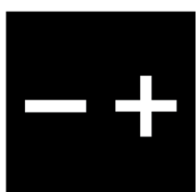
Eller send en e-mail til [info@lvi.dk](mailto:info@lvi.dk)

Du kan også gennemse de gratis ressourcer på [yourdolphin.com/support](http://yourdolphin.com/support)

# Dolphin GuideConnect - Kom-godt-i-gang-manual til fjernbetjening



	Handlinger
	Forrige
	Vælg
	Gå tilbage

	Tryk og hold for at zoome ind/ud
	Opret Bluetooth-forbindelse
	Hjælp og info
	Næste
	Start/stop oplæsning
	Skru op/ ned for lydstyrke

For hjælp og support ring til 57 67 20 99

Eller send en e-mail til [info@lvi.dk](mailto:info@lvi.dk)

Du kan også gennemse de gratis ressourcer på [yourdolphin.com/support](http://yourdolphin.com/support)

# Dolphin GuideConnect - Flere praktiske tastaturgenveje

## Genvejstaster til menuer

Næste punkt	PIL-NED / HØJRE-PIL
Forrige punkt	PIL-OP / VENSTRE-PIL
Vælg punkt	ENTER
Tilbage til forrige skærm	ESCAPE
Hjælp	F1
Handlinger	F2
Hjælp og info	F3
Læs aktuelle emne	F4
Afbryd tale	CTRL

## Genvejstaster til skrivning

Næste / forrige ord	CTRL + HØJRE-PIL / VENSTRE-PIL
Vælg tekst	SHIFT + PILETASTER
Kopier den valgte tekst	CTRL + C
Indsæt tekst	CTRL + V
Næste / forrige tegn	HØJRE-PIL / VENSTRE-PIL

## Genvejstaster til læsning

Næste / forrige linje	PIL-NED / PIL-OP
Læs alt	F5
Pause	CTRL

## Genvejstaster til websteder

Næste / forrige punkt	PIL-NED / PIL-OP
Næste / forrige tegn	HØJRE-PIL / VENSTRE-PIL
Næste / forrige ord	CTRL + HØJRE-PIL / VENSTRE-PIL
Slå billeder til / fra	CTRL + I
Skift displaytilstand	CTRL + T
Næste overskrift	H
Næste redigeringsområde	E
Næste link	K
En side tilbage	BACKSPACE

## Tastaturgenveje

Ctrl + 0	Tale til / fra
F1	Hjælp
F2	Menuen Handlinger
F3	Hjælp og info
F4	Gentag
F5	Fortsæt læsning
F6	Start taleinput*
F7 / F8	Stemmelydstyrke: ned / op
F9 / F10	Talehastighed: ned / op
F11 / F12	Zoom ud / ind

\*Ikke tilgængelig på dansk

Hvis du har brug for mere hjælp, så ring til os på - 57 67 20 99

Eller gennemse ressourcerne til hjælp, support og træning på

[yourdolphin.com/support](https://yourdolphin.com/support)