

Quickguide

Denne guide vil hjælpe dig, med at komme igang med madrassen. Det simple panel på toppen af pumpen samler funktionerne og indikerer madrassen tilstand via lysdioderne.



+



Tænd og Tilslut

Forbind pumpen med slangen fra madrassen. Tilslut strømkablet og tænd for kontakten på siden. Hvis CPR ventilen ikke er monteret, vil madrassen ikke pumpe.



Juster vækselftryk

+/- knappen bruges til at justere trykket fra lavt tryk til højt tryk. Venstre LED angiver valgt lavt tryk. Højre LED angiver valgt højt tryk.



Alarm for trykproblem

Den gule advarselstrekant angiver et trykproblem i madrassen.

Lavtryksalarm: - Den røde LED blinker langsomt.

Højtryksalarm: - Den røde LED blinker hurtigt.

Ved en alarm: Kontroller alle slangetilslutninger.



Systemfejl

Den røde LED ved siden af svensknøglen blinker, og der høres også en alarm.

Kontakt ZiboCare for service af madrassen.

