

BRUGSGUIDE

ERGOTip Care

Teknologi med omhu!

ERGOTip Care fremmer effektive hygiejne- og baderutiner i en glidende bevægelse, og sikrer samtidig en skånsom arbejdsstilling for hjælperen.

Stolen er multifunktionel til toilet, bad, bleskift, påklædning, sårpleje og kompressionsstrømper og udmærker sig ved en lille venderadius, der gør det nemt at bruge stolen i mindre rum.

ERGOTip Care har en åbning i rygvinkel – via rygforskydning – der giver bedre komfort og mindsker shear for brugeren.

Desuden er den udstyret med praktiske komfortruller, hvorved du undgår tunge løft af ben ved påføring af kompressionsstrømper og sårpleje.



BRUGSGUIDE

ERGOTIP Care



1. Positionering i ERGOTIP Care
Placer borgeren i stolen med sædet hævet. Vær opmærksom på, at positionere bagdel så langt bagud mod rygleen som muligt. Overdele tages evt. af.




Tryk på pil op for at hæve sæde



2. Afklædning - linned ned
Kip stolen helt tilbage med sædet hævet. Herefter kan linning tages ned.



Tryk på pilen for at kippe stolen

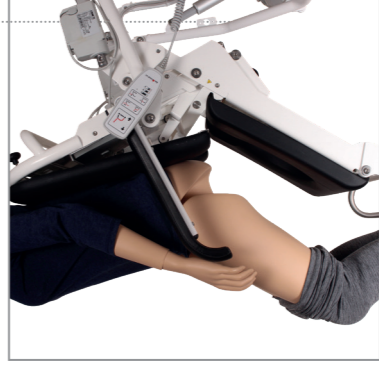

3. Rygløft og buks af
Aktiver rygløft ved at holde knap i bund. Sæde sænkes og ryg løftes med samme knap. Herefter kan underdele tages af ved brug af komfortfunktion..




Tryk på pilen for at sænke sædet og løfte ryggen



4. Klar til bad, hygiejne og artørring
Hæv dernæst sædet (pos. 1) for at sikre, at borgeren forbliver i position. Hav altid sædet hævet i badsituationen.


Tryk på pil op for at hæve sædet igen

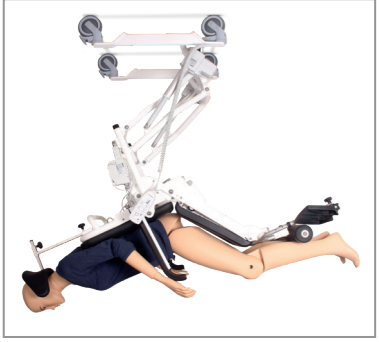

5. Komfortfunktion til kompresionsstrømpe og underdele
Påsæt kompresionsstrømper ved at anvende den praktiske rullefunktion til en glidende bevægelse.



Brug komfortruller for at undgå løft af ben

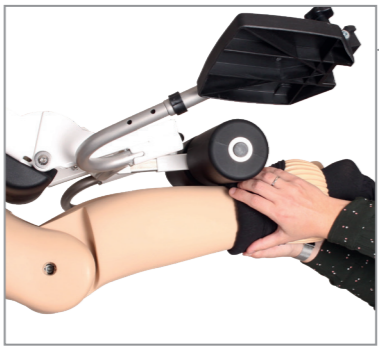

6. Påklædning - underdele på
Underdele (trusser, buks, osv.) rulles på indtil knæ (pos. 4) Dernæst løftes ryg (pos. 3) for at påføre bukser og overdele. Sædet løftes (pos. 2) for at rette løj til.

Tryk på pil op for at sænke sæde og løfte ryg

