

Alseat—en lyn guide



Placer foldet spilerdug med åbninger ud mod og **10 cm. fra madraskant**. Placer Alseat så kanten **flugter** madraskant.



Person sidder **helt inde på sædet** og griber om strop og **kigger op på hjælper**.



Bed personen **læne sig tilbage** og **vip derefter personen tilbage** ved at strække i **dine ben**.
Grib yderst på vægtstangen !



Drej/gå personen ind i seng mens personen er til **i en rolig bevægelse**



Afslut med at person ligger på ryggen med bøjede ben eller på siden

Bed person om at vippe til siden evt. (gribe om sengehest) og fjern Alseat ved at gribe i rygdelen's hul.

PS. Tryk ikke ned på vægtstangen.

Spilerdug
Forflytningsteknik

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.dk