



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

## PRÆSENTATION

# Cobi Sky positioneringsmadras

## - til de svære positioneringer

**Cobi Sky positioneringsmadras er udviklet til at sikre trykfordeling, stabilitet, komfort og fuld understøttelse.**

Cobi Sky positioneringsmadras bruges på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen til svækkede brugere, som har brug for dyb og trykaflastende lejring på grund af neurologiske symptomer, stærke smerter eller ustabile frakturer.

Brugervægt fra 30-110 kg.



- Modellerbar madras til mikropositionering.
- Let at installere, ingen pumpe.
- Tryksårsforebyggende og -aflastende.
- Skumramme, der sikrer stabilitet.
- Strækbart og åndbart inkontinensbetræk.
- Perforeret midterlag, der sikrer optimal ventilation.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

# Cobi Sky positioneringsmadras

## Konstruktion - madras

Cobi Sky er en helmadrass med flere lag. De øverste lag er betræk (et gråt og et hvidt).

Under de øverste betræk findes "madraskernen", som består af små Krøyer-kugler.

Madraskernens betræk er syet i kanaler, hvilket gør, at kuglerne i hver enkelt kanal kan skubbes rundt. Det betyder, at madrassen kan formes præcist til den lejrning, som bruger har behov for.

Bruger synker med andre ord ned i madrassen, hvilket sikrer optimal støtte og trykaflastning, samtidig med at det mindsker risikoen for tryksår.

Under laget med kanaler og Krøyer-kugler er der et fjedrende midterlag med perforeringer, der sørger for optimal ventilation af madrassen.

En skumramme rundt om og under de to lag sikrer stabilitet, når bruger sidder på kanten af sengen.

### Betræk

Det grå yderbetræk til madrassen er et inkontinensbetræk, som er strækbart, åndbart og vaskbart. Det grå betræk dækker hele madrassen og lynes med lynlås.

Yderbetrækket sidder løst, hvilket tillader plejepersonale at skubbe og forme fyldet i madrassen, uden at betrækkets stramhed ophæver fyldets placering og funktion.

Det hvide inderbetræk er et ultratyndt, fleksibelt og strækbart lycrabetræk.

## Rengøring og vedligeholdelse

Daglig rengøring af det heldækkende yderbetræk kan ske med vand, rengøringsmiddel og en tør, ren klud til aftørring.

Yderbetrækket kan også desinficeres med ethanol eller et klorprodukt.

Det grå yderbetræk kan vaskes i vaskemaskine ved 60°C og tørres i tørretumbler ved lav varme eller hænges til tørre, hvis muligt.

Betrækket må ikke stryges.


Det hvide inderbetræk har en levetid på 8 vaske. Inderbetrækket vaskes i en vaskepose i vaskemaskine på 60°C.

Inderbetrækket må ikke tørres i tørretumbler, men skal hænges op.

## Anvendelse - skub fyldet rundt

Cobi Sky imødekommer tryksårsudfordringer uden at gå på kompromis med stabiliteten.


Det skyldes blandt andet madrassens opbygning med kanaler, der kan skubbes rundt. På den måde kan madrassen formes præcist til de behov som bruger har.

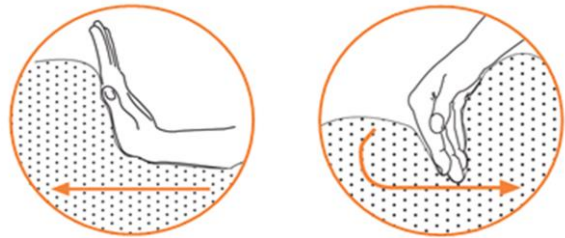

### Positionering med fordybning

I tilfælde af allerede eksisterende tryksår kan der etableres en fordybning ved at skubbe rundt på kuglefyldet. Lav et hul med hånden under det punkt, hvor trykket skal aflastes.

Hullet kan efterfølgende glettes ud igen, når der ikke længere er behov for aflastning af fx hæl.

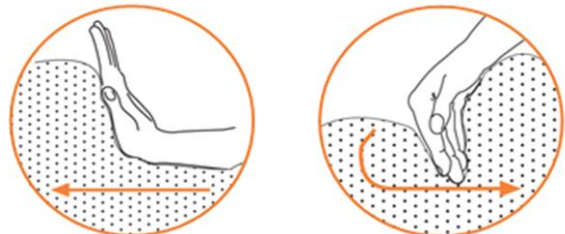

Kontakt Cobi Rehab på  
[cobi@cobi.dk](mailto:cobi@cobi.dk) eller

7025 2522,

hvis du ønsker mere information,  
undervisning, produktfremvisning

eller gratis afprøvning af

ét eller flere hjælpemidler.